

ООО «Ультра»



ТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

О.Н.Савельев

**НАБОР ИМПЛАНТАТОВ И АНАЛОГОВ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ – «УЛЬТРА»**

942.422.000 ПС

| И.в. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|              |              |              |             |              |

2009

Набор предназначен для внутрикостной имплантации имплантатов с целью создания опоры для установки зубных протезов.

Применяется в стоматологических отделениях клиник и больниц.

### 1 КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.1 Комплект поставки приведен в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение документа | Наименование исполнения                                                                 | Комплектность |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 942.422.000           | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 3,5 – 8 тип 1                  | 1             |
| 942.422.000-01        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 3,5 – 10 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-02        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 3,5 – 13 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-03        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 3,5 – 16 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-04        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 4,3 – 8 тип 1                  | 1             |
| 942.422.000-05        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 4,3 – 10 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-06        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 4,3 – 13 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-07        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 4,3 – 16 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-08        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 5,0 – 8 тип 1                  | 1             |
| 942.422.000-09        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 5,0 – 10 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-10        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 5,0 – 13 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-11        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 5,0 – 16 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-12        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 6,0 – 8 тип 1                  | 1             |
| 942.422.000-13        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 6,0 – 10 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-14        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 6,0 – 13 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-15        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный ИВЦ – 2Э – 6,0 – 16 тип 1                 | 1             |
| 942.422.000-16        | Имплантат винтовой цилиндрический двухэтапный комбинированный ИВЦК – 2Э – 3,5 – 8 тип 2 | 1             |

942.422.000 ПС

| Изм.      | Лист. | № докум. | Подп. | Дата. |
|-----------|-------|----------|-------|-------|
| Разраб.   |       | Королев  |       |       |
| Пров.     |       | Савельев |       |       |
|           |       |          |       |       |
| Н. контр. |       | Савельев |       |       |

НАБОР ИМПЛАНТАТОВ И АНАЛОГОВ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ – «УЛЬТРА»

| Лит. | Лист | Листов |
|------|------|--------|
| А    | 2    | 4      |

Паспорт

ООО «Ультра»

| Обозначение документа | Наименование исполнения                                                                    | Комплектность |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 942.422.000-17        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 3,5 – 10 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-18        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 3,5 – 13 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-19        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 3,5 – 16 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-20        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 4,3 – 8 тип 2  | 1             |
| 942.422.000-21        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 4,3 – 10 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-22        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 4,3 – 13 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-23        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 4,3 – 16 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-24        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 5,0 – 8 тип 2  | 1             |
| 942.422.000-25        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 5,0 – 10 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-26        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 5,0 – 13 тип 2 | 1             |
| 942.422.000-27        | Имплантат винтовой цилиндрический комбинированный двухэтапный<br>ИВЦК- 2Э – 5,0 – 16 тип 2 | 1             |
| 942.422.100           | Аналог цилиндрических двухэтапных имплантатов<br>АН – 3,5 – 11                             | 1             |
| 942.422.100-01        | Аналог цилиндрических двухэтапных имплантатов<br>АН – 4,3 – 11                             | 1             |
| 942.422.100-02        | Аналог цилиндрических двухэтапных имплантатов<br>АН – 5,0 – 11                             | 1             |
| 942.422.100-03        | Аналог цилиндрических двухэтапных имплантатов<br>АН – 6,0 – 11                             | 1             |
| 942.422.200           | Аналог – штырь вспомогательный стоматологический АШВС – 1,55 – 16,45                       | 1             |
| 942.422.200-01        | Аналог – штырь вспомогательный стоматологический АШВС – 1,55 – 18,6                        | 1             |
| 942.422.200-02        | Аналог – штырь вспомогательный стоматологический АШВС – 2,74 – 14,1                        | 1             |
| 942.422.200-03        | Аналог – штырь вспомогательный стоматологический АШВС – 2,96 – 16,56                       | 1             |

|         |              |              |             |              |
|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
|         |              |              |             |              |

## 2. ПОРЯДОК РАБОТЫ

2.1 Прежде чем приступить к работе с набором, необходимо аккуратно распаковать его. Если набор транспортировался при отрицательных температурах наружного воздуха, распаковку можно производить только после выдержки его при комнатной температуре в течение не менее 6 часов.

2.2 Внимательно ознакомьтесь с настоящей сопроводительной документацией на набор.

2.3 Проверьте комплектность всех составных частей изделий набора.

2.4 Далее необходимо выполнить весь комплекс работ по очистке, дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации входящих в набор изделий согласно МУ 287-113.

2.5 Далее использовать изделия, входящие в набор в соответствии с медицинскими технологиями, применяемыми при имплантации зубных протезов.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Изготовитель гарантирует соответствие набора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

3.2 Назначенный срок службы имплантатов - не менее 7 лет.

3.3 Средний срок службы аналогов - не менее 1,5 лет, а аналоги – штыри одноразового использования.

3.4 Гарантийный срок хранения имплантатов – 2 года с момента (даты) изготовления.

3.5 Рекламации в установленном порядке вместе с настоящим паспортом и сопроводительной документацией на набор, предъявляются по адресу: 198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная д.7А офис 3 – Н – 77 ООО «Ультра».

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1 Набор имплантатов и аналогов стоматологических «Ультра» соответствует требованиям ТУ 9437-001-94681064-2009 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

Продан \_\_\_\_\_  
(дата, штамп)

|   |         |              |              |             |              |
|---|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| И | № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |
| И | № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл | Подп. и дата |

Прошнуровано и скреплено  
печатью

4 листов



Должность ген. директор

Подпись [Signature]

"14" января 2009 г.