

Код ОКП 93 9800

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель компании-заявителя
Генеральный директор
Лавров Д.Ю.
«11» сентября 2009 г.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


Изделия для забора крови

Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р ИСО 10993.1-99, ГОСТ Р ИСО 10993.4-99, ГОСТ Р ИСО 10993.11-99,
ГОСТ Р ИСО 10993.12-99, ГОСТ 25046-81


2009

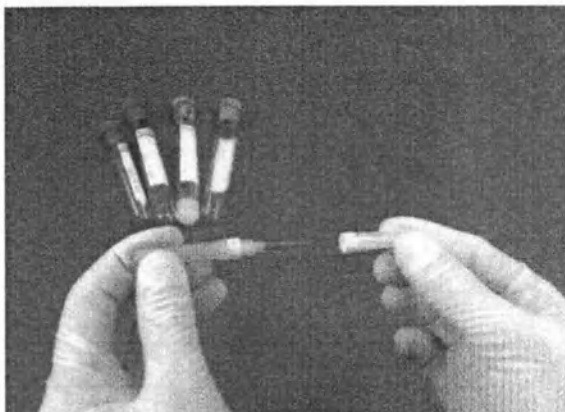


Возьмите иглу ПРОБА и вскройте её. Для этого поворачивайте один из концов чехла вокруг своей оси. Удалите короткий колпачок, обнажая закрытый силиконом конец иглы. Не снимайте длинный колпачок иглы.

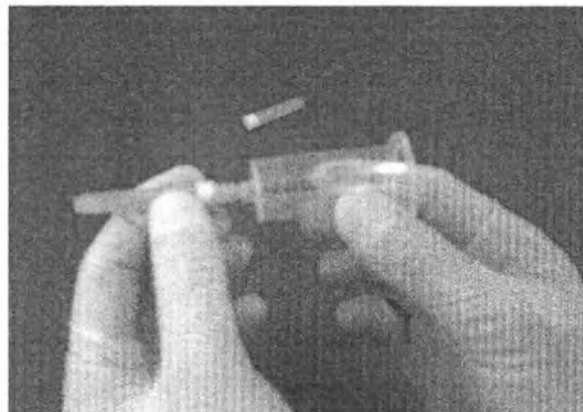


Соедините иглу и держатель до плотного соединения, вращая иглу по часовой стрелке. Определите место венепункции и обработайте его антисептиком

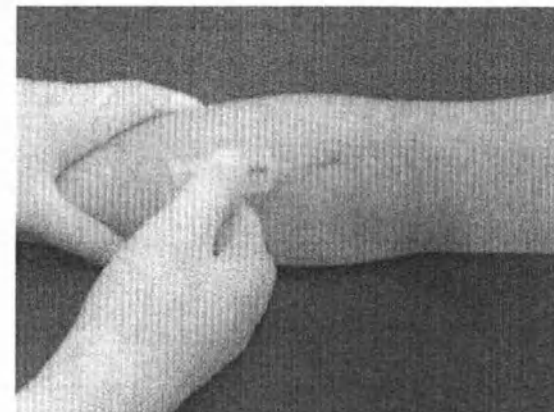


Выполните венепункцию, держа иглу под углом приблизительно равным 30° к руке пациента.

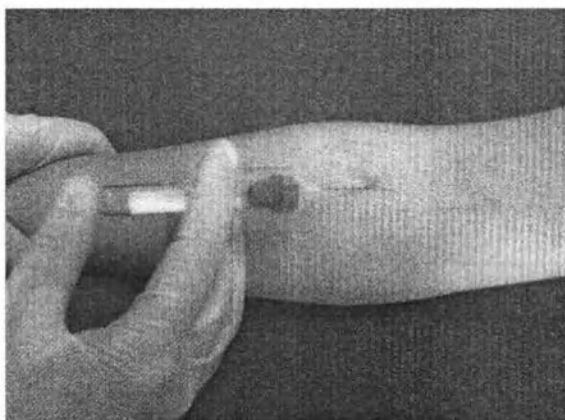

Зафиксируйте держатель, а затем, вставьте пробирку ПРОБА внутрь держателя и доведите её до упора, прокалывая резиновую перегородку. Кровь наполнит пробирку за счет вакуума

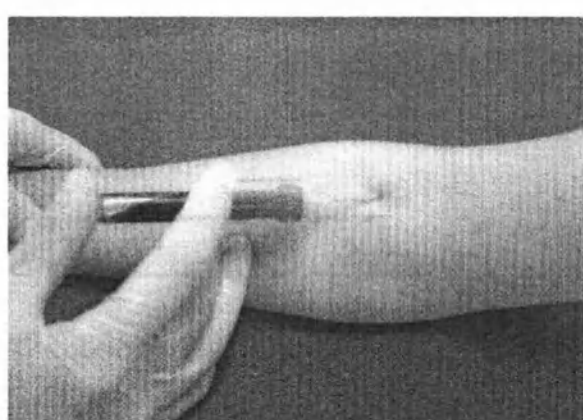

Когда кровь перестанет течь, осторожно удалите пробирку из держателя, сохраняя неподвижность держателя. **ОСТОРОЖНО** перемешайте образец крови, переворачивая пробирку 5-6 раз.

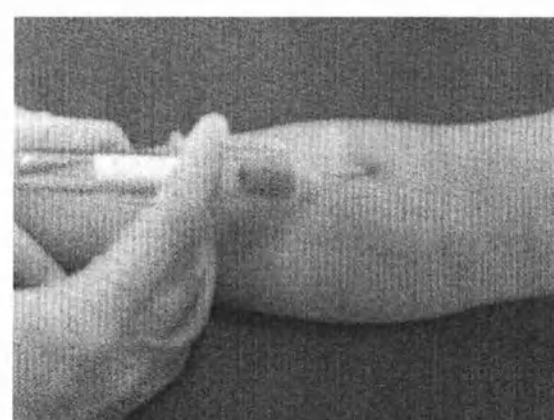

Если необходимо взять ещё одну пробу крови, вставьте новую пробирку в держатель, не вынимая иглы из вены.



Лавров Д.В.