

УДТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Веста»



Ракимкас Дарюс

02.06.2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

«Бутылочка соской, в том числе ортодонтической, для детского питания с антиколиковой системой «Lovi», «Canpol babies»»»

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед первым и каждым последующим применением бутылочку разобрать, тщательно промыть и продезинфицировать (подходящим для изделия способом)



2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Силиконовый клапан в соске, уравнивает давление, в бутылочке позволяя потоку в соске быть таким же, как у кормящей матери, препятствует заглатыванию воздуха, снижая вероятность возникновения колик у ребенка.

Имитация рефлекторного ускорения выработки молока: мягкие стенки силиконовой бутылочки, позволяют регулировать скорость поступления молока, путем надавливания на силиконовые стенки бутылки.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности: 5 лет с даты изготовления, смотреть упаковку (при условии хранения бутылочки в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, температура 5-28С).

Бутылочки стерилизуются кипячением в течение 2-х мин. Можно использовать в паровом стерилизаторе. Помещать в микроволновую печь только для подогрева. При подогревании жидкости соска и крышка от бутылочки должно быть всегда сняты. Не кипятить в СВЧ-печи.

Поврежденную бутылочку следует немедленно выбросить.

Данное изделие использовать только под присмотром взрослых.

Проверять бутылочку перед каждым применением, на предмет наличия сколов или других повреждений целостности изделия. Мойте и стерилизуйте бутылочки перед первым применением и после каждого дальнейшего использования.

Чтобы бутылочки оставались гигиеничными, стерилизуйте их в паровом стерилизаторе. Во избежание повреждения бутылочек при кипячении, следите, чтобы в емкости было достаточное количество воды (кипятить не

более 5 минут).

Можно безопасно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.

Бутылочки изготовлены из разных материалов, которые могут быть повреждены при нагреве в микроволновой печи. Различные материалы способны выдержать различную температуру. (смотреть на упаковке)
При выборе размера и формы бутылочки необходимо учитывать индивидуальное развитие ребенка.

