

УДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Веста»



Ракицкас Дарюс

С.Я.Я.Я. 2011 г.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

«Аспиратор назальный детский «Lovi» , «Canpol babies» с насадкой для чистки носа для уменьшения отечности и нормализации дыхательной функции»

Аспираторы назальные с насадкой для чистки носа и принадлежностями, используются для очищения носовой полости ребенка и/или взрослого

1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Перед первым и каждым последующим применением аспиратор следует разобрать, тщательно промыть и продезинфицировать (подходящим для изделия способом)

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Сжатие груши аспиратора создает небольшое отрицательное давление.

При введении наконечника аспиратора в носовую полость необходимо плавно разжимать грушу.

3. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Срок годности: 5 лет с даты изготовления, смотреть упаковку (при условии хранения изделия в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, температура от +5 до +28 С).

Не кипятить в СВЧ-печи.

Поврежденное изделие следует немедленно выбросить.

Данное изделие использовать только под присмотром взрослых. Мойте изделие перед первым применением и после каждого дальнейшего использования.

Можно безопасно мыть в посудомоечной машине на верхней полке.

