

Кресло-коляска

ПРЕОДОЛЕНИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АКТИВНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ



«Преодоление»



**Многофункциональная
складная кресло-коляска активного типа
для ежедневной эксплуатации
в помещениях и на улице**

Материал рамы: сталь, алюминий, титан.

Опора для ног: цельная с пластиковой или металлической подножкой поднимается в вертикальное положение при складывании рамы.

Тормоза: стояночные.

Развал колёс: 0°; 1,5°; 3°.

Ширина сиденья, мм: 320 – 460

Глубина сиденья, мм: 380 - 450

Высота сиденья, мм: 400 – 530

Высота спинки, мм: 200 – 500

Материалы используемые для комплекта шитья соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006

Примечание: технические характеристики могут меняться при исполнении коляски по индивидуальным параметрам и/или пожеланиям пользователя.

- Самая компактная кресло-коляска со складываемой рамой.
- Уникальное устройство регулировки центра тяжести для достижения совершенного удобства пользователя при эксплуатации.
- Уникальное конструкция, позволяющая изменить ширину сиденья кресла-коляски в рабочем состоянии с шагом 30 мм.
- Уникальное устройство механизма складывания кресла-коляски в сторону уменьшения общей её ширины.
- Патент RU 73784 U1.

3. Устройство и описание кресла-коляски.

3.1. Кресло-коляска состоит из:

- из двух полурам, соединённых между собой с возможностью поперечного перемещения и закрепления конструкции крестовиной механизма складывания и подножкой;
- двух быстросъёмных ведущих колес.

- два передних самоориентирующихся колеса с вилками;
- складывающейся подножки-опоры для ног, регулируемой по высоте;
- устройство регулирования центра тяжести коляски (адаптер) с закреплёнными приемными втулками;
- двух съёмных брызгозащитных щитков с подлокотниками;
- комплекта шитья (сиденье, спинка, ремень для опоры ног);
- тормозных устройств;
- подушки сидения;

3.2. Узел крепления ведущего колеса состоит из быстросъёмной оси и приёмной втулки, которая закреплена двумя гайками в устройстве регулирования центра тяжести коляски (адаптер).

3.3. Центр тяжести коляски по горизонтали или вертикали меняется за счёт изменения расположения приёмной втулки в адаптере.

3.4. Узлы крепления самоориентирующихся колес имеют возможность перемещения по высоте, тем самым изменить угол наклона сиденья и/или высоту коляски.

3.5. Спинка складная регулируется по углу наклона. Спинка закрепляется в рабочем положении двумя вмонтированными подпружиненными замковыми устройствами, соединёнными между собой шнуром.

3.6. Комплект шитья (сиденье, спинка) крепится к раме кресла-коляски ремнями с застёжками и/или винтами. Степень натяжения поверхности спинки и/или её ширина регулируется с помощью ремней с застёжками.

3.7. Подушка сидения крепится с помощью застёжки. типа «липучка».

3.8. Тормозные устройства правое и левое предназначены для удерживания кресла-коляски от самопроизвольного движения.

4. Складывание кресла-коляски для транспортировки и хранения.


4.1. Для транспортировки кресла-коляски её можно сложить тремя способами. Снимите оба ведущих колеса (см. п.4.2), что

значительно облегчит транспортировку и хранение кресла-коляски.

4.2. Для снятия ведущего колеса надо нажать кнопку на б/с оси и потянуть колесо в направлении от рамы коляски, не отпуская кнопку. Для закрепления ведущего колеса необходимо, нажав и удерживая кнопку на б/с оси, вставить ось в приёмную втулку, отпустить кнопку и продолжить движение оси во втулке до полного закрепления.

4.3. Чтобы уложить спинку кресла-коляски на раму, следует, потянув за шнур в направлении от спинки, открыть оба подпружиненных замка удерживающих спинку в рабочем положении.

4.4. Чтобы сложить кресло-коляску с целью уменьшения её общей ширины следует в первую очередь раскрепить механизм складывания (крестовина), соединяющий полурамы кресла-коляски, потянув за кольцо штока подпружиненного замка в направлении вверх от механизма складывания. Затем откиньте подножку вверх, возьмитесь за ткань сиденья с обеих сторон и потяните её вверх.

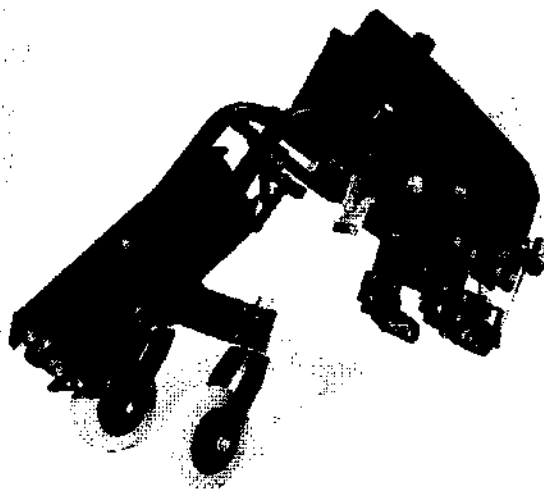

5. Дополнительные возможности.

5.1. Конструкция механизмов складывания кресла-коляски (крестовина и подножка) позволяет изменить ширину

сиденья кресла-коляски в рабочем состоянии. Ширина сиденья может быть 370, 400, 430 мм или 400, 430, 460 мм в зависимости от варианта исполнения кресла-коляски. Чтобы самостоятельно изменить ширину сиденья вам дополнительно понадобится комплект шитья и опорный рычаг подножки на другой размер, которые поставляются отдельно (по желанию заказчика).

6. Меры безопасности.

6.1. После установки ведущих колес убедитесь в том, что без нажатия на кнопку колеса не отсоединятся. В противном случае отрегулируйте быстросъемную ось.

6.2. Перед посадкой в коляску или перед пересаживанием из нее коляску необходимо поставить кресло-коляску на стояночный тормоз.

6.3. Садясь в коляску или пересаживаясь из неё, не наступайте на опору для ног.

6.4. Передвигаясь на подъём (скаты, пандусы), наклоняйте своё туловище вперёд во избежание опрокидывания коляски.

6.5. При перемещении предметов, находящихся вокруг коляски, будьте внимательны, так как в результате смещения центра тяжести возникает опасность опрокидывания коляски.

6.6. Обратите внимание Ваших помощников, что держать коляску следует только за жёсткие элементы рамы, а не за съёмные щитки или колёса.

7. Техническое обслуживание.

7.1. По мере необходимости удаляйте с металлических деталей грязь вначале влажной мягкой тряпкой, затем тщательно протирайте сухой.

7.2. По мере необходимости, проверяйте давление в шинах ведущих колес, работу тормозных устройств. Не реже одного раза в месяц удаляйте загрязнения с быстросъемных осей и вновь смажьте их слоем свежей смазки, например: моторное масло; литол; ЦИАТИМ-201 и т.д.

8. Свидетельство о приемке.

Кресло-коляска «Преодоление» (вариант исполнения):

соответствует технической документации и признана годной к эксплуатации.

М.П.

Подпись

дата выпуска

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Изготовитель гарантирует исправную работу кресла-коляски при условии соблюдения рекомендаций, установленных настоящим руководством по эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня приобретения коляски владельцем.

9.3. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае поломки вследствие дефекта материала или изготовления.

Адрес изготовителя:

ООО БЦАРИ «Преодоление»,
127224, г. Москва, ул. Широкая, д.23, корп. 1.
тел./факс: 8 (495) 476-7943

Электронная почта: info@preodolenie.ru

Сетевое представительство: <http://www.preodolenie.ru>

1. Назначение

Инвалидные кресла-коляски «Преодоление» являются техническими средствами реабилитации, которые компенсируют утраченные функции организма при различных видах ограничения двигательной активности, причинами которых являются: паралич, ампутация, контрактуры суставов, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения вестибулярного аппарата. Разнообразные варианты оснастки кресел-колясок позволяют удовлетворить потребностям большинства пользователей с инвалидностью и предоставляют широкие возможности в области социально-психологической реабилитации и адаптации человека в общество. Кресло-коляски «Преодоление» рекомендуются пользователям любого возраста для эксплуатации, как в помещениях, так и на улице.

2. Технические данные

Вариант исполнения			
Материал рамы	Сталь	Алюминий	Титан
В рабочем состоянии	мм	мм	мм
Длина, мм не более	860-1010	860-1010	860-1010
Ширина, мм не более	520-660	520-660	520-660
Высота, мм не более	680-920	680-920	680-920
Общая масса, кг не более	11,8 - 13,5	10,0 - 11,4	10,5 - 12,0
В сложенном состоянии			
Длина, мм не более	610-800	610-800	610-800
Ширина, мм не более	210-430	210-430	210-430
Высота, мм не более	460 - 620	460 - 620	460 - 620
Масса наиболее тяжёлого элемента (рама в сборе), кг не более	7,0 - 9,5	4,5 - 7,4	5,0 - 8,0

Продукция, кресла-коляски «Преодоление» рассчитаны на массу пользователя до 120 кг и с повышенной грузоподъемностью до 150 кг.

Масса изделия в рабочем состоянии варьируется в зависимости от комплектации и размера коляски.

Гарантийный талон

на ремонт кресла-коляски «Преодоление».

Номенклатура изделия: _____

Дата продажи и адрес владельца: _____

Изготовитель – ООО БЦАРИ «Преодоление»

Выполнены работы по устранению неисправностей:

Сдал _____

Принял _____