

Стол процедурный
косметологический Afrodite с принадлежностями



Производитель: Rainer Rajala Oy (Финляндия)



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ.....3

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....3

3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ3

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....3

4.1 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ3

4.2 РЕГУЛИРОВКА ГОЛОВНОЙ СЕКЦИИ4

4.3 РЕГУЛИРОВКА СПИННОЙ СЕКЦИИ4

4.4 РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ4

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ5

6. ГАРАНТИЯ5

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ5

Lojer /Rainer Rajala Oy



16320 Pennala

Puh. 010 830 6780

Telefax 010 830 6779

Sähköposti: myynti@lojer.com

www.rainerrajala.fi

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования стола убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Косметологические педикюрные столы AFRODITE предназначены для использования в кабинетах косметологических центров для проведения различных процедур, в том числе для педикюра. Столы предназначены для использования в нормальном, сухом помещении при температуре от +10 до +40°C. Питание 230 В, 50 Гц. Разрешенная температура хранения -5 - +60 °C, влажность 30-75 %.

Косметологические педикюрные столы AFRODITE соответствуют директивам 93/42/ЕЕС (медицинские изделия), всем соответствующим изменениям и всем национальным актам. При производстве и разработке столов AFRODITE были применены следующие стандарты: SFS-EN 349 и SFS-EN 60601, а техническое применение стола основано на стандарте Евросоюза EN 1970:2000.

3. ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

Afrodite 3М- двухмоторный стол, электрический привод высоты, спинной секции и сиденья, регулировка головной и ножных секций газовыми пружинами, механическая регулировка опоры для ступней и опор для рук.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Регулировка высоты

Все столы Afrodite регулируются по высоте при помощи электромотора.

Стол Afrodite регулируется по высоте посредством нажатия на педаль электропривода (рис 1). Нажатие на левую сторону педали опускает стол, нажатие на правую сторону поднимает стол. Подняв или опустив стол на необходимую высоту, отпустите педаль. Максимальная нагрузка на стол- 200 Кг.



Рис 1. Педаль электропривода

	Следите, чтобы при регулировке высоты под столом не располагались посторонние предметы, а также части тела пациента или врача, во избежание компрессии.

4.2 Регулировка головной секции

Стол Afrodite Afrodite имеет регулируемую головную секцию с вырезом для лица. Регулировка головной секции проводится посредством нажатия рычага газовой пружины, расположенного под ней. Нажмите на рычаг, одновременно нажмите на головную секцию, придайте ей необходимый угол и отпустите рычаг.

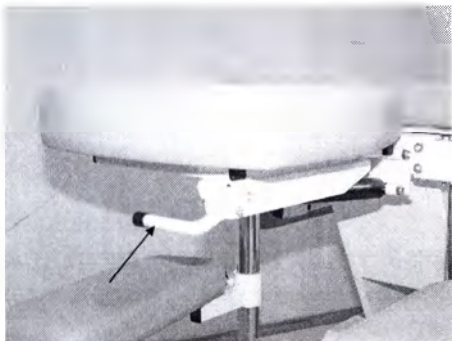


Рис 2. Рычаг регулировки головной секции

4.3 Регулировка спинной секции

Стол Afrodite имеет регулируемую спинную секцию, которая бесступенчато приводится из вертикального в горизонтальное положение. Спинная секция Afrodite приводится посредством электромомтора. Кнопка электропривода расположена под спинной секцией. Нажмите кнопку электропривода, опустите секцию на необходимую высоту, отпустите кнопку.

4.4 Регулировка сиденья

Стол Afrodite имеет также электропривод регулировки угла наклона сиденья. Кнопка электропривода расположена под сиденьем. Нажмите на кнопку, поднимите сиденье на необходимый угол, отпустите кнопку.

4.5. Регулировка ножной секции

Стол Afrodite имеет отдельные ножные секции или цельную ножную секцию. Регулировка ножной секции проводится посредством газовой пружины. Рычаг регулировки расположен под секцией. Нажмите на рычаг, одновременно поднимайте или опускайте секцию, приведите ее в необходимое вам положение, отпустите рычаг.

4.6. Опоры для ступней

Стол Afrodite имеет выдвижные опоры для ступней, регулируемые механически. Возьмитесь за поперечину, ослабьте механизм фиксации опоры, потяните опору на себя, приведите ее в необходимое вам положение, зафиксируйте механизм.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку стола производить посредством влажной тряпки и любого универсального чистящего средства. Металлические части и кожзаменитель, из которого произведен стол, стойки ко всем широко применимым чистящим средствам.



ВНИМАНИЕ! Всегда перед чисткой стола отключайте его от сети электропитания.
ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается мыть стол при помощи душа.

6. ГАРАНТИЯ


Гарантия на мотор составляет 3 (три) года с момента продажи. Гарантийный срок на металлические части стола составляет 10 лет. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные неверным использованием функций стола, и повреждения, вызванные проведением ремонта и обслуживания несертифицированным персоналом. В случае гарантийного случая, обращайтесь к Продавцу или напрямую на завод изготовитель.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание	230 V~	50 Hz
Потребляемая мощность	510 W	
Длина	195 см.	
Вес	60-75 кг.	в зависимости от модели
Максимальная нагрузка:	на ложе	200 кг.
	На головную секцию	10 кг.
	На опоры для рук	5 кг.
	На опоры для ног	50 кг.
Диапазон регулировки высоты		50-85 см.

56

Электродиаграмма мотора Hanning motor KL 88

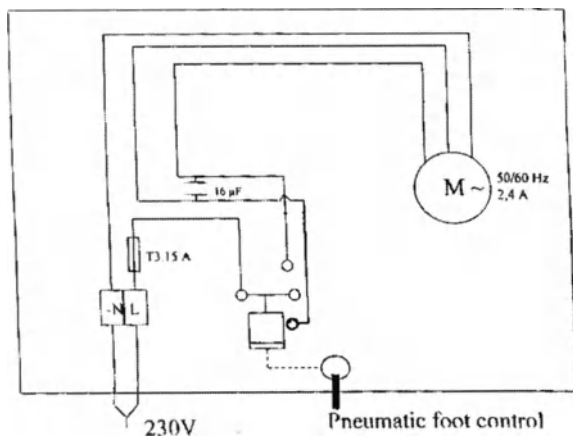

ген. директор
Зубарев Д.А.



Насч