


Стол массажный Delta

Инструкция по эксплуатации

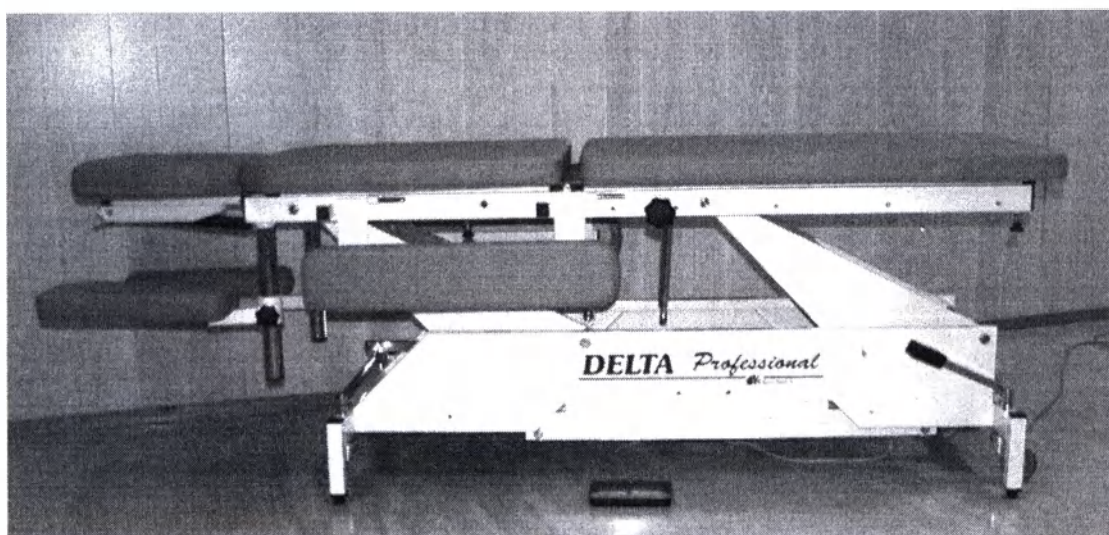

Производитель: Rainer Rajala Oy



Содержание

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ	2
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	3
3. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ.....	3
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	3
4.1 КОЛЕСА	3
4.2 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ	4
4.3 ГОЛОВНАЯ СЕКЦИЯ.....	4
4.4 РЕГУЛИРОВКА НОЖНОЙ СЕКЦИИ.....	5
4.5 РЕГУЛИРОВКА СРЕДНЕЙ СЕКЦИИ.....	5
4.6 ОПОРЫ ДЛЯ РУК	6
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
6. ГАРАНТИЯ	7
7. ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8

Lojer / Rainer Rajala Oy

6320 Pennala

Phone +358 10 830 6780

Fax +358 10 830 6779

E-mail: myynti@lojer.com

www.rainerrajala.fi

1. Проверка оборудования

82

Перед началом использования, удостоверьтесь, что упаковка не повреждена. Удалите упаковку, проверьте внешнее состояние оборудования.

Проверьте комплектность оборудования. В случае обнаружения дефектов или отсутствия принадлежностей, указанных в спецификации незамедлительно обратитесь к Поставщику.

2. Перед началом использования

Столы Delta предназначены для использования в нормальных, сухих помещениях, температура в которых составляет от +10 град. Доля + 60 град по шкале Цельсия и при относительной влажности воздуха 30....60 %.

Когда секция для головы находится в горизонтальном положении, с передней и задней части стола должно оставаться свободное пространство, приблизительно 40 см с каждой стороны.

Перед тем, как начать использовать данное оборудование, убедитесь, что упаковочный материал полностью снят.

Столы работают подключаются к сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц.

3. Наименование и описание модели

4. Эксплуатация

4.1 Колеса

Столы Delta имеют колеса для перемещения стола, которые могут быть заблокированы для придания столу устойчивого положения. Блокировка колес проводится при помощи нажатия педали, расположенной на станине стола в ножной части. Нажатие педали в максимально низкое положение поднимает колеса вверх и позволяет стол перемещать. Поднятие педали вверх опускает колеса вниз и придает столу устойчивое положение для проведения процедуры (Рис 1). Функция перемещения стола необходима для транспортировки самого стола. Запрещается транспортировать стол с находящимся на нем пациентом.

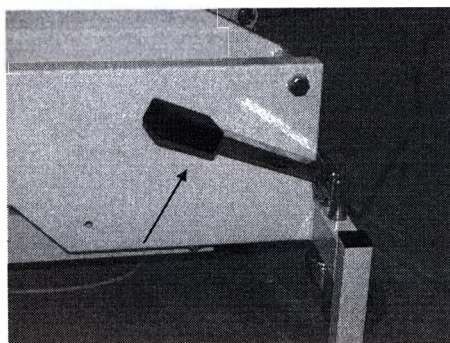


Рис. 1. Педаль регулировки колес

4.2 Регулировка высоты

Столы Delta регулируются при помощи пневмоэлектрического привода, посредством педали, расположенной на полу (Рис. 2). Поднятие и опускание стола проводится посредством нажатия левую или правую сторону педали. Удостоверьтесь, что кабель, ведущий от педали к контрольному блоку не перекручен или зажат. Максимальная нагрузка на стол- 200 кг.



Рис. 2. Педаль регулировки высоты



Важно! Удостоверьтесь, что под секцией стола не расположены какие-либо предметы или части тела пациента или врача во избежание компрессионной травмы.

4.3 Головная секция

Все столы Delta оборудованы головной секцией, регулировка которой осуществляется при помощи газовой пружины, расположенной под ней.

Регулировка головной секции вверх проводится при помощи нажатия рычага управления и удерживания его в течение проведения регулировки (рис 3.)

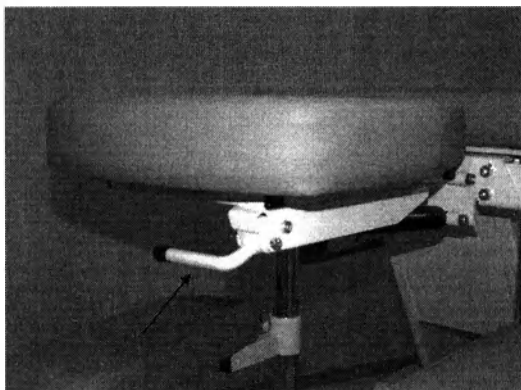


Рис. 3. Рычаг регулировки угла головной секции



Важно! Головная секция предназначена только для расположения на ней головы пациента. Запрещается садиться на головную секцию или использовать ее в качестве упора.

4.4 Регулировка ножной секции

Угол ножной секции регулируется механически, либо при помощи газовой пружины или электрически. При подъеме ножной секции необходимо заблокировать среднюю секцию. Опускание ножной секции проводится одновременно с разблокированием средней секции.

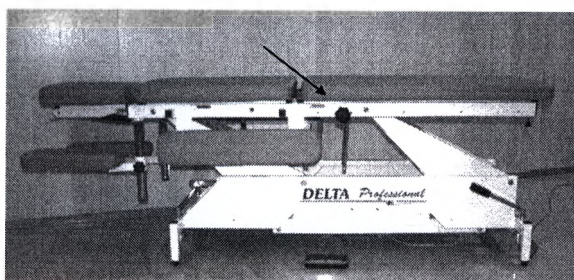


Рис. 4. Рычаг регулировки ножной секции



Важно! Удостоверьтесь, что под ножной секцией стола не расположены какие-либо предметы или части тела пациента или врача во избежание компрессионной травмы.

4.5 Регулировка средней секции

Регулировка средней секции проводится механически или электрически. Нажатие ручки расположенной на каркасе стола под средней секцией поднимает угол расположения средней секции. Установите секцию под нужным углом. Внимание! Данная манипуляция проводится без присутствия пациента на столе.

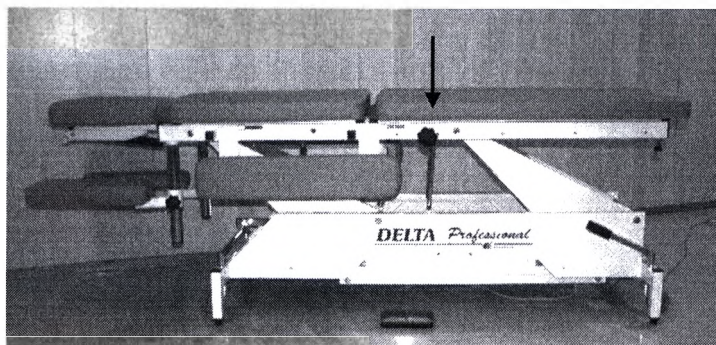


Рис. 6. Регулировка средней секции



Важно! Удостоверьтесь, что под ножной секцией стола не расположены какие-либо предметы или части тела пациента или врача во избежание компрессионной травмы.

4.6 Опоры для рук

Опоры для рук регулируются по высоте механически.

Освободите механизм крепления опоры для руки (A), отрегулируйте высоту опоры. Установите опору в необходимое положение и закрепите механизм

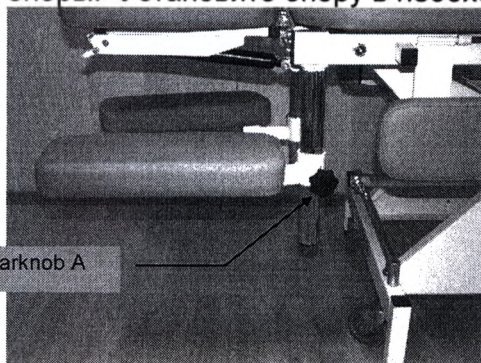


Рис 7. Регулировка опор для рук



Важно! Опоры для рук предназначены только для расположения на ней рук пациента. Запрещается садиться на опоры для рук или использовать их в качестве упора.

4.7. Боковые панели

Стол Delta имеет боковые опоры, предназначены для увеличения ширины стола и расположения на них рук пациента.

Поднимите панель в горизонтальное положение и направьте ее по направлению к головной секции. Таким образом вы автоматически ее заблокируете. Для привода в вертикальное (нерабочее) положение, направьте панель вправо к ножной секции и опустите вниз (Рис 8).

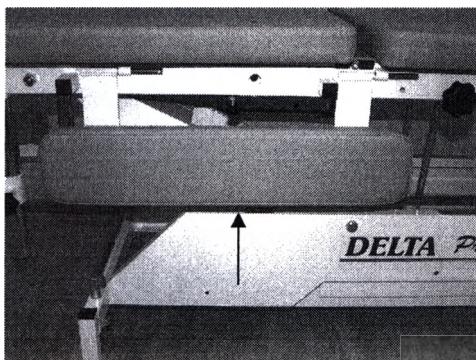


Рис. 8. Использование боковых панелей



Важно! Боковые панели предназначены только для расположения на ней рук пациента. Запрещается садиться на панели или использовать их в качестве упора.

Обслуживание

Если при регулировке высоты стол производит неприятный шум, рекомендуется смазать все соединения маслом (машинным, например).

Колеса следует смазывать вазелином один раз в полгода. Это значительно увеличит срок их службы.

Обработка кожезаменителя проводится посредством мыльного раствора. Станина стола обрабатывается любым дезсредством.



Важно! Не рекомендуется класть на стол разогревающие пакеты, так как они могут повредить поверхность стола. Используйте изолирующий материал между столом и пакетом.

Гарантия

Гарантия на механические части составляет 10 (десять) лет и 3 (три) года на мотор (10).

Гарантия не распространяется на

- Повреждения вызванные неправильным использованием
- Использование несоответствующих чистящих средств.
- Повреждения, вызванные ремонтом третьей стороны

В случае дефекта товара, вызванного неправильной транспортировкой незамедлительно оповестите об этом транспортную компанию.

- В случае обнаружения заводских дефектов обращайтесь к дистрибьютору продукции Rainer Rajala Oy или напрямую в компанию.

1. Характеристики

Напряжение	230 V~	50 Hz
Потребляемая мощность	510 W	
Уровень защиты	IP55	
Длина	195 см.	
Вес	60-75 кг.	
Нагрузка:	на стол	200 кг., из которых:
	на головную секцию	10 кг.
	на опору для руки	5 кг.
	на ножную секцию	50 кг.
Диапазон регулировки высоты	45-95 см.	

Стол Delta соответствует регламенту директивы Евросоюза 93/42/EEC (для медицинского оборудования).

При производстве стола были применены следующие стандарты: SFS-EN 292-2, SFS-EN 349 and SFS-EN 60601-1.

Диаграмма мотора Hanning KL 88

