

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "АПТОС"

 Г.М. Суламанидзе

" 30 " июня 2016 г.

Инструкция по применению медицинского изделия

**Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической
хирургии и косметологии стерильные**

Наименование медицинского изделия:

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии стерильные, в исполнениях:

1. Нить **Aptos Needle 2G** полипропиленовая, с насечками, MP 3, с двумя иглами атравматическими обоюдоострыми GS 100 – 2 шт.
2. Нить **Aptos Needle 2G Soft** полипропиленовая, с насечками, MP 3, с двумя иглами трубчатыми 0,8 мм x 65 мм (21G x 65 мм) – 2 шт.
3. Нить **Aptos Needle 2/0** полипропиленовая, MP 3, с иглой атравматической обоюдоострой GRT 150 – 2 шт.
4. Нить **Aptos Needle 3/0** полипропиленовая, MP 2, с иглой атравматической обоюдоострой GRT 85 – 1 шт.
5. Нить **Aptos Needle 4/0** полипропиленовая, MP 1.5, с иглой атравматической DRT 50 – 1 шт.
6. Нить **Aptos Needle DRN 60** полипропиленовая, MP 3.5, с иглой атравматической DRN 60 – 1 шт.
7. Нить **Aptos Suture** полипропиленовая, с насечками, MP 3, с иглой атравматической HR 30 – 1 шт.
8. Нить **Aptos Thread 2G** полипропиленовая, с насечками, MP 3, с двумя иглами атравматическими GS 110 – 2 шт.
9. Нить **Aptos Thread 2G Soft** полипропиленовая, с насечками, MP 3, с двумя иглами трубчатыми 0,80 мм x 100 мм (21G x 100 мм) – 2 шт.
10. Нить **Aptos Spring** полипропиленовая, спиралевидная, MP 3, с иглой инъекционной 0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт., с иглой инъекционной 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт.
11. Нить **Aptos Spring Soft** полипропиленовая, спиралевидная, MP 3, с канюлей 0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт., с канюлей 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт.
12. Нить **Aptos Thread 4** полипропиленовая, с насечками, MP 3 – 4 шт., игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 1 шт.
13. Нить **Aptos Thread 6** полипропиленовая с насечками, MP 3 – 6 шт., игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 1 шт.
14. Нить **Aptos Wire 2/0** стальная крученая MP 3, с иглой атравматической GRT 85 – 1 шт.
15. Нить **Aptos Wire 3/0** стальная крученая MP 2, с иглой атравматической GRT 85 – 1 шт.

Далее по тексту – изделия.

Область применения

Изделия предназначены для применения в пластической и эстетической хирургии, а также в косметологии.

Изделия предназначены для применения в специализированных медицинских учреждениях.

Показания для применения медицинского изделия

- легкие и умеренные признаки дряблости кожи в области лица и шеи, птоза мягких тканей (без выраженного избытка кожи);
- птоз всей брови или только ее латеральной трети;
- избыточные мягкие ткани щечно-скуловых областей;
- носогубные складки, «морщины марионетки», обусловленные/усугубленные нависанием мягких тканей;
- деформация овала лица, ментальных областей, «второй подбородок» (при выраженной гипертрофии жировой клетчатки необходимо на первом этапе использовать методы локальной редукции жировой ткани);

- возрастные изменения шеи, развивающиеся на фоне атрофических процессов в коже;
- атрофические изменения и неровный рельеф кожи и подкожных тканей;
- асимметрия лица.

Противопоказания

- аутоиммунные заболевания;
- тяжелые соматические заболевания;
- заболевания крови;
- коллагенозы;
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия II и III степеней;
- психические и невротические нарушения;
- воспалительные явления и опухолевые заболевания в области проведения процедуры;
- склонность к формированию келоидных и гипертрофических рубцов;
- заболевания крови (гемофилия), прием антикоагулянтов, антиагрегантов, НПВС;
- обострение любых хронических заболеваний;
- беременность, лактация;
- ранее имплантируемые небиодеградирующие инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры;
- индивидуальная непереносимость используемых препаратов;
- период менструации (первая неделя цикла);
- заболевания кожи в области проведения процедуры;
- любые другие противопоказания по решению лечащего врача пациента.

Способ применения

ВНИМАНИЕ!!! Использование изделий на практике разрешается только врачам, прошедшим обучение у разработчиков.

1. Визуально проверить целостность упаковки, срок годности и дату стерилизации.
 2. Вскрыть наружный пакет, потянув края пакета в разные стороны или разрезав ножницами. Достать стерильный внутренний пакет (при его наличии).
 3. Вскрыть внутренний пакет непосредственно перед использованием, разорвав его по надрезу или разрезав ножницами.
 4. Извлечь стерильным инструментом носитель с изделием.
 5. Иглодержателем извлечь изделие, не допуская его контакта с нестерильной поверхностью или с уже использованными изделиями.
- Изделие готово к применению.

ИЗДЕЛИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ, УКАЗАННЫЕ В ПОСОБИЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛИСТАМ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ У РАЗРАБОТЧИКОВ.

Удаление установленных нитей: через прокол в подкожную клетчатку вводят скорняжный крючок, которой подцепляют нить и выводят ее на поверхность. После этого нить можно удалить частично или полностью. После удаления нити место прокола заклеивают стерильной наклейкой.

ПРОЦЕСС ВВЕДЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ПОДРОБНО ОПИСАН В МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЯХ, ВЫДАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАМ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ У РАЗРАБОТЧИКОВ.

Предостережение: при использовании изделия следует избегать повреждения нити хирургическими инструментами (иглодержателями, хирургическими щипцами и т.д.), так как это может привести к последующему разрыву нити.

Побочные реакции

Может вызвать небольшое раздражение на месте раны, сохраняющееся в течение нескольких дней, временную воспалительную реакцию на чужеродное тело с образованием припухлости, уплотнением кожи и возможным покраснением в области проведения процедуры в течение 24-72 часов, сопровождающееся образованием фиброзной ткани вокруг нити, аллергическую реакцию у некоторых пациентов, временное местное раздражение и покраснение в процессе рассасывания подкожных швов.

Запрещается применять изделия в следующих случаях:

- повреждена или открыта индивидуальная упаковка;
- обнаружено повреждение изделия;
- изделие применяется неквалифицированным персоналом;
- изделие имело контакт с нестерильной поверхностью;
- изделие уже использовалось (повторное использование);
- изделие применяется вне зоны стерильного операционного блока;
- изделие применяется после истечения срока годности;
- изделие стерилизовано повторно.

Взаимодействия с другими медицинскими изделиями

Не выявлено

Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания

Изделия противопоказаны при беременности, в период лактации

Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет

Метод стерилизации Газовый (EO).

Изделия не подлежат повторной стерилизации!

Срок годности

Гарантийный срок годности – 5 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Не использовать после срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения и транспортирования

Изделия хранят в закрытых оглаживаемых помещениях по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69, но при температурах от плюс 10°C до плюс 25°C на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов, без воздействия солнечных лучей. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей не допускается. Хранить в местах, недоступных для детей.

Изделия в транспортной таре транспортируют всеми видами крытых транспортных средств по правилам перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта, по условиям хранения 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150-69.

Утилизация и уничтожение

Повреждённые и использованные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Специальные меры предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Технические характеристики

Изделия представляют собой нити нерассасывающиеся полипропиленовые мононити и крученые металлические нити. Для улучшения видимости в операционном поле полипропиленовые нити окрашены в голубой цвет - не раздражающим красителем, разрешённым к использованию в медицинских изделиях. Стальные нити – неокрашенные. Поверхность нитей – гидрофобная и гладкая или с мелкими микровыступами.

Нити прикреплены к иглам с помощью особого термопроцесса. Это уникальное решение обеспечивает более лёгкое введение иглы в ткани, после чего на поверхности кожи не остаются какие-либо следы повреждения. Нить биологически инертна. Не реагирует на ферментативное расщепление. Нити остаются надёжно закрепленными и заставляют ткани лица подтягиваться и поддерживают их в этом состоянии продолжительный период времени.

Изделия поставляются стерильными—в виде нитей в отрезках как отдельно, так и в комбинации с одной или несколькими иглами атравматическими. Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине, различной степени изогнутости, различной длины, с различным профилем сечения тела иглы и заточкой острия.

Стерилизационная упаковка состоит из одного пакета, изготовленного из бумаги упаковочной для медицинских изделий. Одна сторона пакета выполнена из бумаги ламинированной, вторая – из прозрачного плёночного материала. Каждый пакет стерилизационной упаковки герметично термосклеен. Перед упаковыванием в стерилизационную упаковку изделия помещены в картонный конверт из белой крафт-бумаги с барьерным слоем из полиэтиленовой пленки. Все изделия, кроме Aptos Spring и Aptos Spring Soft, находящиеся в защитных колпачках, закреплены в полосках из пенопласта на картонном конверте.

Условные обозначения, применяемые на этикетке:

	- номер партии
	- дата стерилизации
	- дата окончания срока годности
	- изделие не подлежит повторной стерилизации и повторному использованию
	- не стерилизовать повторно
	- перед применением ознакомиться с инструкцией
	- способ стерилизации – газовый (EO)
	- беречь от солнечного света
	- беречь от влаги

	- Осторожно!
	- температурный диапазон
	- не использовать при поврежденной упаковке

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «АПТОС»
(ООО «АПТОС»), Грузия, 0105, г. Тбилиси ул. Орбелиани дом 20/4
Тел: +995 32 292 03 71, e-mail: info@aptos.ge

Адреса места производства медицинского изделия:

ООО Фойерштайн (Feuerstein GmbH)
ул. Густав-Кроне 3, D-14167 Берлин, Германия (Gustav-Krone-Str. 3, 14167, Berlin, Germany)
Тел. +49/ 30/ 845 885-0, e-mail: info@suprama.com

Представитель на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «АПТОС ГРУПП»
117461, г. Москва, ул. Каховка д. 30 помещение I комната 13
Тел. 8 499 922 06 62, e-mail: secretary@aptos.ru

Теория Сидманидзе

2

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N160716948



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

30.06.2016 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდგომლობის და

ნოტარიუსი

დავით ჩალათაშვილი

სანოტარო ბიუროს მისამართი

თბილისი, მტკვრის ქ #4

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

2952228

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური ნომერი 90587285640416



ოპრიათას თექვსმეტი წლის ოცდაათ ოცნას მე, ნოტარიუს დავით ჩალათაშვილს ჩემს სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, მტკვრის ქ. #4, მომმართა გიორგი სულამბაშიძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ სურს სამედიცინო ნაწარმის გამოყენების შესახებ ინსტრუქციაზე თავისი ხელმოწერის სანოტარო წესით დამოწმება. მე დავადგინე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით და დავადგინე მისი პირადობა მის ნამდვილად გიორგი სულამბაშიძეს (დამ.: 14.08.1979, პირადი#60001002266, პ/მ სერია 11B01958, რეგისტრირებული მისამართი: თბილისი ს. შინდისი ნ. დუმბაძის ქ. N 22) სურს ხელმოწერის დამოწმება. მე შევამოწმე მისი ქმედუნარიანობა და ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მქონდა, ასევე განვუმარტე, რომ წინამდებარე დოკუმენტზე ხელმოწერის დამოწმებისას ნოტარიუსი ამოწმებს, რომ შესრულებული ხელმოწერა ნამდვილად ზემოაღნიშნულ პირს ეკუთვნის. ნოტარიუსი არ ადასტურებს დოკუმენტში მოყვანილი ფაქტების ნამდვილობას და შესაბამისად პასუხს არ ავებს სამართლებრივ შედეგებზე. გიორგი სულამბაშიძემ განაცხადა, რომ იცის რეალური ენა, რომელზედაც შედგენილია წარმოდგენილი სამედიცინო ნაწარმის გამოყენების შესახებ ინსტრუქცია, ასევე გაცნობილია მის შინაარსს და არ საჭიროებს თარგმნას, ამის შემდეგ ჩემი თანდასწრებით პირადად შეასრულა თავისი ხელმოწერა წინამდებარე რუსულენოვან დოკუმენტზე. დოკუმენტი შედგენილია ერთ ემბემულად. გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური 4 ლარი (სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურის; და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საბუთურის ოდენობის, მათი გადახდვების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ ~ 2011 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის #507-ე დადგენილების მუხლი 31.3-ის თანახმად). დღე 0.72 ლარი - თანახმად საქართველოს საგდასახადო კოდექსის 169-ე მუხლისა და რეგისტრაციის განხორციელების 2 ლარი (ამავე დადგენილების მუხლი 39.1-ის თანახმად), სულ გადახდილია 6.72 ლარი.

ნოტარიუსი ----- (დავით ჩალათაშვილი)

სანოტარო მოქმედების და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადასაცემები შეიძლება საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.nota.ge ან/ან შემოძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18



Перевод для справки

Номер регистрации нотариального действия	160716948
Дата регистрации нотариального действия	30.06.2016
Наименование нотариального действия	Заверение подлинности подписи
Нотариус	Давид Чалаташвили Тбилиси, ул.
Адрес нотариального бюро	Мткврис № 4 2952228
Номер телефона нотариального бюро	2952228
Индивидуальный номер нотариального действия	90587285640416

Двадцатого апреля две тысячи шестнадцатого года ко мне нотариусу Чалаташвили Давиду, нотариальное бюро, которого расположено по адресу: г. Тбилиси, ул. Мткврис № 4. обратился гражданин Суламанидзе Георгий, который заявил, что желает нотариально заверить свою подпись на справке ООО «АПТОС» №19/04/16. Я установил его личность, по предоставленным документам и удостоверился, что Суламанидзе Георгий (рожд. 14.08.1979 г., личный № 60001002266, серия 11/B01958, зарегистрированный адрес: г. Тбилиси, с. Шиидиси, ул. И. Думбадзе № 22) действительно желает заверить свою подпись. Я проверил его дееспособность и заверяю, что не имею никаких оснований сомневаться в его дееспособности, кроме этого разъяснил, что при заверении подписи на данном документе, нотариус свидетельствует, что подпись, поставленная на документе, действительно принадлежит вышеуказанному лицу. Нотариус, не заверяет действительность фактов, изложенных в документе и, соответственно, не несет ответственность за правовые последствия. Суламанидзе Георгий заявил, что владеет русским языком, на котором составлена справка ООО «АПТОС» №19/04/16, а также ознакомлен с ее содержанием и не нуждается в переводе, после этого он, в моем присутствии лично совершил подпись на предоставленном русскоязычном документе.

Документ составлен в одном экземпляре. Взыскана нотариальная пошлина за нотариальные услуги согласно пункту 3 статьи 31 постановления № 507 от 29 декабря 2011 года правительства Грузии «Об утверждении размера стоимости, порядка ее уплаты и сроков обслуживания, установленных для нотариальной палаты Грузии и пошлинах за выполнение нотариальных действий» в размере 4 (четыре) лари + НДС 0.72 лари - согласно статье 169 Налогового кодекса Грузии, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 39 вышеуказанного постановления взыскана стоимость регистрации нотариального действия 2.00 лари, всего взыскано 6.72 лари

Нотариус: /подпись/ / Давид Чалаташвили /

Печать: Грузия. Нотариус Давид Чалаташвили 01030037424

Получить или перепроверить информацию о нотариальном действии и нотариальном акте (его создании, изменении и/или аннулировании) вы можете на веб-странице нотариальной палаты Грузии – www.notary.ge или позвонив в нотариальную палату по номеру: +995 (32) 2 66 19 18

Перевод печати

подпись Суламанидзе Георгий (Директор ООО «АПТОС»)

Переводчик: /подпись/ Авчян Рузанна


Нотариус: /подпись/ Чалаташвили Давид

Печать: Грузия. Нотариус Давид Чалаташвили 01030037424

Сшито в 7 (семь) листах подпись

Печать: Грузия. Нотариус Давид Чалаташвили 01030037424

Перевод выполнен переводчиком
Чимпоеш Еленой Анатольевной. *

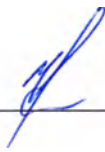

Город Москва.

Седьмого июля две тысячи шестнадцатого года.


Я, Акимов Глеб Борисович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность
подписи, сделанной переводчиком Чимпоеш Еленой Анатольевной в моем присутствии.
Личность её установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 14-12569

Взыскано по тарифу: 100 рублей

Нотариус:

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 8 листа (ов)
Нотариус:

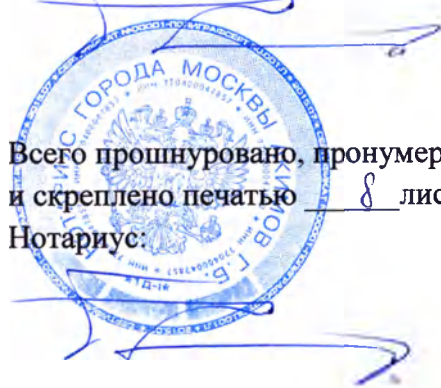

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "АПТОС ГРУПП"

Г.Н. Каджая



2015 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОШЕДШИХ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ ПО
ИМПЛАНТАЦИИ
НИТЕЙ НЕРАССАСЫВАЮЩИХСЯ С ИГЛАМИ И КАНЮЛЯМИ
ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ СТЕРИЛЬНЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение
2. Показания для применения методов.
3. Противопоказания к использованию методов.
4. Рекомендации для пациента.
5. Возможные побочные эффекты и осложнения.
6. Методика удаления установленных нитей.
7. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Thread**» (**Aptos Thread 4; Aptos Thread 6**);
8. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Thread 2G**» (**Aptos Thread 2G Soft**);
9. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Spring**» (**Aptos Spring Soft**);
10. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Needle**»:
 - 10.1. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Needle 2/0**»;
 - 10.2. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Needle 3/0**»;
 - 10.3. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Needle 4/0**»;
11. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Needle 2G**» (**Aptos Needle 2G Soft**);
12. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «**Aptos Wire**» (**Aptos Wire 2/0, Aptos Wire 3/0**).
13. Памятка пациенту.
14. Образец информированного согласия пациента.
15. Схемы разметок АПТОС.

1. Методы АПТОС

Методы АПТОС соединяют в себе достоинства применения методов в пластической хирургии и косметологии – результативность, безопасность, практически мгновенный результат и его предсказуемость.

Малоинвазивные технологии коррекции мягких тканей лица позволяют перемещать мягкие ткани без их мобилизации, уменьшать площадь кожи без ее иссечения, восстанавливать контуры тела. Выраженный эстетический эффект наблюдается в течение 1 – 1,5 лет. Нить не рассасываемая. Возможно извлечение изделий при необходимости после осмотра врача-специалиста.

Процедуры могут проводиться в амбулаторных условиях с использованием местной анестезии, реабилитационный период составляет 10 – 14 дней.

Пользователи: для врачей дерматологов-косметологов, челюстно-лицевых, пластических и эстетических хирургов, прошедшие обучение у разработчиков и их представителей.

Место использования: организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность в области хирургии и косметологии. Процедурный кабинет должен отвечать требованиям СанПин 2.1.3.2630-10 от 18.05.2010 г. № 58, СанПин 2.1.3.1375-03 от 06.06.2003 г. №124.

Разработчик:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПТОС»

Авторы:

к.м.н. Суламанидзе М.А., к.м.н. Суламанидзе Г.М., Суламанидзе К.М.

2. Показания для применения

методики являются:

- в области лица и шеи легкие и умеренные признаки дряблости кожи,птоза мягких тканей (без выраженного избытка кожи);
- птоз всей брови или только ее латеральной трети;
- избыточные мягкие ткани щечно-скуловых областей;
- носогубные складки, «морщины марионетки», обусловленные/усугубленные нависанием мягких тканей;
- деформация овала лица, ментальных областей, «второй подбородок» (при выраженной гипертрофии жировой клетчатки необходимо на первом этапе использовать методы локальной редукции жировой ткани);
- возрастные изменения шеи, развивающиеся на фоне атрофических процессов в коже;
- атрофические изменения и неровный рельеф кожи и подкожных тканей;
- асимметрия лица

3. Противопоказания к использованию методики:

- аутоиммунные заболевания;
- тяжелые соматические заболевания;
- заболевания крови;
- коллагенозы;
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия II и III степеней;
- психические и невротические нарушения;
- воспалительные явления и опухолевые заболевания в области проведения процедуры;
- склонность к формированию келоидных и гипертрофических рубцов;
- заболевания крови (гемофилия), прием антикоагулянтов, антиагрегантов, НПВС;
- обострение любых хронических заболеваний;
- беременность, лактация;
- ранее имплантируемые небиodeградирующие инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры;
- индивидуальная непереносимость используемых препаратов;
- месячные (1 неделя цикла);
- заболевания кожи в области проведения процедуры;
- любые другие противопоказания по решению лечащего врача пациента.

4. Рекомендации для пациента:

1. В течение 48 часов после проведения процедуры прикладывать холод к области коррекции 3–4 раза в день по 15 минут.
2. При сохранении болевых ощущений возможно применение анальгетиков в соответствии с инструкцией («Нимесил», «Кетонал» и др.)
3. Для ускорения процессов реабилитации рекомендуют препараты и процедуры, стимулирующие лимфоотток и снижающие отек («Траумель», «Лимфомиозот», плазмолифтинг, микротоковая терапия и т. д.).
4. По необходимости с профилактической целью возможно назначение антибактериальных препаратов широкого спектра действия.

Также рекомендуется:

- в течение 2 недель ограничить активность мимики;
- отказаться от алкоголя на 2 недели;
- воздержаться от массажа и физиотерапии, загара на 2 месяца;
- воздержаться от занятий фитнесом, тепловых процедур (в том числе, от посещения бани, сауны и бассейна) на 1 месяц;
- отказаться от процедур миостимуляции в зоне вмешательства на 2 месяца;
- желательно отказаться от перелетов в течение 5-7 дней после процедуры;
- в течении первых суток не прикасаться к местам имплантации нитей;
- в течение 3 дней обрабатывать места проколов кожи антисептиками;
- запрещено массировать и пытаться самостоятельно расправить места имплантации нитей;
- контрольные осмотры на 7 и 14-й день, 3, 6 и 12 месяцев после процедуры.

5. Возможные побочные эффекты и осложнения

Сразу после процедуры возможны следующие явления:

- временная асимметрия – часто;
- отечность – часто;
- болевые ощущения и чувство стянутости – относительно часто;
- временное отсутствие или снижение чувствительности в зоне вмешательства – очень часто;
- синяки, гематомы – редко;
- временное нарушение мимики – иногда.

Осложнения после процедур нитевого лифтинга достаточно редки. При появлении признаков воспаления (гипертермия выше 37,5°; пульсирующие боли и локальная гиперемия в области вмешательства; выраженная

асимметрия; нарастание отека) пациенту необходимо немедленно обратиться к лечащему врачу, в некоторых ситуациях может потребоваться дополнительная консультация хирурга. Из отсроченных осложнений крайне редко встречаются стойкая асимметрия, втяжения, контурирование нитей, повреждение сосудов и нервов и др.

6. Методика удаления установленных нитей

Для удаления нити необходимы следующие инструменты, препараты и расходные материалы:

- анестетик с содержанием адреналина («Ультракаин ДС», и др.)
- шприц 5 мл
- игла инъекционная 27G
- зажим типа «москит»
- ножницы Купера
- крючок скорняжный толщиной 1-1,5мм
- игла инъекционная 18G (или скальпель №11)

Предварительно в вертикальном положении необходимо нанести разметку точки прокола кожи. Прокол должен выполняться над предполагаемым местом расположения нити в подкожной жировой клетчатке. После местной анестезии выполняют прокол кожи иглой 18G или скальпелем №11 длиной до 1мм. Через прокол в подкожную клетчатку вводят скорняжную иглу, которой подцепляют нить и выводят ее на поверхность. После этого нить можно резецировать или полностью удалить. При невозможности извлечь нить с помощью крючка разрез можно расширить до 2мм и вытащить нить, воспользовавшись зажимом типа «москит».

После удаления нити место прокола заклеивают стерильной наклейкой.

Сопутствующее оборудование:

- операционный стол/косметологическая кушетка;
- стерильный столик.

7. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии

«Aptos Thread» (Aptos Thread 4; Aptos Thread 6)

Инструментарий:

- упаковка продукта – **Aptos Thread 4; Aptos Thread 6 в наборах:**
- Нить Aptos Thread 4 полипропиленовая, с насечками, МР 3 – 4 шт., игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 1 шт.
- Нить Aptos Thread 6 полипропиленовая с насечками, МР 3 – 6 шт., игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 1 шт.
- одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- пинцет анатомический;
- ножницы Купера или Метценбаума;
- цапки – 2 шт.;
- шприц 5 мл или карпульный шприц;
- стерильные перчатки;
- стерильный перевязочный материал (две простыни 70x80 или 1x1 м, сухие салфетки 16x14 - 20 шт., наклейки «Omnistrip», «Steri-Strips»);
- чашка для антисептического раствора объемом 50 мл;
- антисептический раствор для обработки зоны вмешательства («Бетадин», «Йодопирон», «Октенисепт»).
- антисептический раствор для обработки рук врача (напр. мыло «Бактолин», раствор «Стерилиум»).
- анестетик: раствор Ультракаин ДС или ДС Форте в ампулах или карпулах, раствор лидокаина 1 % с адреналином гидрохлоридом в соотношении 1:100000;
- гелевый холодный компресс.

Предварительный (предоперационный) этап:

1. Предварительной подготовки к процедуре не требуется.
2. Пациенту необходимо отказаться от приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за неделю до процедуры.
3. Перед процедурой собирают анамнез (обращая внимание на ранее проведенные процедуры в зоне вмешательства), выявляют показания и исключают возможные противопоказания, выясняют пожелания пациента. Пациенту объясняют суть метода, ожидаемые эффекты и обсуждают осложнения, которые могут возникнуть после имплантации нитей.
4. Пациент подписывает информированное согласие (Приложение №2).

5. Выполняют фотографирование пациента в пяти стандартных проекциях.

Этапы проведения процедуры:

1. Пациента переодевают в одноразовый халат, шапочку, выполняют тщательный демакияж.
2. В положении стоя выполняют разметку выбранной зоны. Красным маркером отмечают место начального прокола, линии проведения нитей и конечные точки, после чего пациента снова фотографируют.
3. Кожу пациента трижды обрабатывают раствором антисептика.
4. Выполняют местную анестезию с экспозицией не менее 2-3 минут.
5. Выполняют имплантацию нитей согласно нанесенной разметке.
6. По окончании процедуры предварительно оценивают симметричность результата, выполняют обработку кожи раствором антисептика и заклеивают места вкола и выкола наклейками.

Описание методики/технологии.

1. Расположить пациента в положении, удобном для специалиста так, чтобы голова пациента была немного приподнята и находилась на уровне локтевых суставов.
2. Провести предварительную разметку маркером. Необходимо использовать схемы разметок, рекомендованные компанией АПТОС, учитывая индивидуальные особенности кожи и рельефа тканей (Приложение №3).
3. Обработать руки: три раза вымыть руки антибактериальным мылом («Бактолин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфеткой или полотенцем по направлению от кисти к локтю, три раза руки антибактериальным средством (раствор «Стериллиум» или др.) – до локтя, до середины предплечья, только кисти. Надеть стерильные перчатки.
4. Провести антисептическую обработку кожи пациента, трижды тщательно обработав зону вмешательства с дополнительной обработкой близких к этой зоне участков в радиусе не менее 5 см. Обработать по направлению от центра к периферии, захватывая шею и область декольте, ушные раковины, кожу волосистой части головы. Хорошо просушить кожу стерильной салфеткой.

5. Накрыть операционное поле, соединив стерильные салфетки между собой цапками. Не допускать контакта между стерильным и нестерильным материалом до окончания процедуры.
6. Подготовить Aptos Thread. Перед установкой, необходимо ввести нить в просвет иглы-проводника, при этом, следует обращать внимание на то, чтобы не разрушить насечки, расположенные по всей длине нити.
7. По намеченным линиям провести иглу-проводник в подкожной жировой клетчатке, не касаясь более глубоких структур и не проводя слишком поверхностно в прямом контакте с дермой (иначе появятся стяжения). Довести до крайней дистальной точки разметки, сделать выкол, после чего в просвет иглы-проводника ввести нить.
8. Натянуть ткани вверх, по вектору нити, в таком положении придержать их левой рукой или придать объем при необходимости, формируя руками ту форму тканей, которую врач хотел бы сохранить. В этот же момент следует удалить иглу-проводник из первоначальной точки вкола. Необходимо следить, чтобы нить равномерно оставалась подкожно на всем протяжении линии маркировки. Подтянуть нить и обрезать ее конец так, чтобы установленная нить скрылась подкожно.
9. Глубину установки нити можно контролировать пальпаторно только во время введения проводника. При проведении нити по намеченному контуру ткани по необходимости перемещают относительно проводника, меняя таким образом траекторию проведения нити.
10. Установить таким образом все нити Aptos Thread из упаковки по линиям нанесенной маркировки.
11. После установки нитей обработать зону вмешательства раствором антисептика, заклеить проколы стерильными наклейками («Omnistrip»).
12. Умеренные асимметрия, стяжения, сбористость кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и окончательно проходят в среднем через 7-10 дней.

13. По завершении процедуры приложить к области имплантации нитей холодный компресс (15 минут).

8. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Thread 2G» (Aptos Thread 2G Soft)

Инструментарий:

- упаковка продукта – Нить Aptos Thread 2G полипропиленовая, с насечками, МР 3, с двумя иглами атравматическими GS 110 – 2 шт.

Нить Aptos Thread 2G Soft полипропиленовая, с насечками, МР 3, с двумя иглами трубчатыми 0,80 мм x 100 мм (21G x 100 мм) – 2 шт.

- одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- пинцет анатомический;
- ножницы Купера или Метценбаума;
- цапки – 2 шт.;
- шприц 5 мл или карпульный шприц;
- стерильные перчатки;
- стерильный перевязочный материал (две простыни 70x80 или 1x1 м, сухие салфетки 16x14 - 20 шт., наклейки «Omnistrip», «Steri-Strips»);
- чашка для антисептического раствора объемом 50 мл;
- антисептический раствор для обработки зоны вмешательства («Бетадин», «Йодопирон», «Октенисепт»);
- антисептический раствор для обработки рук врача (напр. мыло «Бактолин», раствор «Стерилиум»);
- анестетик: раствор Ультракаин ДС или ДС Форте в ампулах или карпулах, раствор лидокаина 1 % с адреналином гидрохлоридом в соотношении 1:100000;
- гелевый холодный компресс.

Предварительный (предоперационный) этап:

1. Предварительной подготовки к процедуре не требуется.

2. Пациенту необходимо отказаться от приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за неделю до процедуры.
3. Перед процедурой собирают анамнез (обращая внимание на ранее проведенные процедуры в зоне вмешательства), выявляют показания и исключают возможные противопоказания, выясняют пожелания пациента. Пациенту объясняют суть метода, ожидаемые эффекты и обсуждают осложнения, которые могут возникнуть после имплантации нитей.
4. Пациент подписывает информированное согласие (Приложение №2).
5. Выполняют фотографирование пациента в пяти стандартных проекциях.

Этапы проведения процедуры:

1. Пациента переодевают в одноразовый халат, шапочку, выполняют тщательный демакияж.
2. В положении стоя выполняют разметку выбранной зоны. Красным маркером отмечают место начального прокола, линии проведения нитей и конечные точки, после чего пациента снова фотографируют.
3. Кожу пациента трижды обрабатывают раствором антисептика.
4. Выполняют местную анестезию с экспозицией не менее 2-3 минут.
5. Выполняют имплантацию нитей согласно нанесенной разметке.
6. По окончании процедуры предварительно оценивают симметричность результата, выполняют обработку кожи раствором антисептика и заклеивают места вкола и выкола наклейками.

Описание методики/технологии.

1. Расположить пациента в положении, удобном для специалиста так, чтобы голова пациента была немного приподнята и находилась на уровне локтевых суставов.
2. Провести предварительную разметку маркером. Необходимо использовать схемы разметок, рекомендованные компанией АПТОС, учитывая индивидуальные особенности кожи и рельефа тканей (Приложение №3).

3. Обработать руки: три раза вымыть руки антибактериальным мылом («Бактолин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфеткой или полотенцем по направлению от кисти к локтю, три раза руки антибактериальным средством (раствор «Стерилиум» или др.) – до локтя, до до середины предплечья, только кисти. Надеть стерильные перчатки.
4. Провести антисептическую обработку кожи пациента, трижды тщательно обработав зону вмешательства с дополнительной обработкой близких к этой зоне участков в радиусе не менее 5 см. Обработать по направлению от центра к периферии, захватывая шею и область декольте, ушные раковины, кожу волосистой части головы. Хорошо просушить кожу стерильной салфеткой.
5. Накрыть операционное поле, соединив стерильные салфетки между собой цапками. Не допускать контакта между стерильным и нестерильным материалом до окончания процедуры.
6. Для подтяжки латеральной части брови спаренные иглы вкалываются в кожу височной области до фасции височной мышцы, в этом месте иглы разъединяют и разводят. Одну из них продвигают дальше вглубь, подцепляют фасцию и обратно возвращают в подкожное пространство. Далее поочередно проводят иглы с нитью по намеченному контуру, выкалывают и выводят их в отмеченных точках, равномерно подтягивают нить с обеих сторон, достигая нужной формы брови, с некоторой гиперкоррекцией. При этом перегиб нити в месте вкола спаренных игл утапливается под кожей и прочно держится за фасцию височной фасции.
7. Введение нитей в область средней зоны лица и ментальной области проводятся в соответствии с маркировкой и рекомендациями, указанными в п. 9. Отличия касаются момента введения игл под кожу: важно вколоть спаренные иглы в подкожную клетчатку в область скуловой дуги, в этом месте иглы разъединить, развести таким образом, чтобы добиться обхвата местом перегиба нити участка фасциальных тяжей (реперных точек) и только после этого поочередно проводить иглы с нитью согласно маркировке.
8. Такие же рекомендации даются при подтяжке ментальной области.

9. При проведении иглы или канюли в подкожной жировой клетчатке на лице может ощущаться незначительное сопротивление при проколе соединительнотканых перегородок (септ), разделяющих жировые пакеты (компартменты).

10. Глубину установки нити можно контролировать пальпаторно только во время введения проводника. При проведении нити по намеченному контуру ткани по необходимости перемещают относительно проводника, меняя таким образом траекторию проведения нити.

11. После того, как проводник с предустановленной нитью достиг конечной намеченной точки, следует проверить зону проведения нитей на предмет втяжений и соблюдения единого слоя проведения.

12. Натянуть ткани вверх, по вектору нити, в таком положении придержать их левой рукой или придать объем, формируя необходимый контур. В этот же момент следует удалить проводник из первоначальной точки вкола. Необходимо следить, чтобы нить располагалась равномерно на всем протяжении линии маркировки.

13. После проведения нити кончик ее, оставшийся на поверхности, иссекают, для чего необходимо подтянуть нить и, сместив кончиками ножниц кожу вниз, обрезать находящийся на поверхности кончик нити так, чтобы установленная нить скрылась в подкожной клетчатке.

14. После установки нитей обработать зону вмешательства раствором антисептика, заклеить проколы стерильными наклейками («Omnistrip»).

15. Умеренные асимметрия, втяжения, сбористость кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и окончательно проходят в среднем через 7-10 дней.

16. По завершении процедуры приложить к области имплантации нитей холодный компресс (15 минут).

9. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Spring» (Aptos Spring Soft)

Инструментарий:

- упаковка продукта – **Aptos Spring, Aptos Spring Soft в наборах:**
- Нить Aptos Spring полипропиленовая, спиралевидная, МР 3, с иглой инъекционной 0,9 мм х 90 мм (20G х 90 мм) – 2 шт., с иглой инъекционной 1,1 мм х 100 мм (19G х 100 мм) – 2 шт.;
- 11. Нить Aptos Spring Soft полипропиленовая, спиралевидная, МР 3, с канюлей 0,9 мм х 90 мм (20G х 90 мм) – 2 шт., с канюлей 1,1 мм х 100 мм (19G х 100 мм) – 2 шт. одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- пинцет анатомический;
- ножницы Купера или Метценбаума;
- цапки – 2 шт.;
- шприц 5 мл или карпульный шприц;
- стерильные перчатки;
- стерильный перевязочный материал (две простыни 70х80 или 1х1 м, сухие салфетки 16х14 - 20 шт., наклейки «Omnistrip», «Steri-Strips»);
- чашка для антисептического раствора объемом 50 мл;
- антисептический раствор для обработки зоны вмешательства («Бетадин», «Йодопирон», «Октенисепт»).
- антисептический раствор для обработки рук врача (напр. мыло «Бактолин», раствор «Стерилиум»).
- анестетик: раствор Ультракаин ДС или ДС Форте в ампулах или карпулах, раствор лидокаина 1 % с адреналином гидрохлоридом в соотношении 1:100000;
- гелевый холодный компресс.

Предварительный (предоперационный) этап:

1. Предварительной подготовки к процедуре не требуется.

2. Пациенту необходимо отказаться от приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за неделю до процедуры.
3. Перед процедурой собирают анамнез (обращая внимание на ранее проведенные процедуры в зоне вмешательства), выявляют показания и исключают возможные противопоказания, выясняют пожелания пациента. Пациенту объясняют суть метода, ожидаемые эффекты и обсуждают осложнения, которые могут возникнуть после имплантации нитей.
4. Пациент подписывает информированное согласие (Приложение №2).
5. Выполняют фотографирование пациента в пяти стандартных проекциях.

Этапы проведения процедуры:

1. Пациента переодевают в одноразовый халат, шапочку, выполняют тщательный демакияж.
2. В положении стоя выполняют разметку выбранной зоны. Красным маркером отмечают место начального прокола, линии проведения нитей и конечные точки, после чего пациента снова фотографируют.
3. Кожу пациента трижды обрабатывают раствором антисептика.
4. Выполняют местную анестезию с экспозицией не менее 2-3 минут.
5. Выполняют имплантацию нитей согласно нанесенной разметке.
6. По окончании процедуры предварительно оценивают симметричность результата, выполняют обработку кожи раствором антисептика и заклеивают места вкола и выкола наклейками.

Описание методики/технологии.

1. Расположить пациента в положении, удобном для специалиста так, чтобы голова пациента была немного приподнята и находилась на уровне локтевых суставов.
2. Провести предварительную разметку маркером. Необходимо использовать схемы разметок, рекомендованные компанией АПТОС,

учитывая индивидуальные особенности кожи и рельефа тканей (Приложение №3).

3. Обработать руки: три раза вымыть руки антибактериальным мылом («Бактолин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфеткой или полотенцем по направлению от кисти к локтю, три раза руки антибактериальным средством (раствор «Стериллиум» или др.) – до локтя, до до середины предплечья, только кисти. Надеть стерильные перчатки.

4. Провести антисептическую обработку кожи пациента, трижды тщательно обработав зону вмешательства с дополнительной обработкой близких к этой зоне участков в радиусе не менее 5 см. Обработать по направлению от центра к периферии, захватывая шею и область декольте, ушные раковины, кожу волосистой части головы. Хорошо просушить кожу стерильной салфеткой.

5. Накрыть операционное поле, соединив стерильные салфетки между собой цапками. Не допускать контакта между стерильным и нестерильным материалом до окончания процедуры.

6. Взять иглу-проводник (канюлю в варианте Soft) с предустановленной нитью и отделить нить в месте ее прикрепления к игле. Затем прижать конец нити к игле и раскрутить пружинку против часовой стрелки.

7. Проколоть кожу и по намеченным линиям провести иглу/канюлю с нитью в подкожной жировой клетчатке. При достижении кончиком проводника губоподбородочной складки выйти в поверхностный слой, практически субдермально, далее притопить складку до уплощения зоны уголка рта, после чего провести проводник в подкожной клетчатке на прежнюю глубину и сделать выкол на расстоянии не менее 1см. от края складки (не выкалывать в варианте Soft)

8. При проведении иглы или канюли в подкожной жировой клетчатке на лице может ощущаться незначительно сопротивление при проколе соединительнотканых перегородок (септ), разделяющих жировые пакеты (компарменты).

9. Глубину установки нити можно контролировать пальпаторно только во время введения проводника. При проведении нити по намеченному контуру ткани по необходимости перемещают относительно проводника, меняя таким образом траекторию проведения нити.
10. После того, как проводник с предустановленной нитью достиг конечной намеченной точки, следует проверить зону проведения нитей на предмет втяжений и соблюдения единого слоя проведения.
11. Натянуть ткани вверх, по вектору нити, в таком положении придержать их левой рукой или придать объем, формируя необходимый контур. В этот же момент следует удалить проводник из первоначальной точки вкола. Необходимо следить, чтобы нить располагалась равномерно на всем протяжении линии маркировки.
12. После проведения нити кончик ее, оставшийся на поверхности, отсекают, для чего необходимо подтянуть нить и, сместив кончиками ножниц кожу вниз, обрезать находящийся на поверхности кончик нити так, чтобы установленная нить скрылась в подкожной клетчатке.
13. Установить таким образом все нити из упаковки по линиям нанесенной маркировки.
14. После установки нитей обработать зону вмешательства раствором антисептика, заклеить проколы стерильными наклейками («Omnistrip»).
15. Умеренные асимметрия, втяжения, сбористость кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и окончательно проходят в среднем через 7-10 дней.
16. По завершении процедуры приложить к области имплантации нитей холодный компресс (15 минут).

10. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Needle» («Aptos Needle 2/0»; «Aptos Needle 3/0»; «Aptos Needle 4/0»)

Инструментарий:

- упаковка продукта – Aptos Needle 2/0, Aptos Needle 3/0, Aptos Needle 4/0 в наборах;
- Нить Aptos Needle 2G полипропиленовая, с насечками, МР 3, с двумя иглами атравматическими обоюдоострыми GS 100 – 2 шт.
- Нить Aptos Needle 2G Soft полипропиленовая, с насечками, МР 3, с двумя иглами трубчатыми 0,8 мм х 65 мм (21G х 65 мм) – 2 шт.
- одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- пинцет анатомический;
- скальпель № 11 – 1 шт.;
- монофиламентная нить с режущей иглой размером от USP 4/0 до USP 6/0;
- ножницы Купера или Метценбаума;
- цапки – 2 шт.;
- шприц 5 мл или карпульный шприц;
- стерильные перчатки;
- стерильный перевязочный материал (две простыни 70х80 или 1х1 м, сухие салфетки 16х14 - 20 шт., наклейки «Omnistrip», «Steri-Strips»);
- чашка для антисептического раствора объемом 50 мл;
- антисептический раствор для обработки зоны вмешательства («Бетадин», «Йодопирон», «Октенисепт»).
- антисептический раствор для обработки рук врача (напр. мыло «Бактолин», раствор «Стерилиум»).
- анестетик: раствор Ультракаин ДС или ДС Форте в ампулах или карпулах, раствор лидокаина 1 % с адреналином гидрохлоридом в соотношении 1:100000;
- гелевый холодный компресс.

Предварительный (предоперационный) этап:

1. Предварительной подготовки к процедуре не требуется.
2. Пациенту необходимо отказаться от приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за неделю до процедуры.
3. Перед процедурой собирают анамнез (обращая внимание на ранее проведенные процедуры в зоне вмешательства), выявляют показания и исключают возможные противопоказания, выясняют пожелания пациента. Пациенту объясняют суть метода, ожидаемые эффекты и обсуждают осложнения, которые могут возникнуть после имплантации нитей.
4. Пациент подписывает информированное согласие (Приложение №2).
5. Выполняют фотографирование пациента в пяти стандартных проекциях.

Этапы проведения процедуры:

1. Пациента переодевают в одноразовый халат, шапочку, выполняют тщательный демакияж.
2. В положении стоя выполняют разметку выбранной зоны. Красным маркером отмечают место начального прокола, линии проведения нитей и конечные точки, после чего пациента снова фотографируют.
3. Кожу пациента трижды обрабатывают раствором антисептика.
4. Выполняют местную анестезию с экспозицией не менее 2-3 минут.
5. Выполняют имплантацию нитей согласно нанесенной разметке.
6. По окончании процедуры предварительно оценивают симметричность результата, выполняют обработку кожи раствором антисептика и заклеивают места вкола и выкола наклейками.

Описание методики/технологии.

1. Расположить пациента в положении удобном для специалиста так, чтобы голова пациента была немного приподнята и находилась на уровне локтевых суставов специалиста.

2. Провести предварительную разметку маркером. Необходимо использовать схемы разметок, рекомендованные компанией АПТОС, учитывая индивидуальные особенности кожи и рельефа тканей (Приложение №3).
3. Подготовить стерильный стол с необходимым материалом для проведения процедуры (см. выше), открыть упаковку медицинского изделия, выложив стерильную упаковку на столик для инструментов.
4. Обработать руки: три раза вымыть руки антибактериальным мылом («Бактолин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфеткой или полотенцем по направлению от кисти к локтю, три раза руки антибактериальным средством (раствор «Стериллиум» или др.) – до локтя, до середины предплечья, только кисти. Надеть стерильные перчатки.
5. Провести антисептическую обработку кожи пациента, трижды тщательно обработав зону вмешательства с дополнительной обработкой близких к этой зоне участков в радиусе не менее 5 см. Обработать по направлению от центра к периферии, захватывая шею и область декольте, ушные раковины, кожу волосистой части головы. Хорошо просушить кожу стерильной салфеткой.
6. Накрыть операционное поле, соединив стерильные салфетки между собой цапками. Не допускать контакта между стерильным и нестерильным материалом до окончания процедуры.
7. Осуществить разрез кожи до 2-3 мм в длину.
8. Через разрез ввести нить в необходимом направлении (Приложение №3) с возвратом в исходную точку (через тот же разрез).
9. Нить подтягивают, формируя необходимый объем и форму ткани. Конец нити завязывают хирургическим узлом. Узел погружают в мягкие ткани.
10. На разрез накладывают отдельный узловый шов с помощью нити размера от USP 4/0 до USP 6/0 и заклеивают проколы стерильными наклейками («Omnistrip»).
11. Умеренные асимметрия, втяжения, сбористость кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и окончательно проходят в среднем через 7-10 дней.

12. По завершении процедуры приложить к области имплантации нитей холодный компресс (15 минут).

11. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Needle 2G» (Aptos Needle 2G Soft)

Инструментарий:

- упаковка продукта – **Aptos Needle 2G, Aptos Needle 2G Soft в наборах:**
- Нить Aptos Needle 2G полипропиленовая, с насечками, МР 3, с двумя иглами атравматическими обоюдоострыми GS 100 – 2 шт.
- Нить Aptos Needle 2G Soft полипропиленовая, с насечками, МР 3, с двумя иглами трубчатыми 0,8 мм х 65 мм (21G х 65 мм) – 2 шт.
- одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- пинцет анатомический;
- ножницы Купера или Метценбаума;
- цапки – 2 шт.;
- шприц 5 мл или карпульный шприц;
- стерильные перчатки;
- стерильный перевязочный материал (две простыни 70х80 или 1х1 м, сухие салфетки 16х14 - 20 шт., наклейки «Omnistrip», «Steri-Strips»);
- чашка для антисептического раствора объемом 50 мл;
- антисептический раствор для обработки зоны вмешательства («Бетадин», «Йодопирон», «Октенисепт»).
- антисептический раствор для обработки рук врача (напр. мыло «Бактолин», раствор «Стерилиум»).
- анестетик: раствор Ультракаин ДС или ДС Форте в ампулах или карпулах, раствор лидокаина 1 % с адреналином гидрохлоридом в соотношении 1:100000;
- гелевый холодный компресс.

Предварительный (предоперационный) этап:

1. Предварительной подготовки к процедуре не требуется.
2. Пациенту необходимо отказаться от приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за неделю до процедуры.
3. Перед процедурой собирают анамнез (обращая внимание на ранее проведенные процедуры в зоне вмешательства), выявляют показания и исключают возможные противопоказания, выясняют пожелания пациента. Пациенту объясняют суть метода, ожидаемые эффекты и обсуждают осложнения, которые могут возникнуть после имплантации нитей.
4. Пациент подписывает информированное согласие (Приложение №2).
5. Выполняют фотографирование пациента в пяти стандартных проекциях.

Этапы проведения процедуры:

1. Пациента переодевают в одноразовый халат, шапочку, выполняют тщательный демакияж.
2. В положении стоя выполняют разметку выбранной зоны. Красным маркером отмечают место начального прокола, линии проведения нитей и конечные точки, после чего пациента снова фотографируют.
3. Кожу пациента трижды обрабатывают раствором антисептика.
4. Выполняют местную анестезию с экспозицией не менее 2-3 минут.
5. Выполняют имплантацию нитей согласно нанесенной разметке.
6. По окончании процедуры предварительно оценивают симметричность результата, выполняют обработку кожи раствором антисептика и заклеивают места вкола и выкола наклейками.

Описание методики/технологии.

13. Расположить пациента в положении удобном для специалиста так, чтобы голова пациента была немного приподнята и находилась на уровне локтевых суставов специалиста.

14. Провести предварительную разметку маркером. Необходимо использовать схемы разметок, рекомендованные компанией АПТОС, учитывая индивидуальные особенности кожи и рельефа тканей (Приложение №3).
15. Подготовить стерильный стол с необходимым материалом для проведения процедуры (см. выше), открыть упаковку медицинского изделия, выложив стерильную упаковку на столик для инструментов.
16. Обработать руки: три раза вымыть руки антибактериальным мылом («Бактолин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфеткой или полотенцем по направлению от кисти к локтю, три раза руки антибактериальным средством (раствор «Стерилиум» или др.) – до локтя, до до середины предплечья, только кисти. Надеть стерильные перчатки.
17. Провести антисептическую обработку кожи пациента, трижды тщательно обработав зону вмешательства с дополнительной обработкой близких к этой зоне участков в радиусе не менее 5 см. Обработать по направлению от центра к периферии, захватывая шею и область декольте, ушные раковины, кожу волосистой части головы. Хорошо просушить кожу стерильной салфеткой.
18. Накрыть операционное поле, соединив стерильные салфетки между собой цапками. Не допускать контакта между стерильным и нестерильным материалом до окончания процедуры.
19. Используя шприц объемом 2 мл или 5 мл или карпульный шприц, выполнить умеренную инфильтрационную анестезию предполагаемых первоначальных точек ввода нитей, и незначительную по намеченным линиям. Для меньшей инвазии рекомендуется использовать специальную атравматичную инфильтрационную канюлю. В среднем для обезболивания тканей необходимо использовать около 4 мл раствора анестетика. Подождать до 3 минут для развития анестезии. Необходимо избегать чрезмерной инфильтрации тканей.

20. Для петлевых траекторий: В начальной точке выполнить вкол сдвоенной иглы; в подкожной клетчатке иглы разъединить и развести кончики вокруг участка фасциальных тяжей (репперные точки) и далее каждую иглу с нитью провести согласно маркировкам. После выкола и неполного выведения игл из под кожи их разворачивают в подкожной клетчатке и по новому контуру возвращают в область точки вкола, где после умеренного подтягивания нити обрезают и кончики утапливают под дерму.

21. Для прямых траекторий: В начальной точке выполнить вкол сдвоенной иглы; в подкожной клетчатке иглы разъединить и развести кончики вокруг участка фасциальных тяжей (репперные точки) и далее каждую иглу с нитью провести согласно маркировкам. После выкола и неполного выведения игл из под кожи их разворачивают в подкожной клетчатке и следуют дальше, продвигая другим концом по прежней траектории до следующего разворота или выкола. В точке окончательного выкола после умеренного подтягивания нити обрезают и кончики утапливают под дерму

22. При проведении иглы или канюли в подкожной жировой клетчатке на лице может ощущаться незначительно сопротивление при проколе соединительнотканых перегородок (септ), разделяющих жировые пакеты (компартменты).

23. Глубину установки нити можно контролировать пальпаторно только во время введения проводника. При проведении нити по намеченному контуру ткани по необходимости перемещают относительно проводника, меняя таким образом траекторию проведения нити.

24. После того, как проводник с предустановленной нитью достиг конечной намеченной точки, следует проверить зону проведения нитей на предмет стяжений и соблюдения единого слоя проведения.

25. Натянуть ткани вверх, по вектору нити, в таком положении придержать их левой рукой или придать объем, формируя необходимый контур. В этот же момент следует удалить проводник из первоначальной точки вкола.

Необходимо следить, чтобы нить располагалась равномерно на всем протяжении линии маркировки.

26. После проведения нити кончик ее, оставшийся на поверхности, иссекают, для чего необходимо подтянуть нить и, сместив кончиками ножниц кожу вниз, обрезать находящийся на поверхности кончик нити так, чтобы установленная нить скрылась в подкожной клетчатке.

27. Установить таким образом все нити из упаковки по линиям нанесенной маркировки.

28. После установки нитей обработать зону вмешательства раствором антисептика, заклеить проколы стерильными наклейками («Omnistrip»).

29. Умеренные асимметрия, втяжения, сбористость кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и окончательно проходят в среднем через 7-10 дней.

30. По завершении процедуры приложить к области имплантации нитей холодный компресс (15 минут).

12. Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Wire» (Aptos Wire 2/0, Aptos Wire 3/0).

Данная процедура применяется для коррекции морщин и складок, атрофических вдавленных рубцов лица и тела, неровного рельефа кожи, возникших при неудачной липосакции или при наличии явления «целлюлит».

Технология позволяет отслоить (отсечь) кожу в области деформации от подлежащих тканей без разрезов кожи, через проколы с целью устранения деформации кожи.

Инструментарий:

- упаковка продукта – **Aptos Wire 2/0, Aptos Wire 3/0 в наборах:**
- Нить Aptos Wire 2/0 стальная крученая MP 3, с иглой атравматической GRT 85 – 1 шт.

- 15. Нить Aptos Wire 3/0 стальная крученая МР 2, с иглой атравматической GRT 85 – 1 шт.
- одноразовая шапочка и халат для пациента – 1 шт.;
- пинцет анатомический;
- ножницы Купера или Метценбаума;
- цапки – 2 шт.;
- шприц 5 мл или карпульный шприц;
- стерильные перчатки;
- стерильный перевязочный материал (две простыни 70x80 или 1x1 м, сухие салфетки 16x14 - 20 шт., наклейки «Omnistrip», «Steri-Strips»);
- чашка для антисептического раствора объемом 50 мл;
- антисептический раствор для обработки зоны вмешательства («Бетадин», «Йодопирон», «Октенисепт»).
- антисептический раствор для обработки рук врача (напр. мыло «Бактолин», раствор «Стерилиум»).
- анестетик: раствор Ультракаин ДС или ДС Форте в ампулах или карпулах, раствор лидокаина 1 % с адреналином гидрохлоридом в соотношении 1:100000;
- гелевый холодный компресс.

Предварительный (предоперационный) этап:

1. Предварительной подготовки к процедуре не требуется.
2. Пациенту необходимо отказаться от приема антиагрегантов и БАД, влияющих на свертываемость крови, примерно за неделю до процедуры.
3. Перед процедурой собирают анамнез (обращая внимание на ранее проведенные процедуры в зоне вмешательства), выявляют показания и исключают возможные противопоказания, выясняют пожелания пациента. Пациенту объясняют суть метода, ожидаемые эффекты и обсуждают осложнения, которые могут возникнуть после имплантации нитей.
4. Пациент подписывает информированное согласие (Приложение №2).

5. Выполняют фотографирование пациента в пяти стандартных проекциях.

Этапы проведения процедуры:

1. Пациента переодевают в одноразовый халат, шапочку, выполняют тщательный демакияж.
2. В положении стоя выполняют разметку выбранной зоны. Красным маркером отмечают место начального прокола, линии проведения нитей и конечные точки, после чего пациента снова фотографируют.
3. Кожу пациента трижды обрабатывают раствором антисептика.
4. Выполняют местную анестезию с экспозицией не менее 2-3 минут.
5. Выполняют имплантацию нитей согласно нанесенной разметке.
6. По окончании процедуры предварительно оценивают симметричность результата, выполняют обработку кожи раствором антисептика и заклеивают места вкола и выкола наклейками.

Описание методики/технологии.

1. Расположить пациента в положении, удобном для специалиста так, чтобы голова пациента была немного приподнята и находилась на уровне локтевых суставов.
2. Провести предварительную разметку маркером. Необходимо использовать схемы разметок, рекомендованные компанией АПТОС, учитывая индивидуальные особенности кожи и рельефа тканей (Приложение №3).
3. Обработать руки: три раза вымыть руки антибактериальным мылом («Бактолин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфеткой или полотенцем по направлению от кисти к локтю, три раза руки антибактериальным средством (раствор «Стериллиум» или др.) – до локтя, до до середины предплечья, только кисти. Надеть стерильные перчатки.
4. Провести антисептическую обработку кожи пациента, трижды тщательно обработав зону вмешательства с дополнительной обработкой

близких к этой зоне участков в радиусе не менее 5 см. Обработать по направлению от центра к периферии, захватывая шею и область декольте, ушные раковины, кожу волосистой части головы. Хорошо просушить кожу стерильной салфеткой.

5. Накрыть операционное поле, соединив стерильные салфетки между собой цапками. Не допускать контакта между стерильным и нестерильным материалом до окончания процедуры.

6. Соответственно разметкам (Приложение №3) иглой делают прокол кожи, погружая иглу в необходимый слой на определенную глубину в подкожно-жировую клетчатку. Контролируя пальцем, иглу продвигают по периметру зоны отслойки до изгиба контура. В месте изгиба игла выводится на поверхность кожи. Вместе с ней протягивается металлическая нить, скрепленная с иглой.

7. Через то же отверстие игла вновь вводится под кожу и в том же слое клетчатки продвигается дальше до следующего изгиба контура, т.е. каждый последующий вкол производится в месте предыдущего выкола.

8. Нитью обрабатывают весь намеченный участок кожи с выводом иглы в начальный прокол кожи.

9. Отслоение кожно-жирового лоскута и создание полости: сохраняя нить в натянутом состоянии, пилящими движениями расслаивают мягкие ткани, выводя нить на поверхность кожи. Пилящими движениями кожно-жировой лоскут отделяется от подлежащих тканей и таким образом создается раневой канал.

8. Введение нитей в область средней зоны лица и ментальной области проводятся в соответствии с маркировкой и рекомендациями, указанными в п. 9.

9. При проведении иглы в подкожной жировой клетчатке на лице может ощущаться незначительное сопротивление при при проколе соединительнотканых перегородок (септ), разделяющих жировые пакеты (компартменты).

10. После установки нитей обработать зону вмешательства раствором антисептика, заклеить проколы стерильными наклейками («Omnistrip»).
11. Умеренные асимметрия, втяжения, сбористость кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и окончательно проходят в среднем через 7-10 дней.
12. По завершении процедуры приложить к области имплантации нитей холодный компресс (15 минут).

ОБРАЗЕЦ**ПАМЯТКИ ПАЦИЕНТУ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР
НИТЕВОГО ЛИФТИНГА ПО МЕТОДАМ ARTOS****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой памяткой. Здесь Вы найдете важные рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся процедуры установки нитей Aptos. Мы надеемся, что приведенная информация поможет Вам принять правильное решение. В случае, если у Вас появятся дополнительные вопросы, Вы можете обратиться к нашим специалистам.

Показания к применению

1. Легкие и умеренные признаки дряблости кожи.
2. Опущение или нависание брови или только ее наружной трети (хвоста).
3. Провисание щечно-скуловой области, носогубных складок и брылей, появление «морщин марионетки».
4. Деформация овала лица, появление второго подбородка.
5. Возрастные изменения шеи.
6. Атрофические изменения и неровный рельеф кожи и подкожных тканей.
7. Асимметрия лица.

Противопоказания к использованию методики:

- аутоиммунные заболевания;
- тяжелые соматические заболевания;
- заболевания крови;
- коллагенозы;
- ишемическая болезнь сердца;
- артериальная гипертензия II и III степеней;
- психические и невротические нарушения;
- воспалительные явления и опухолевые заболевания в области проведения процедуры;
- склонность к формированию келоидных и гипертрофических рубцов;
- заболевания крови (гемофилия), прием антикоагулянтов, антиагрегантов, НПВС;
- обострение любых хронических заболеваний;
- беременность, лактация;
- ранее имплантируемые небиodeградирующие инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры;
- индивидуальная непереносимость используемых препаратов;
- менструация (1 неделя цикла);

- заболевания кожи в области проведения процедуры;
любые другие противопоказания по решению лечащего врача пациента. врача.

Рекомендации для скорейшего восстановления

1. В течение 48 часов после проведения процедуры прикладывать холод к области коррекции 3–4 раза в день в течение 15 минут.
2. При сохранении болевых ощущений возможно применение анальгетиков в соответствии с инструкцией («Нимесил», «Кетонал» и др.).
3. Для ускорения процессов реабилитации рекомендуются препараты и процедуры, снижающие отек («Траумель», «Гепарин», микротоковая терапия и т. д.).
4. **Рекомендуется:**
 - в течение двух недель ограничить активность мимики;
 - отказаться от алкоголя на 2–3 недели;
 - воздержаться от массажа и физиотерапии на 2 месяца;
 - занятий фитнесом, тепловых процедур (в том числе, от посещения бани, сауны и бассейна) на участках имплантации на 1 месяц;
 - процедур миостимуляции на 2 месяца.
5. В течении первых суток не прикасаться к местам имплантации нитей.
6. В течение 3 дней обрабатывайте места проколов кожи антисептическими растворами.
7. Запрещено массировать и пытаться самостоятельно расправить места имплантации нитей.
8. В первые 2-3 дня рекомендуется ношение эластичной повязки.
9. В течение 3–5 дней после процедуры пациенту может быть назначена антибактериальная терапия: (например, «Цифран» или «Ципролет» 0,5 г по 1 таблетке 2 раза в день).
10. В течение 1 недели рекомендуется воздержаться от перелетов.
11. Повторный визит к врачу планируется на 3, 7 и 14-й день после процедуры.

Часто задаваемые вопросы

Насколько болезненной будет процедура?

Нитевой лифтинг по методам Aptos выполняется с использованием местной инфильтрационной анестезии, для чего в область прокола и по контуру проведения нитей вводится раствор анестетика (Ультракаин ДС Форте, Убистезин и др.). При этом некоторые пациенты испытывают неприятные ощущения. Такая же реакция возможна и в начале процедуры, когда делается прокол, через который нити будут вводиться. Кроме того, следует учитывать, что во время менструации повышается чувствительность к боли, поэтому рекомендуется проводить процедуру после окончания этого периода.

Требуется ли процедура предварительной подготовки?

Особая предварительная подготовка не требуется. Однако примерно за неделю до проведения коррекции желательно отказаться от приема антиагрегантов (ацетилсалициловая кислота, аспирин, дипиридамол, пентоксифиллин, ксантинола никотинат и др.) и биологически активных добавок (БАДов), влияющих на свертываемость крови. Если препарат был Вам назначен по медицинским показаниям, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом по основному заболеванию для определения возможности временной отмены терапии.

Какие осложнения могут быть после процедуры?

Осложнения после нитевой коррекции достаточно редки. Нештатной ситуацией считаются гематомы, воспалительные явления, появление стойкой асимметрии, выраженная гиперкоррекция, контурирование нитей, линейные кровоизлияния по ходу установки нитей, втяжения кожи в местах прокола иглой.

Из чего изготовлены нити Aptos? Безопасен ли этот материал?

В зависимости от области коррекции, возраста и индивидуальных пожеланий пациента используются хирургические нерассасывающиеся или рассасывающиеся нити. Первые изготовлены из полипропилена — синтетического шовного материала, который используется в хирургии более 50 лет. Он безопасен, не вызывает аллергии и не отторгается организмом. Рассасывающиеся нити сделаны из биосинтетического шовного материала капролака, который используется в хирургии более 30 лет. Капролак полностью выводится из организма в среднем через 360 дней. В состав рассасывающихся нитей входит L-молочная кислота, которая оказывает дополнительное биостимулирующее (омолаживающее) действие, активируя естественные процессы обновления клеток кожи. L-молочная кислота выделяется, пока нити полностью не рассосутся, благодаря чему результат процедуры со временем только улучшается.

Сколько длится реабилитационный период?

Реабилитационный период длится в зависимости от метода около 1–3 недель.

Для сокращения реабилитационного периода могут быть назначены:

1. Лимфомиозот — 15 капель 1–2 раза в день (возможны противопоказания, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.);
2. Плазмолифтинг — до, во время и после процедуры, далее через каждые 7–10 дней (всего 3–4 процедуры);
3. Микротоковая терапия, и др. восстановительные процедуры — на следующий день после процедуры, и в течение всего восстановительного периода;
4. Аппаратная косметология — через 2–3 недели;
5. Мезотерапия, биоревитализация, ботулинотерапия — через 2–3 недели.

В течение реабилитационного периода могут наблюдаться асимметрия, отеки, неровности, синяки, гематомы, втяжения, контурирование нитей. Такие проявления являются нормой реабилитационного периода и могут продолжаться от недели до трех месяцев.

Как скоро можно увидеть полученный эффект и как долго он сохраняется?

Результат чаще всего заметен сразу после проведения процедуры и становится более выраженным к концу второй недели. Продолжительность эффекта зависит от зоны коррекции и типа введенных нитей, а также от соблюдения пациентом рекомендаций реабилитационного периода и индивидуальных особенностей. При использовании рассасывающихся нитей он сохраняется в среднем на 1,5–2 года, нерассасывающихся — в среднем

на 3–5 лет. Процедуру можно повторить не ранее чем через 2 месяца.

Количество процедур определяется лечащим врачом индивидуально.

Данные о проведенной процедуре

Дата Д Д / М М / Г Г Г Г

Фамилия

Имя

Отчество

Клиника

Врач

Город

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА(-КИ) (в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»)

Тел. _____

Дата рождения _____

Я добровольно даю согласие на проведение услуги по введению искусственных имплантатов в мягкие ткани с использованием нитей производства компании «АПТОС» и прошу констатировать ООО «АПТОС-ПРО» (наименование клиники) о ее проведении.

Мне разъяснено, что нити производства компании «АПТОС» («APOTOS») оказывают ревитализирующий, поддерживающий эффект. Сразу после процедуры кожа поднимается «приподнятой», местами «фалдит», для наилучшего эффекта во время процедуры делается небольшая гиперкоррекция. Поэтому первичный эффект от процедуры проявляется не ранее чем через 10-14 дней, а окончательный эффект — не ранее чем через 1 месяц. В этот период делаются контрольные снимки. В течение 7-10 дней, изредка выше, могут ощущаться покалывания по ходу введения нити, небольшая болезненность, отечность, возможно появление незначительных кровоизлияний. Пальпаторно нити не ощущаются до 2-х месяцев, при этом внешне не видны.

Я полностью информирован(а) о методе устранения морщин лица и укрепления кожи тела с помощью введения нитей. Косметический эффект от введения нитей сохраняется от 1 года до 2-х лет (зависит от скорости обмена веществ пациента), в среднем 1,5 года. Затем возможна повторная процедура.

Я информирован(а):

Что процедура проводится под местной анестезией с поверхностной седацией (физическое и эмоциональное расслабление пациента, при котором он погружается в поверхностный сон).

О преимуществах и осложнениях инъекционной анестезии, которые могут проявляться в виде различных аллергических реакций (анафилактического шока, отека Квинке, бронхоспазма, коллапса) и постинъекционных гематом.

О болевых ощущениях во время процедуры в виде жжения, щипков, сдавливания, натяжения.

Об изменениях чувствительности в боковых областях лица, волосистой части головы.

Об отечности которая неизбежна после процедуры, особенно сильная отечность на 3 сутки.

О боли, которая будет сопровождаться особенно в первые дни (боль в области проколов и по контуру введения нитей).

Я извещен(а), что побочные действия от процедуры встречаются редко и носят обратимый характер. Чаще всего возникают небольшие гематомы, отечность, гиперемия (покраснение) в областях введения нитей, которые проходят самостоятельно в течение нескольких дней. Из-за особенностей мимики может появиться легкая асимметрия лица, которая ликвидируется самостоятельно через некоторое время, либо с помощью докоррекции. При проведении процедуры применяются анестезирующие препараты — возможна аллергическая реакция на них.

В настоящее время у меня нет аутоиммунных, тяжелых соматических и обострение любых хронических заболеваний; заболеваний крови, коллагенозы, ишемической болезни сердца; артериальной гипертензии II и III степеней; психических и неврологических нарушений; воспалительных явлений и опухолевых заболеваний в области введения процедуры; склонности к формированию келоидных и гипертрофических рубцов; беременности, периода лактации; месячных (1 неделя цикла); заболеваний кожи в области проведения процедуры; не принимаю антикоагулянты, антиагреганты, НПВС; отсутствуют ранее имплантируемые небиодеградирующие инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры. Я не принимаю препараты, снижающие свертываемость (аспирин и др.).

Я сам(а) несу ответственность в случае несвоевременного информирования лечащего врача о наличии у меня других хронических заболеваний.

При возникновении осложнений, таких как высокая температура тела (более 37,5 °C), появление пульсирующих болей в зоне постановки нитей, выраженной асимметрии, выраженного отека тканей, обязуюсь немедленно обратиться к врачу.

Я обязуюсь после проведения процедуры соблюдать следующие рекомендации:

1. В течение 48 часов поле проведения процедуры прикладывать холод к области коррекции 3-4 раза в день в течение 15 минут.

2. В течение двух недель ограничить активность мимики; не наносить декоративную косметику (пудра, тональное средство) в течение 3-х дней; отказаться от алкоголя на 2-3 недели; воздержаться от массажа и физиотерапии на 2 месяца; занятий активными видами спорта, тепловых процедур (в том числе, от посещения бани, сауны и бассейна) на участках имплантации на 1 месяц; процедур микстимуляции на 2 месяца; не загорать. Посещение стоматолога разрешается только в случае острой необходимости.

3. В течение первых суток не прикасаться к местам имплантации нитей. В течение 3 дней обрабатывайте места проколов кожи антисептическими растворами. Запрещено массировать и пытаться самостоятельно расправить места имплантации нитей.

4. В первые 2-3 дня рекомендуется ношение эластичной повязки.

5. В течение 1 недели рекомендуется воздержаться от перелетов.

Врач подробно в устной форме рассказал о всех особенностях данной косметологической процедуры, о особенности течения восстановительного периода и предупредил что после проведения процедуры появятся покраснения на коже, отек мягких тканей и ощущение болезненности.

Я полностью понимаю, что нарушение врачебных рекомендаций и требований может способствовать развитию местных и(или) общих осложнений или даже стать их причиной. Это, в свою очередь, может ухудшить результаты лечения, увеличить его продолжительность, а в некоторых случаях потребовать проведения повторных процедур.

Я даю согласие на проведение контрольных фотоснимков до, в процессе и после процедуры для сравнительной оценки результатов, понимая, что эти фотографии останутся собственностью клиники. Если использование этих фотографий может оказаться полезным для научно-медицинских исследований, обучения и повышения хирургических знаний, эти фотографии или связанную с ними информацию можно публиковать в профессиональных журналах или медицинских книгах, или использовать для обучения или любых других целей, которые клиника сочтет необходимыми. Мне разъяснено, что при любых подобных публикациях или использовании мое имя не будет упомянуто.

Мне понята информация относительно заказанных мной процедур, доведенная до меня на консультации, и мне была предоставлена возможность обсудить, уточнить, получить ответы на все вопросы по этой информации.

Я понимаю, что врач не может дать мне гарантий относительно достижения желаемых результатов, особенностей и сроков моего восстановительного периода. Мне известно, что по заказанным мной манипуляциям существует риск не достижения или неполного достижения желаемого эстетического результата, что может потребовать проведения дополнительных процедур.

Памятка о рекомендуемом поведении в послеоперационный период мной получена, прочитана, мне разъяснена и понята. Я обязуюсь выполнять рекомендации врача, а также рекомендации, изложенные в полученной мной памятке, не проводить самолечения.

« ____ » _____ 201 ____ года

(подпись пациента — фамилия, имя, отчество полностью)

Специалист (врач): _____


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» Я даю согласие на обработку моих персональных данных, в том числе: фамилию, имя, отчество, паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность, адрес проживания/проживания/прописки/регистрации, телефоны, данные о состоянии здоровья, заболеваниях и о случаях обращения в медицинские учреждения. Предоставляю право осуществлять все действия с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Исполнитель вправе обрабатывать мои персональные данные посредством включения их в списки и внесения в электронные базы данных Исполнителя. Я даю свое согласие на передачу моих персональных данных в иные медицинские организации в рамках проведения врачебного консилиума. Я знаю, я имею право в любой момент отозвать свое согласие на использование, в т.ч. передачу моих персональных данных посредством направления соответствующего письменного уведомления, которое должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку.

(подпись пациента — фамилия, имя, отчество полностью)


Схемы разметок АПТОС

К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОММЕНДАЦИЯМ
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПРОШЕДШИХ ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ ПО
ИМПЛАНТАЦИИ НИТЕЙ АПТОС

Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Thread» (Aptos Thread 4; Aptos Thread 6)

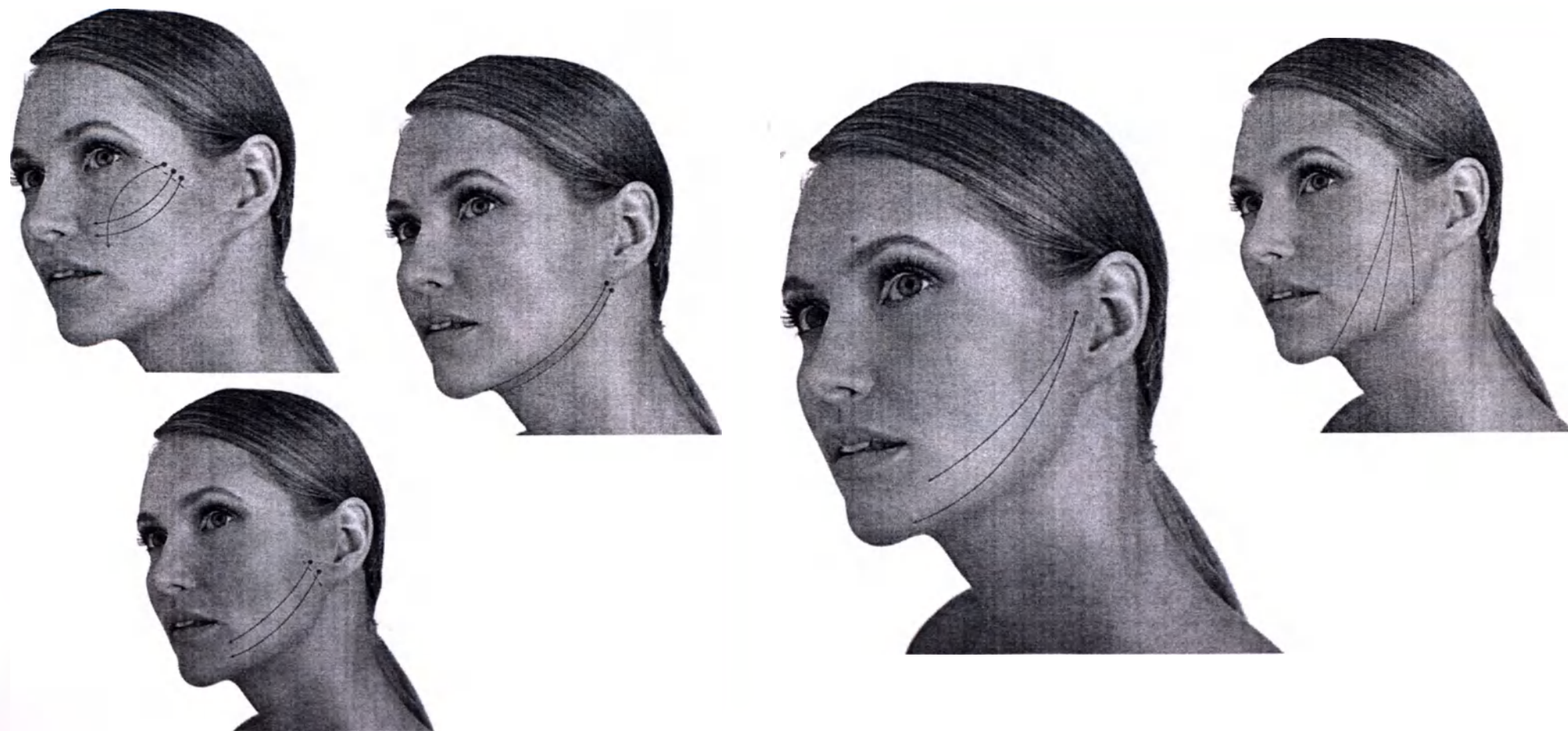



Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Thread 2G», «Aptos Thread 2G Soft»

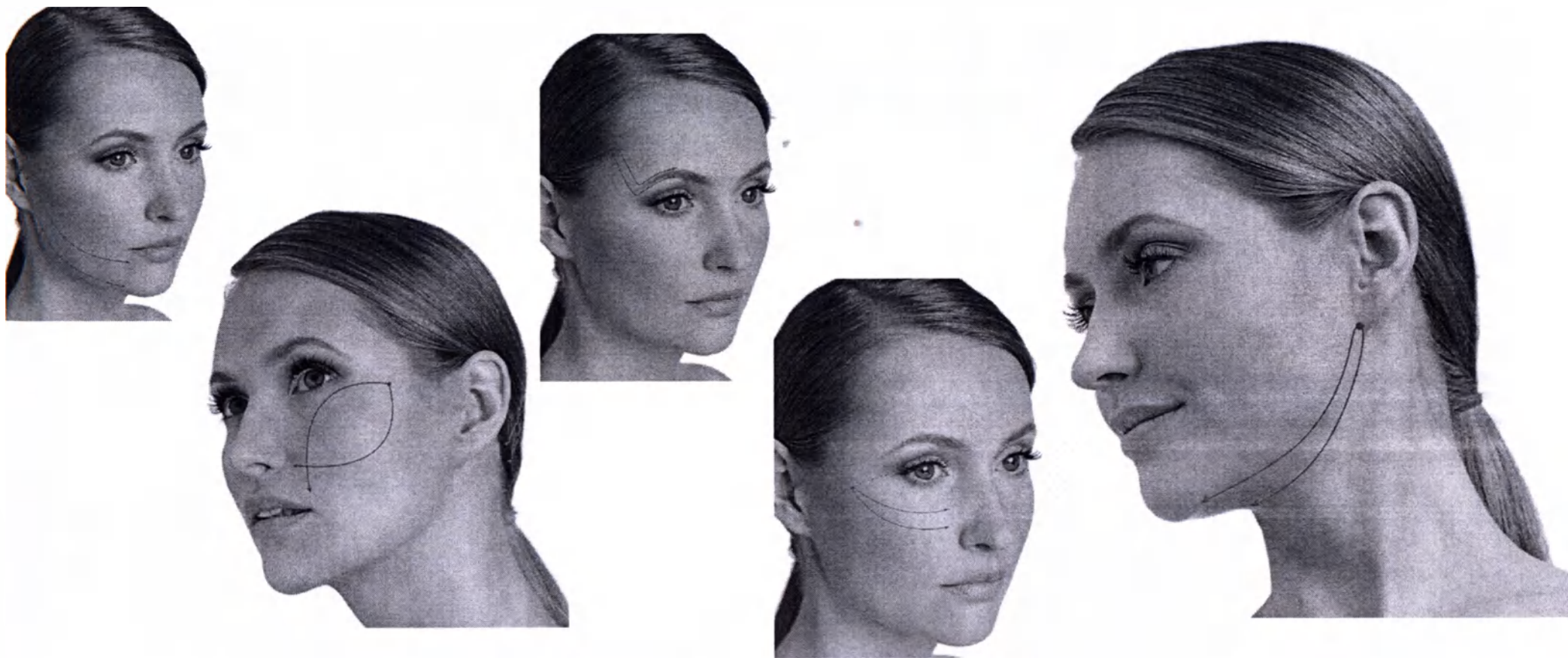


Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Spring», «Aptos Spring Soft»



Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Needle 2/0», «Aptos Needle 3/0»

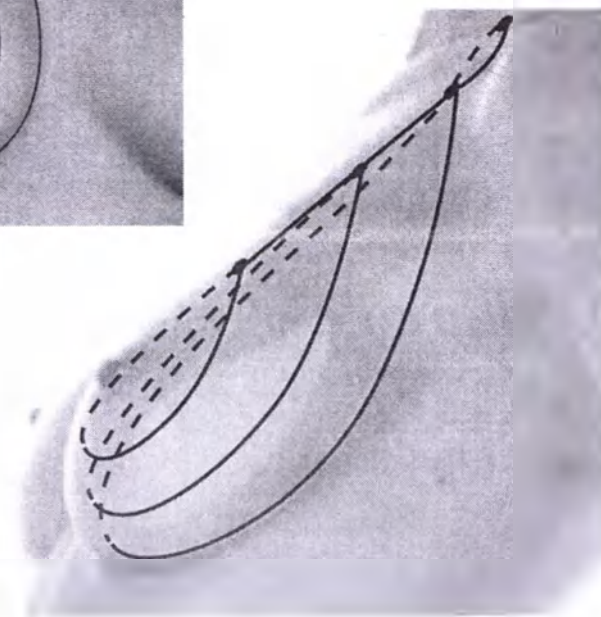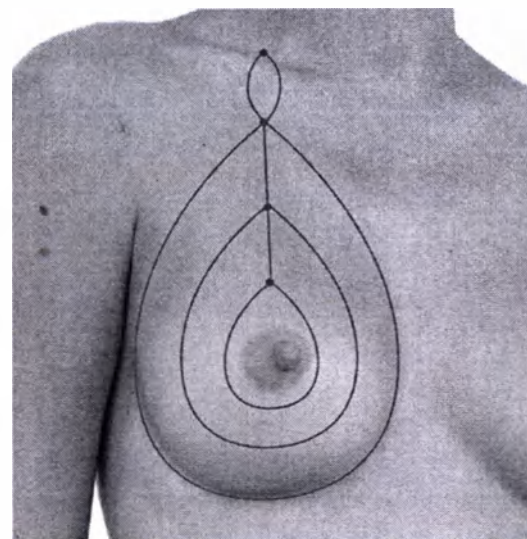


Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Needle 4/0»


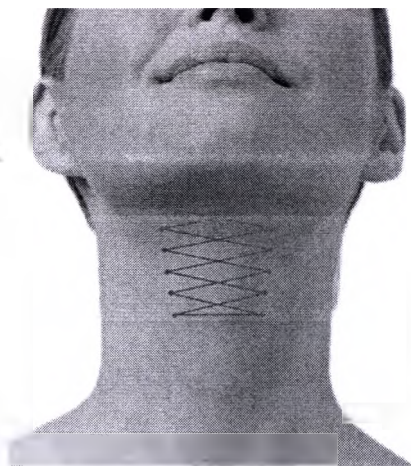


Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Needle 2G»




Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Needle 2G Soft»

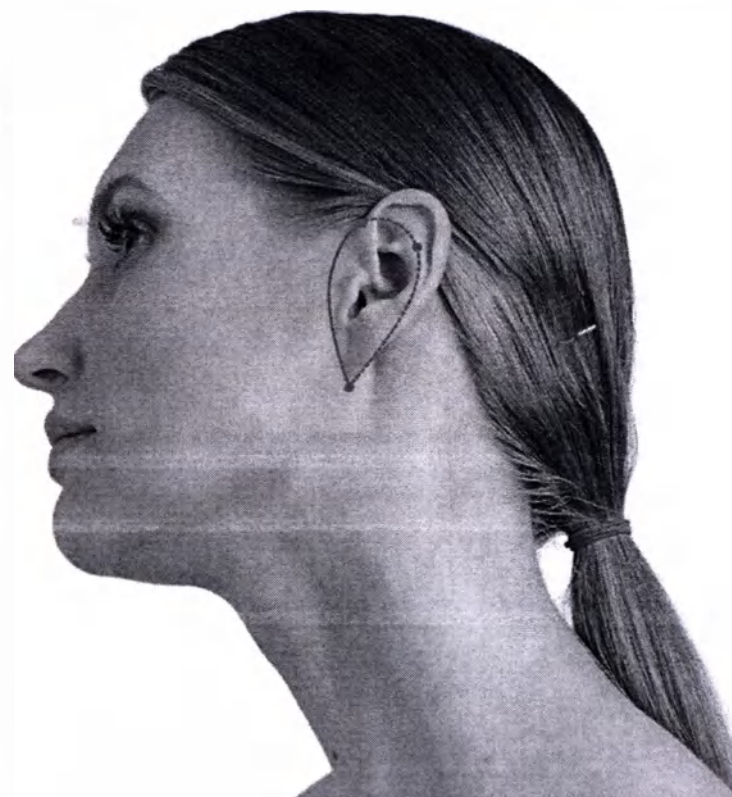

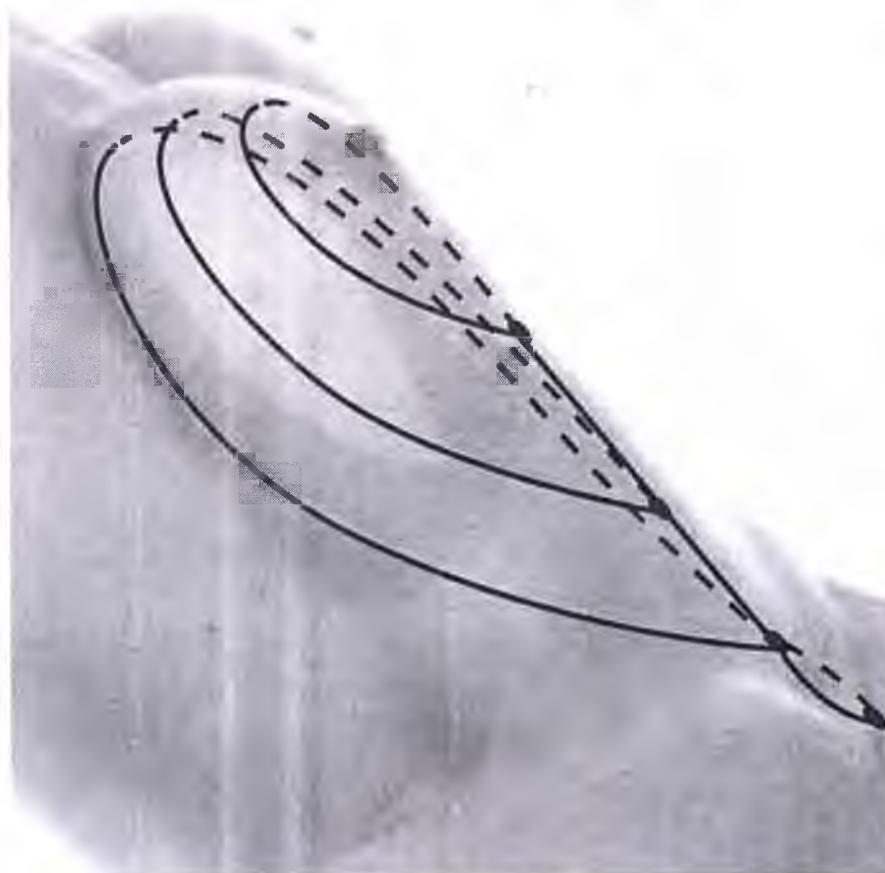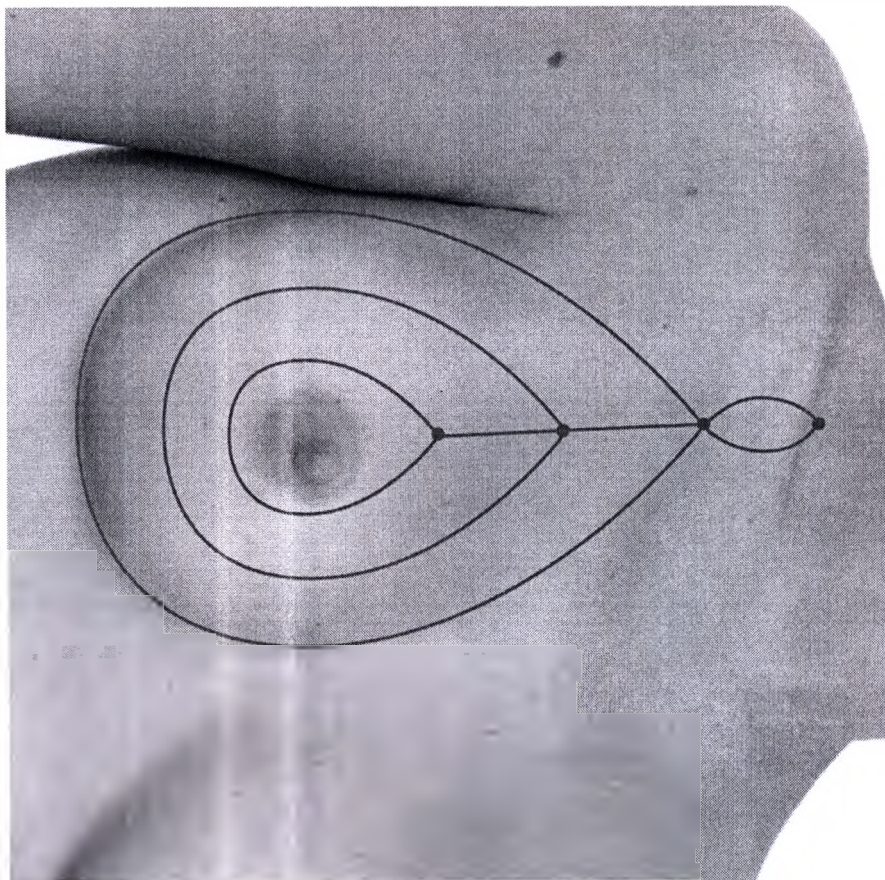


Методика коррекции мягких тканей лица и тела серии «Aptos Wire» (Aptos Wire 2/0, Aptos Wire 3/0)

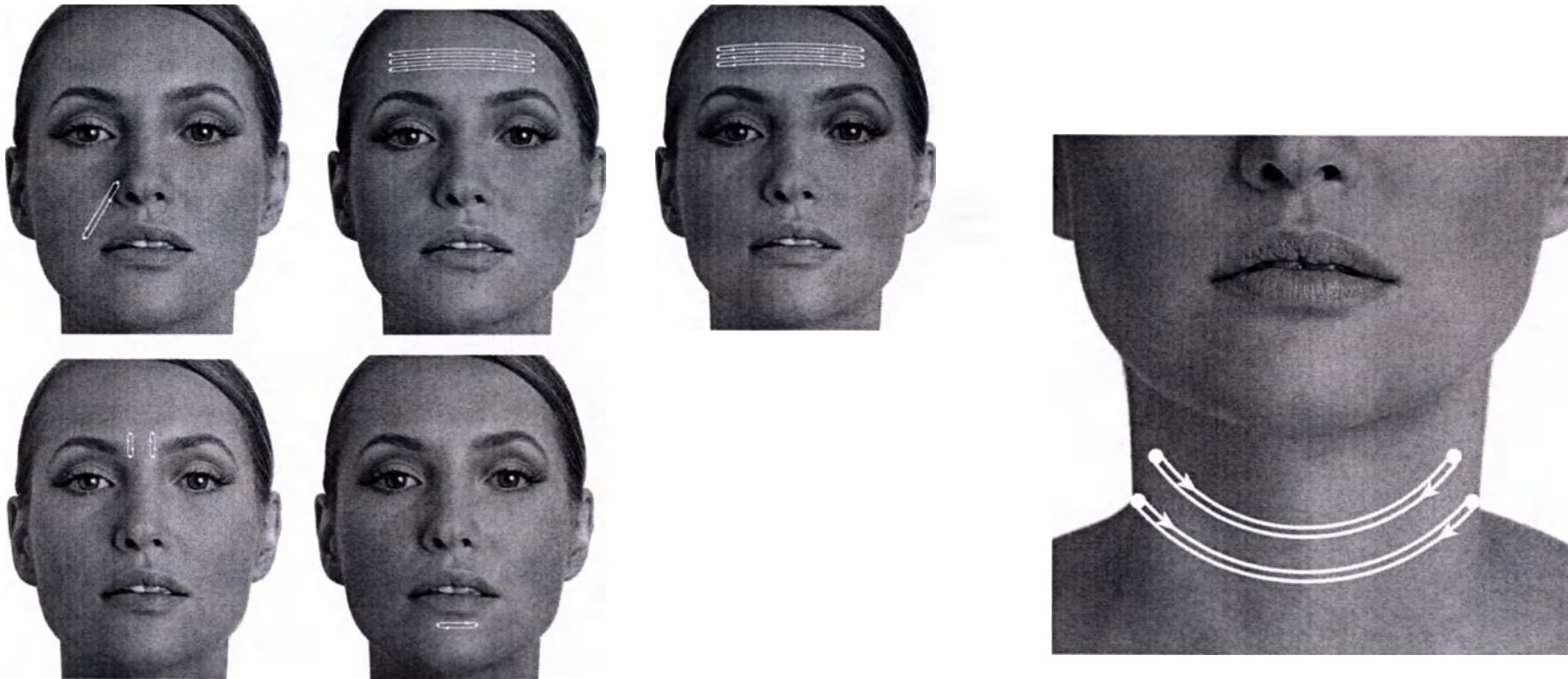

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 28 (двадцать восемь) листов
Генеральный директор
ООО «АПТОС»
_____ Каджая Г.Н.

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 28 (двадцать восемь) листов
Генеральный директор
ООО «АПТОС»
_____ Каджая Г.Н.

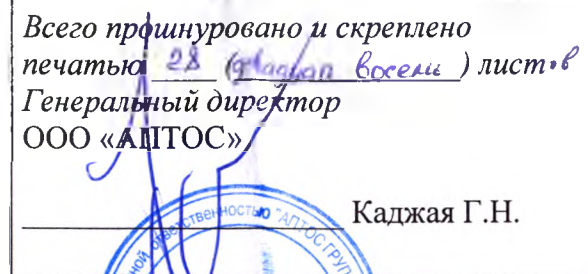

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор

ООО "АПТОС"

 Г.М. Суламанидзе


" 30 " ноября 2015 г.

Этикетки для медицинского изделия:

**НИТИ НЕРАССАСЫВАЮЩИЕСЯ С ИГЛАМИ И КАНИЮЛЯМИ
ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ
СТЕРИЛЬНЫЕ**

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

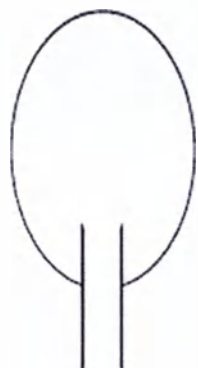

Aptos Needle 2G

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3, 500 мм - 2 шт.

Игла атравматическая обоюдоострая GS 100 мм – 4 шт.

LOT

AN2G




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

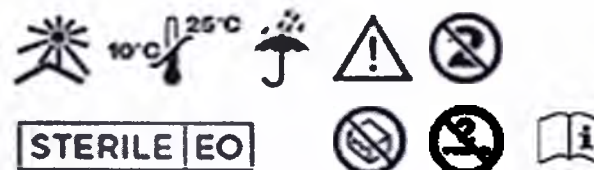


STERILE EO

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

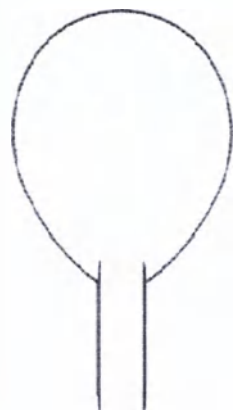

Aptos Needle 2G Soft

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3, 500 мм - 2 шт.

Игла трубчатая 0,8 мм x 65 мм (21G x 65 мм) – 4 шт.

LOT

AN2GS



02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge


Место производства:

ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com

ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge

Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62

www.aptos.ru

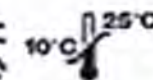

STERILE EO



Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

Aptos Needle 2/0

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) гладкая МР 3,
1200 мм - 1 шт.

Игла атравматическая обоюдоострая GRT 150 мм – 1 шт.

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси, Грузия,
info@aptos.ge

Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси, Грузия,
info@aptos.ge

Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30, помещение 1,
комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

LOT

AN2/0



02.2015



01.02.2020



STERILE EO

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

Aptos Needle 3/0

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) гладкая МР 2,
800 мм - 1 шт.

Игла атравматическая обоюдоострая GRT 85 мм – 1 шт.

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

LOT


AN3/0



02.2015



01.02.2020

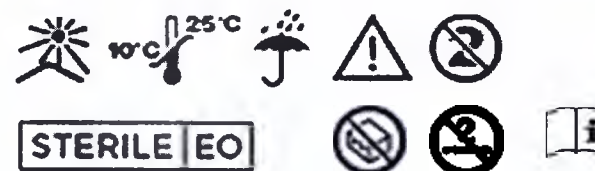

STERILE EO

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS



Aptos Needle 4/0

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) гладкая МР

1,5, 800 мм - 1 шт.

Игла атравматическая обоюдоострая изогнутая DRT 50 мм – 1 шт.


LOT



AN4/0

02.2015

01.02.2020

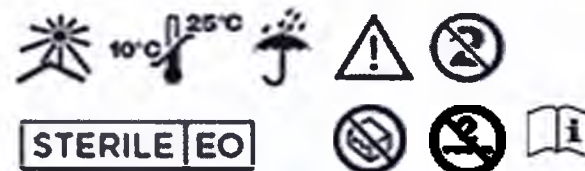

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

Aptos Needle DNR 60

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3,5,
1000 мм - 1 шт.

Игла атравматическая DRN 60 мм – 1 шт.



LOT

ANDRN



02.2015




01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge


Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com

ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge

Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

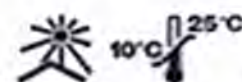

STERILE EO

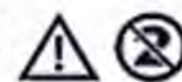

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS



Aptos Spring

Нить полипропиленовая, спиралевидная (окрашенная: голубой цвет) MP 3,
440 мм - 2 шт.

Игла инъекционная 0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт.

Нить полипропиленовая, спиралевидная (окрашенная: голубой цвет) MP 3,
470 мм - 2 шт.

Игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт.

LOT

AS




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30, помещение
1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

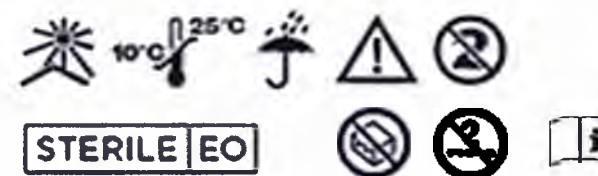

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS



Aptos Spring Soft

Нить полипропиленовая, спиралевидная (окрашенная: голубой цвет) MP 3,
440 мм - 2 шт.

Канюля 0,9 мм x 90 мм (20G x 90 мм) – 2 шт.

Нить полипропиленовая, спиралевидная (окрашенная: голубой цвет)
MP 3, 470 мм - 2 шт.

Канюля 1,1 мм x 100 мм (19G x 100 мм) – 2 шт.

LOT

ASS




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30, помещение
1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

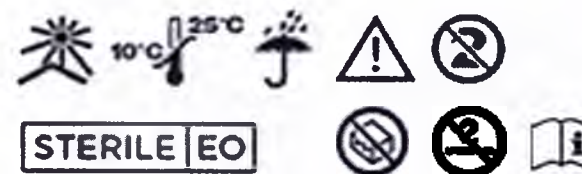

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ


Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

Aptos Suture

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с
насечками MP 3, 260 мм - 1 шт.

Игла атравматическая HR 30 мм – 1 шт.

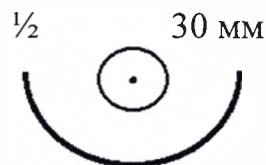

LOT

AST




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

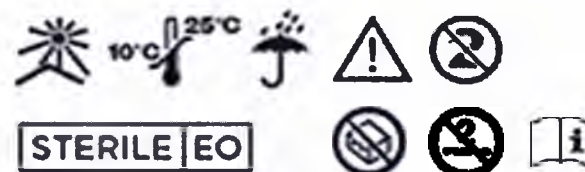


STERILE EO

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

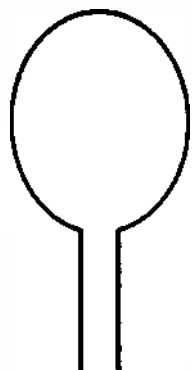

Aptos Thread 2G

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3, 250 мм - 2 шт.

Игла атравматическая GS 110 мм – 4 шт.

LOT

AT2G




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

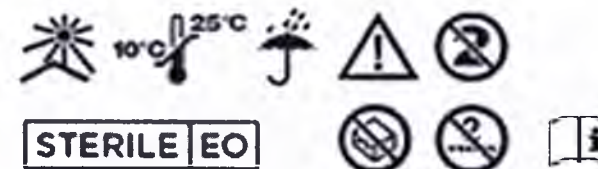


Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

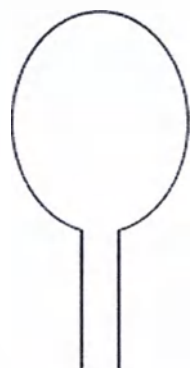

Aptos Thread 2G Soft

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3, 250 мм - 2 шт.

Игла трубчатая 0,8 мм x 100 мм (21G x 100 мм) – 4 шт.

LOT

AT2GS



02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru



Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS



Aptos Thread 4

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3, 120 мм - 4 шт.

Игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм – 1 шт.

LOT

AT4



02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge


Место производства:

ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com

ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge

Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62

www.aptos.ru

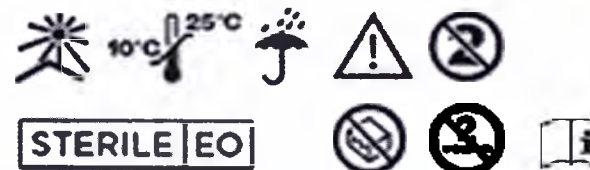

STERILE EO

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS



Aptos Thread 6

Нить полипропиленовая (окрашенная: голубой цвет) с насечками
MP 3, 120 мм - 6 шт.

Игла инъекционная 1,1 мм x 100 мм – 1 шт.

LOT

AT6




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

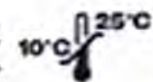

STERILE EO



Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные



Aptos Wire 2/0

Нить стальная крученая MP 3, 450 мм – 1 шт.
Игла атравматическая GRT 85 мм – 1 шт.

LOT

AW2/0




02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru

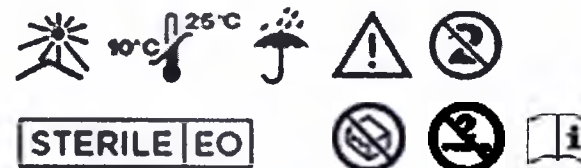

Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Нити нерассасывающиеся с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии
стерильные

APTOS

Aptos Wire 3/0

Нить стальная крученая MP 2, 450 мм – 1 шт.
Игла атравматическая GRT 85 мм – 1 шт.



LOT

AW3/0



02.2015



01.02.2020

Производитель: ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Место производства:
ООО Фойерштайн,
ул. Густав-Кроне 3, 14167 Берлин,
Германия info@suprama.com
ООО АПТОС,
ул. Орбелини 20/4, 0105 Тбилиси,
Грузия, info@aptos.ge
Представитель на территории РФ:
ООО «АПТОС ГРУПП», 117461,
г. Москва, ул. Каховка д. 30,
помещение 1, комната 13
8 499 922 06 62
www.aptos.ru



Апирогенно

Утилизировать как медицинские отходы в
соответствии с действующим законодательством РФ

Номер регистрации нотариального действия	№ 160169391
Дата регистрации нотариального действия	24.02.2016г
Наименование нотариального действия	Заверение подлинности подписи
Нотариус	Давид Чалаташвили
Адрес нотариального бюро	Тбилиси, ул. Мткварис № 4
Номер телефона нотариального бюро	2952228
Индивидуальный номер нотариального действия	95746046633516

Двадцать четвертого февраля две тысячи шестнадцатого года ко мне нотариусу **Чалаташвили Давиду**, нотариальное бюро, которого расположено по адресу: г. Тбилиси, ул. Мткварис № 4, обратился гражданин **Суламанидзе Георгий**, который заявил, что желает нотариально заверить свою подпись на этикетке для медицинского изделия

Я установил его личность, по предоставленным документам и удостоверился, что **Суламанидзе Георгий** (рожд. 14.08.1979г., личный № 60001002266, серия удостоверения личности 11IB01958, зарегистрированный адрес: г. Тбилиси, с. Шиндиси, ул. Н. Думбадзе № 22) действительно желает заверить свою подпись. Я проверил его дееспособность и заверяю, что не имею никаких оснований сомневаться в его дееспособности, кроме этого разъяснил, что при заверении подписи на данном документе, нотариус свидетельствует, что подпись, поставленная на документе действительно принадлежит вышеуказанному лицу. Нотариус, не заверяет действительность фактов, изложенных в документе и, соответственно, не несет ответственность за правовые последствия. Суламанидзе Георгий заявил, что владеет русским языком, на котором составлена представленная этикетка для медицинского изделия, а также ознакомлен с ее содержанием и не нуждается в переводе, после этого он, в моем присутствии лично совершил подпись на предоставленном русскоязычном документе.

Документ составлен в одном экземпляре. Взыскана нотариальная пошлина за нотариальные услуги согласно пункту 3 статьи 31 постановления № 507 от 29 декабря 2011 года правительства Грузии «Об утверждении размера стоимости, порядка ее уплаты и сроков обслуживания, установленных для нотариальной палаты Грузии и пошлинах за выполнение нотариальных действий» в размере 4 (четыре) лари + НДС 0,72 лари - согласно статье 169 Налогового кодекса Грузии, а также в соответствии с пунктом 1 статьи 39 вышеуказанного постановления взыскана стоимость регистрации нотариального действия 2,00 лари, всего взыскано 6,72 лари

Нотариус: /подпись/ / Давид Чалаташвили /

Печать: Грузия. Нотариус Давид Чалаташвили 01030037424

Получить или перепроверить информацию о нотариальном действии и нотариальном акте (его создании, изменении и/или аннулировании) вы можете на веб-странице нотариальной палаты Грузии – www.notary.ge или позвонив в нотариальную палату по номеру: + 995 (32) 2 66 19 18

Сшито в 17 (семнадцать) листах
подпись

Печать: Грузия. Нотариус Давид Чалаташвили 01030037424

*Перевод с грузинского языка на русский выполнен мной, переводчиком Саитходжаевой
Мамурой Коммунаровной, верность перевода гарантирую* *С*

Город Москва.

Третьего марта две тысячи шестнадцатого года.

Я, Сидоров Кирилл Евгеньевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Саитходжаевой Мамурой Коммунарской в моём присутствии. Личность ее установлена

Зарегистрировано в реестре за № 9-5465

Взыскано по тарифу - 100 рублей.

Нотариус

К. Е. Сидоров



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью - 19 - листа(ов).
Нотариус