



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

Предварительная подготовка

- Надеть одноразовые перчатки,
- Удалить упаковку,
- Смочить или дозированно увлажнить повязку,

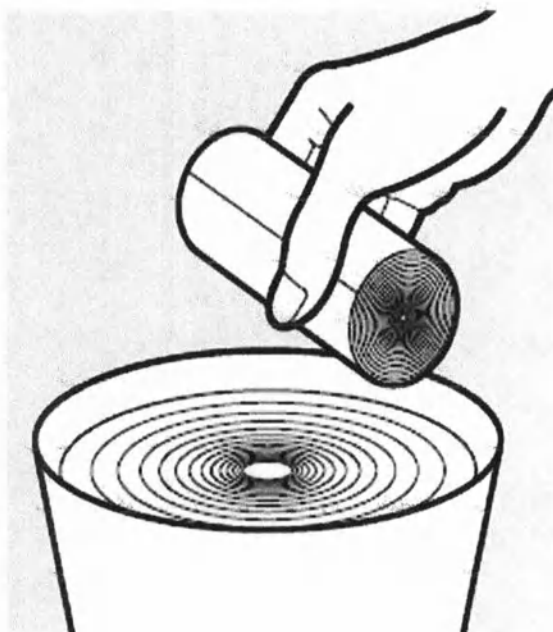


- просушить до степени готовности к наложению.

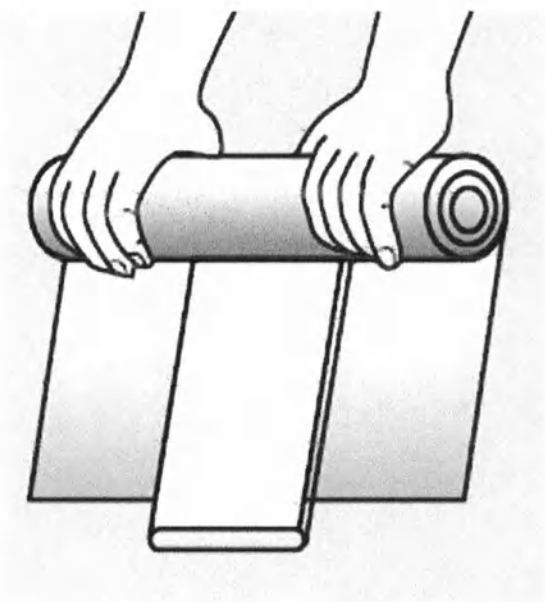


Наложение повязки (примерная схема)

- Выбрать оптимальный вариант иммобилизирующего средства Немоа
- Наложить спирально внахлест,

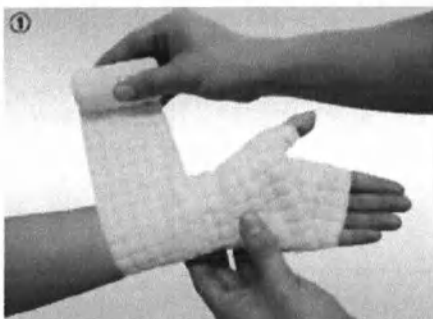


- Там, где необходимо, использовать прокладки,

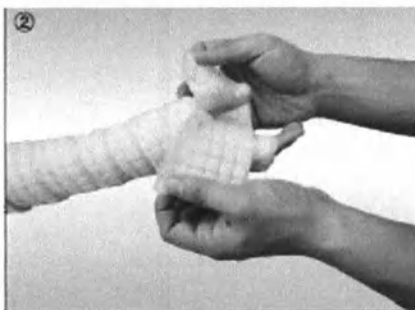

- Завернуть кромку повязки с дистальной позиции в проксимальную для прочного крепления.




Для дополнительной прочности и эстетического завершения повязки можно наложить дополнительный слой определенного цвета.

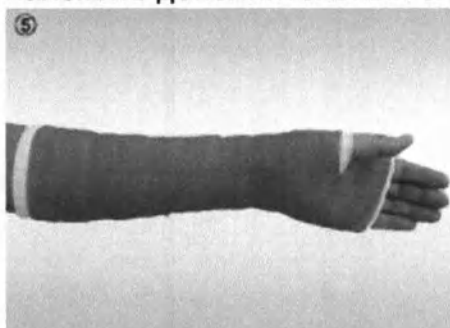

Снятие повязки

Снятие осуществляются традиционным способом с применением режущего инструмента

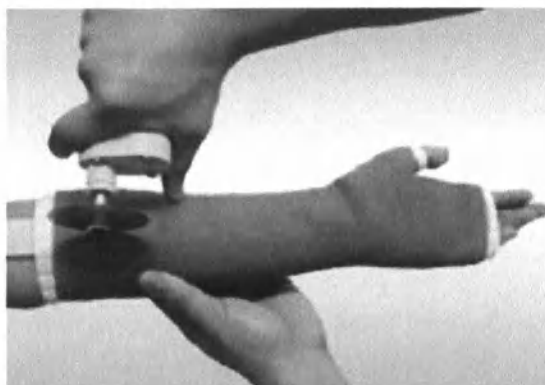

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Имобилизирующие средства Немоа можно перевозить любым транспортом.

Имобилизирующие средства Немоа следует хранить в сухом месте при температуре от + 10 до + 20°C (рекомендуемый диапазон).

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделий составляет 3 года от даты выпуска.

Генеральный директор
ООО «МКНТ ИМПОРТ»



Юдин Л. П.

Изготовитель:



T&L CO., LTD
20-11, Buk-Ri, Namsa-Myun, Yongin-City,
Gyeonggi-Do, 449-884 Korea
TEL : +82-31-323-5225 <http://eng.tnl.co.kr>
FAX : +82-31-323-3104 E-mail : trade@tnl.co.kr