

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Нью-Оптика»

Гревцова И.О.

«15» ноября 2012 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия

**Оправы очковые: металлические, пластмассовые,
комбинированные, полубоковые, безбоковые в индивидуальной упаковке
(см. приложение).**

производства


DE RIGO VISION S.P.A., Италия.

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАЧЕСТВУ ОПРАВ
4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
7. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение.

Используются в офтальмологии как аксессуары очковых изделий. Оправы очковые предназначены для закрепления в них линз и правильной фиксации их перед глазами.

2. Основные технические характеристики.

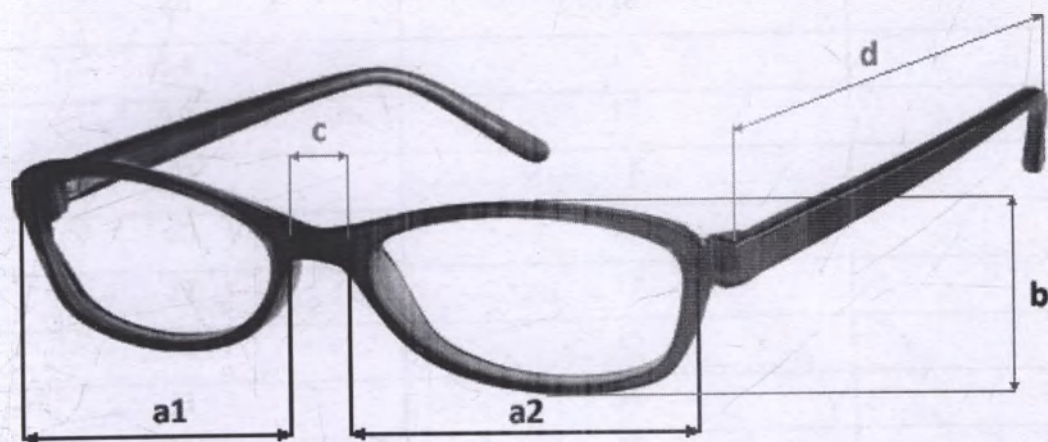

Оправы очковые характеризуются 4 основными геометрическими параметрами:

- шириной (a_1 , a_2) и высотой (b) рамок световых проемов
- шириной мостика (c) и длиной заушников (d) (все измерения в миллиметрах).

Ширина рамки, мм	Длина переносицы, мм	Длина заушников, мм
55	14	130
53	18	130
52	15	140
54	16	135
52	16	140
55	16	140
57	15	145
48	20	145
52	19	145
55	14	140
53	17	140
49	18	140
54	17	140
48	17	140
50	18	140
60	16	140
57	17	140
53	15	140
51	16	140
54	17	135
55	17	135
55	18	135
53	16	135
54	15	135
54	15	140
55	17	140
55	15	135
55	15	140

3. Требования предъявляемые к качеству оправ:

- 1) движение заушников должно быть плавным, без качки и заедания, винты не должны при этом отвертываться;
- 2) пластмассовая облицовка должна плотно прилегать к металлическим деталям оправы и прочно удерживаться на них.

3) очковая оправа после вставки в нее линз не должна терять первоначальной формы. Ободки должны быть симметричны. Сколы, царапины, зазоры между очковыми линзами и ободками рамки оправы, а также другие дефекты сборки очков не допускаются.

4. Противопоказания к применению.

Аллергические реакции на материал изделия.

5. Порядок работы изделия.

Перед использованием продукции потребитель сам обязан проверить, подходит ли ему этот материал для выполнения намеченной цели.

Выбирать оправу необходимо по следующим характеристикам:

- с учетом антропометрических данных лица;
 - длина заушников должна обеспечивать комфорт и надежное фиксирование оправы при движении головы (наклоне, ходьбе);
 - носовые упоры (подвижные и неподвижные) выбираются по предпочтению пользователя.
- Комфортное положение оправы можно придать самостоятельно, посредством носовых упоров, раздвинув или наоборот, по форме переносицы;
- применять оправу только после консультации офтальмолога и профессиональной установки линз;
 - использовать только готовые очки.

6. Правила хранения.

Хранить оправы вместе с линзами, как готовые очки.

Готовые очки должны быть уложены в бумажный или пластмассовый упаковочный пакет или индивидуальную упаковку, изготовленную по рабочим чертежам изготовителя очков и утвержденную в установленном порядке. Допускается упаковка очков в специальный жесткий или мягкий футляр.

Хранить в отапливаемых помещениях, при температуре окружающей среды от плюс 5°C до плюс 40°C, относительной влажности воздуха 98% при температуре плюс 25°C или относительной влажности воздуха 75% при температуре плюс 15°C. Во время хранения не допускается воздействие на очки агрессивных веществ (кислот, щелочей) и органических растворителей или их паров.


7. Правила эксплуатации.

Очки следует эксплуатировать в соответствии с правилами эксплуатации, рекомендованными настоящим правилам.

Правила по эксплуатации очков, приведенные на заказе-пакете или вкладываемые в индивидуальную упаковку очков, должны содержать следующую рекомендуемую информацию:

- 1) снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации оправы;
- 2) необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушник к оправе и линзы в металлической и безободковой оправках;
- 3) не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.

Генеральный директор
ООО «Нью-Оптика»

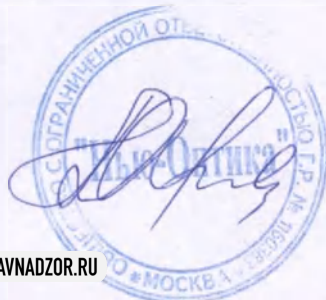

Гревцова И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Оправы очковые: металлические, пластмассовые, комбинированные, полубодковые, безободковые в индивидуальной упаковке.

Состав упаковки:

1. Футляр.
2. Гарантийная карточка.
3. Транспортный вкладыш.
4. Оправа.

Генеральный директор
ООО «Нью-Оптика»



Гревцова И.О.

Прошито и пронумеровано
3 лист
Ген. директор
ООО "Нью-Оптика"
И.О. Гревцов

