

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ЗАО «СтомаДент»

Кузовков Ю.В.

2014 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материал пломбировочный временный светового отверждения «ТемпеЛайт»

ТУ 9391-019-40151387-2007

Регистрационный номер: ФСР № 2008/01616 от 06 февраля 2008г.

Торговое название: «ТемпеЛайт»

Состав: олигоуретанметакрилат, бутилированный гидрокситолуол, камфорохинон, триметакрилат триэтанолламин, полиметилксилосан, полиметилметакрилат, кабосил, фторид натрия.

Свойства.

Материал пломбировочный временный светового отверждения «ТемпеЛайт» - полимерный материал с высокой эластичностью, что позволяет удалить временную пломбу без применения вращающихся инструментов. Выпускается в виде пасты в шприцах белого, голубого и желтого цветов
Отверждается светом длиной волны 450-500 нм.

Комплектность:

Комплект поставки материала «ТемпеЛайт»

- шприц с материалом «ТемпеЛайт» белого цвета - 1 шт.
- шприц с материалом «ТемпеЛайт» голубого цвета - 1 шт.
- шприц с материалом «ТемпеЛайт Ф» - 1 шт.
- инструкция по применению.

Допускается комплектация по заявкам потребителей. Допускается поставка комплекта материала «ТемпеЛайт» в виде отдельных шприцов. Допускается изготовление материала «ТемпеЛайт» желтого и голубого цветов в комплектации по желанию потребителей.

Назначение.

Материал «ТемпеЛайт» предназначен для использования в терапевтической стоматологии:

- для временного пломбирования полостей зубов, особенно в случаях, когда стенки полости истончены,
- для временного пломбирования при восстановлении полости вкладкой, изготовленной непрямым методом,
- для временного пломбирования при отсроченном лечении до 3 -х месяцев.

Способ применения:

Материал «ТемпеЛайт» вносится в высушенную полость зуба одной порцией, не требует послойного внесения, отверждается светом длиной волны 450-500нм. Время отверждения материала «ТемпеЛайт» зависит от толщины слоя материала для изготовления временной пломбы. Рекомендуемое время отверждения около 30 секунд. При закрытии глубоких полостей (более 5 мм) время отверждения необходимо увеличить до 40 секунд. Временная пломба не должна входить в окклюзионный контакт.

Материал после отверждения обладает высокой эластичностью и герметично закрывает полость. Временная пломба из материала «ТемпеЛайт» удаляется из полости экскаватором или зондом без применения вращающихся инструментов.

Меры предосторожности:

Материал «ТемпеЛайт» содержит уретановые и метакрилатные производные и может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. В таких случаях от применения материала необходимо отказаться.

Условия применения.

Применяется в лечебных учреждениях, стоматологических клиниках и передвижных комплексах.

Хранение.

Материал «ТемпеЛайт» выпускается в шприцах. Шприцы с материалом «ТемпеЛайт» должны быть закрыты сразу после использования.

Материал «ТемпеЛайт» необходимо хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении при температуре + (5 – 24)°С.

Срок хранения

3 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Утилизация.

Утилизация материала с истекшим сроком годности или пришедшим в негодность по каким-то иным причинам должна проводиться путем сбора материала в контейнер с последующим вывозом специализированными предприятиями. Класс опасности А (неопасные отходы лечебно-профилактических учреждений) СанПин 2.1.7.2970-10

Наименование и адрес предприятия-производителя/ организация принимающая претензии:

ЗАО «СтомаДент», 140070, Россия, Московская область, Люберецкий район, пгт. Томилино, улица Гаршина, дом 11.

Телефон/факс: +7(495) 514-93-47/48, 514-93-46. E-mail: info@stomadent.ru

Кузовов