

Копия верна:
Главный конструктор ОАО «Утес»

П.В. Кожевников
2011 г.



КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ
КМС-«Утес»

ЭТИКЕТКА
9П2.893.022 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кушетка медицинская смотровая КМС-«Утес» предназначена для размещения больных при проведении осмотров и процедур в лечебных медицинских учреждениях.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2 Основные технические данные

Таблица 1


Наименование параметра	Значение
Угол подъема подголовника	$60 \pm 5^\circ$
Габаритные размеры кушетки, мм, не более	1950x640x550
Масса кровати, кг, не более	30
Равномерно распределенная нагрузка, кг	145

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки кушетки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество	Примечание
Кушетка медицинская смотровая КМС-«Утес» в составе:	1	
Основание	1	
Подголовник	1	
Опора	1	
Ножка	1	
Ножка	1	
Монтажные части:	1	
Болт М10х40	6	
Винт 4х16	6	
Шайба пружинная 10	6	
Эксплуатационная документация		
Этикетка	1	

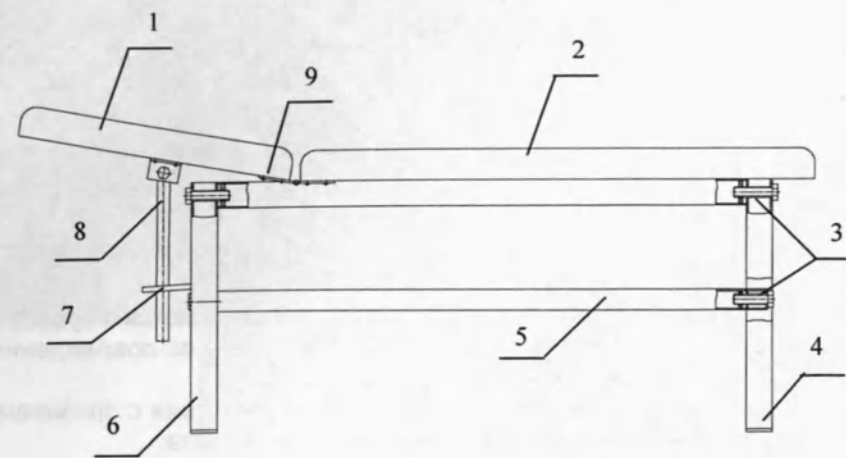

- 1 – подголовник
- 2 – основание
- 3 – болт с шайбой
- 4 – ножка
- 5 – опора

- 6 – ножка
- 7 – фиксатор
- 8 – стойка
- 9 – винт

Рисунок 1 Кушетка медицинская смотровая КМС-«Утес»

4 Подготовка к работе

4.1 Распакуйте кушетку, проверьте комплектность.

4.2 Произведите сборку кушетки в следующем порядке:

- положите основание 2 с подголовником 1 подушкой вниз не повреждая облицовочный материал;
- присоедините подголовник к основанию, для чего закрепите петли к подголовнику на намеченные отверстия с помощью винтов 9;
- закрепите ножки 4, 6 к основанию 2 с помощью болтов с шайбами 3;
- стяните ножки 4, 6 между собой опорой 5;
- переверните кушетку и поставьте на ножки;
- вставьте стойку 8 в фиксатор 7;
- проверьте фиксацию подголовника, для чего приподнимите подголовник 1 и перемещайте стойку 8 относительно фиксатора 7.

5 Сведения о дезинфекции

5.1 Наружные поверхности кушетки должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющих средств по ГОСТ 25644 или другим дезинфицирующим раствором.

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование

6.1.1 Транспортирование кушеток производится всеми видами крытых транспортных средств, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта допускаются перевозки от-крытым автотранспортом при условии предохранения от загрязнения и атмосферных осадков.

Транспортирование осуществляется в соответствии с перевозкой грузов, действующими на каждом виде транспор-

6.2 Хранение

6.2.1 Кушетки в упаковке изготовителя должны храниться в помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия климатических факторов в условиях хранения 2 по ГОСТ 15

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кушетки техническим условиям ТУ 9452-014-07565461-2011 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. с даты выпуска, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

8 Свидетельство о приемке

Кушетка медицинская смотровая КМС «Утес» соответствует техническим условиям ТУ 9452-014-07565461-2011 на годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____
число, месяц, год

М.П.

Начальник ОТК _____
подпись

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью на
4 (Четыре) листах
Подпись