


Копия верна:
Главный конструктор ОАО «Утес»

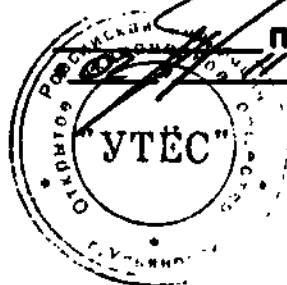

П.В. Кожевников
2011 г.

**КРОВАТЬ МЕДИЦИНСКАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РАЗБОРНАЯ
КММР-«Утес»**

**ЭТИКЕТКА
9П2.893.023 ЭТ**

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кровать медицинская металлическая разборная КММР-«Утес» предназначена для размещения больных в лечебных, реабилитационных, профилактических и санаторных учреждениях.

Вид климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2 Основные технические данные

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры кровати, мм, не более	1950x810x860
Расстояние от пола до рамы (ложе), мм	470
Масса кровати, кг, не более	45
Предельная нагрузка, кг	160

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки кровати должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество	Примечание
Кровать медицинская металлическая разборная КММР-«Утес» в составе:	1	
1. Рама (ложе)	1	
2. Ножка (спинка)	2	Поз.2,3,4 поставляются в сборе
3. Опора (подножник)	4	
4. Заглушка	4	
Эксплуатационная документация		
Этикетка	1	
Примечание – Кровати могут быть дополнительно укомплектованы мягким матрасом по заявке потребителя по отдельному договору.		

4 Устройство кровати

Ложе кровати – жесткое, конструктивно представляет собой металлическую раму с секциями из металлической сварной решетки (сетки).

Раму образуют продольные и поперечные прогоны, изготовленные из стальных равноплечных уголков.

Спинки кровати изготовлены из тонкостенных труб круглого сечения.

В ножки спинок вставлены опоры (подножники), а концы гнутых труб в спинках закрыты заглушками.

Ложе и спинки соединяются между собой с помощью клинообразных фиксаторов, обеспечивающих неподвижность соединения.

5 Подготовка к работе

5.1 Распакуйте кровать, проверьте комплектность.

5.2 Произведите сборку кровати, присоединив поочередно спинки к раме (ложе).

6 Сведения о дезинфекции

6.1 Наружные поверхности кровати должны быть устойчивы к многократной дезинфекции по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющих средств по ГОСТ 25644 или другим дезинфицирующим раствором.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование

7.1.1 Транспортирование кроватей производится всеми видами крытых транспортных средств, а также в контейнерах.

В пределах одного населенного пункта допускаются перевозки открытым автотранспортом при условии предохранения от повреждения, загрязнения и атмосферных осадков.

Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

7.2 Хранение

7.2.1 Кровати в упаковке изготовителя должны храниться в крытых помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия механических и климатических факторов в условиях хранения 2 по ГОСТ 15150.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям технических условий ТУ 9452-015-07565461-2011 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации – 18 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

9 Свидетельство о приемке

Кровать медицинская металлическая разборная КММР-«Утес» № _____ соответствует техническим условиям ТУ 9452-015-07565461-2011 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____

число, месяц, год

М.П.

Начальник ОТК _____

подпись

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на

3 (Три) листах

Подпись _____

