



Аппарат ИВЛ SIRIO BABY дополнительно имеет: ручку 21 (MIXER) и две регулировочные шкалы вокруг ручки 3 различного цвета.

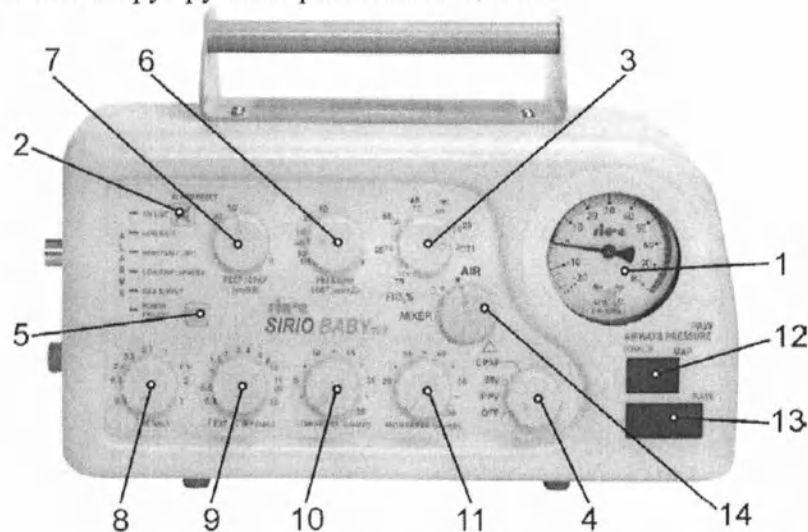

14 **MIXER** – позволяет выбрать процент кислорода или воздуха.

3 **FiO₂**: эта регулировочная ручка позволяет устанавливать концентрацию O₂ в диапазоне от 45% до 100% или концентрацию воздуха в диапазоне от 21% до 75%.

3.3 SIRIO BABY - Вид сбоку

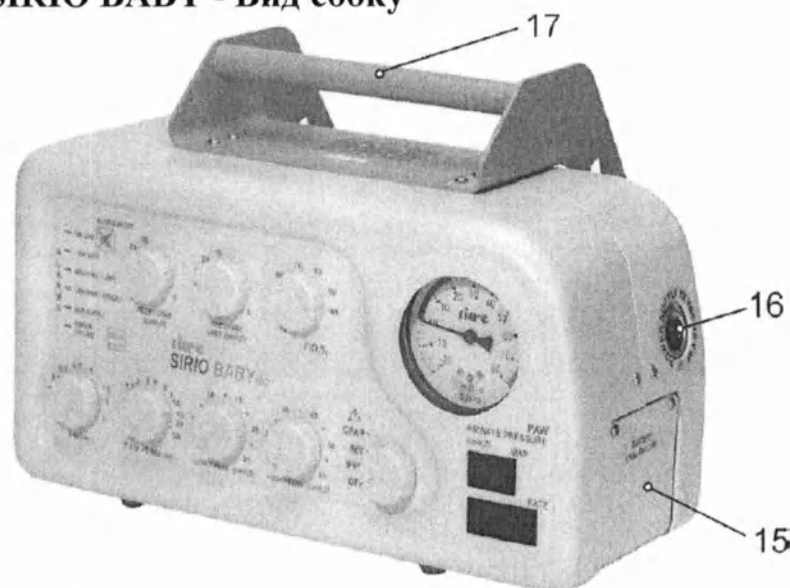

15 **Батарея:** Если убрать, то будут видны коробка предохранителей источника питания автомобиля и внутренняя батарея.

16 **Источник питания:** штепсель 12Vdc для подключения внешней батареи; например, батареи автомобиля скорой помощи.

17 **Ручка** для транспортировки и крепления на штанге 30x10мм