



Генеральный директор
ООО «Авангард»
/ Рябошапка О.В. /

«13» октября 2016 г.

Инструкция по применению

САЛФЕТКА СОРБЦИОННАЯ
СТЕРИЛЬНАЯ

ПО ТУ 9393–002–56176857–2015

производства ООО «Авангард»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Салфетка сорбционная стерильная по ТУ 9393–002–56176857–2015 предназначена для покрытия, очищения ран или царапин и впитывания их экссудата, абсорбирования выделений поверхности тела, вытирания излишков применения антисептических или дезинфекционных средств, а также для нанесения медикаментов местного действия в лечебно-профилактических учреждениях (далее по тексту – салфетка).

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Салфетка сорбционная стерильная по ТУ 9393–002–56176857–2015 в составе:

- салфетка сорбционная стерильная, размеров: 56х65, 60х60, 60х100, 65х100, 110х125, 115х130, 125х150, 130х150, 135х185, 140х190, 150х200
- инструкция по применению.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Салфетки изготавливаются штучными, многослойными, прямоугольной формы, путём вырубki (нарезания) из материала на основе нетканого полотна.

Салфетки изготавливаются стерильными, неокрашенными (естественного цвета нетканого материала) или различных цветов. За основной цвет принимается белый.

Салфетки изготавливаются различных размеров (Таблица 1).

Таблица 1

Размеры, мм	Количество полных слоев спанлейса (нетканого материала)	Толщина всех слоев изделия в сложенном состоянии ± 0.2 мм	Масса 1 шт., г
56х65	6	2.4	0,1
60х60	6	2.4	0,1
60х100	12	4.8	0,2
65х100	12	4.8	0,2
110х125	12	5.4	0,6
115х130	12	5.4	0,6
125х150	14	6.3	0,8
130х150	14	6.3	0,8
135х185	16	7.1	1,0
140х190	16	7.1	1,1
150х200	16	7.5	1,2

Предельные отклонения размеров салфеток по длине и ширине не превышают: со стороны до 100 мм ± 5 мм, со стороны свыше 100 мм ± 10 мм. Разность длин диагоналей не должна превышать ± 5 мм.

Стерилизация салфеток обеспечивается лучевым методом стерилизации с применением ионизирующего излучения.

Степень адгезии салфеток к модели раневой поверхности не хуже установленной для марли медицинской. Сорбционная ёмкость салфеток не менее 1 капли на см². Время смачивания не превышает 10 с.

Для изготовления салфеток используются нетканое полотно «спанлейс» (производства ООО «Авангард») или иные нетканые, текстилеподобные или бумагоподобные материалы плотностью от 30 до 50 г/м². Разрывная нагрузка полотна: по длине – от 46,14 до 267,8 Н, по ширине – от 10,49 до 59,5 Н.

Проницаемость для воздуха (воздухопроницаемость) при давлении 5 мм вод. ст. должна быть 1500±50 дм³/м²с.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Салфетки должны применяться в строгом соответствии с инструкцией изготовителя. Салфетки должны быть использованы сразу после вскрытия упаковки. Повторному применению салфетки не подлежат.

Порядок работы. Действие.

Салфетка обладает сорбционной способностью, обеспечивает комфортное и безболезненное прилегание и снятие с раневой поверхности. Простота и удобство в обращении доказали незаменимость салфетки в экстремальных ситуациях. Благодаря многослойности, салфетки впитывают и удерживают влагу внутри таким образом, что через 10 минут после использования внешняя поверхность становится сухой. Исключают болевые ощущения при перевязке. Салфетка проницаема для воздуха, мягкая, драпируется. Частота смены салфетки зависит от раны.

Показания к применению

Покрытие, очищение ран или царапин и впитывания их экссудата, абсорбирование выпотов поверхности тела; после обработки кожи инъекционного поля антисептическими или дезинфекционными средствами перед забором общего анализа крови, анализа крови на сахар; после обработки локтевых сгибов доноров антисептическими или дезинфекционными средствами; перед введением прививки Манту; при проведении плазмафереза и гемодиализа; перед введением инсулина; для последующей обработки пкровного стекла, для обработки анализаторов, для нанесения медикаментов местного действия в лечебно-профилактических учреждениях.


Противопоказания

Аллергические реакции.

Способ применения.

Не нарушая стерильности, вскрыть пакет, извлечь салфетку, наложить на нужный участок тела. При использовании салфеток при лечении гнойно-некротических ран необходима предварительная очистка ран обычными методами.

Использование

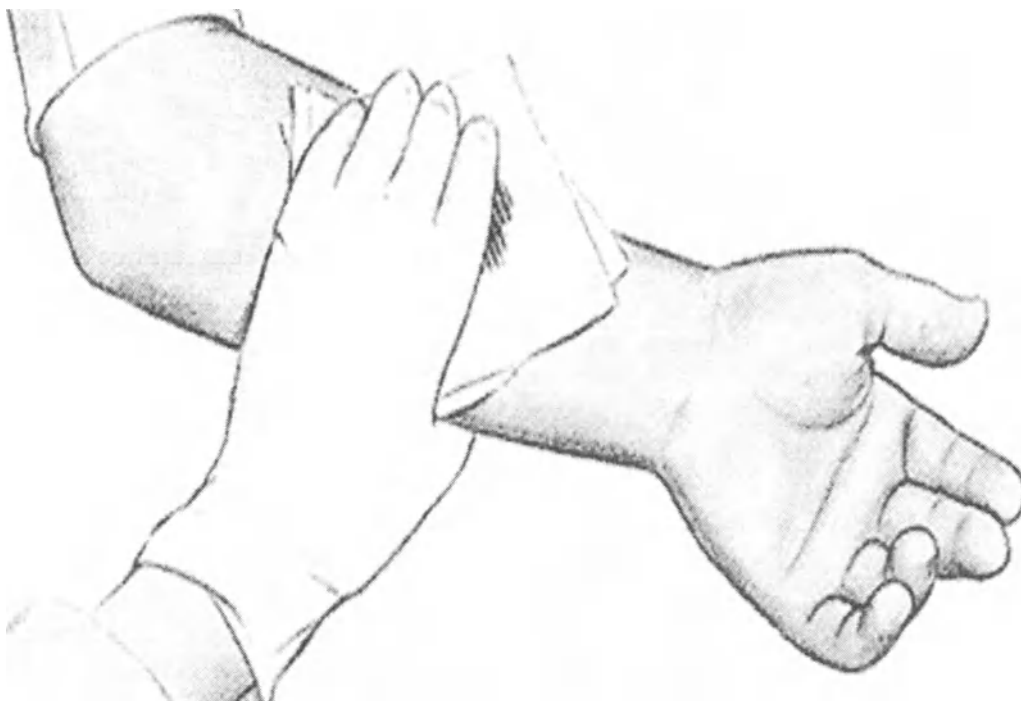

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1 Условия эксплуатации

Салфетки пригодны для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 40 °С, относительной влажности не выше 80% при температуре 25 °С и атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа.

Не допускается контакт салфеток с открытым пламенем и нагревательными приборами.

5.2 Маркировка

Маркировка содержит следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- адрес предприятия-изготовителя;
- обозначение салфеток по техническим условиям;
- размеры;
- дату изготовления (месяц, год);
- гарантии изготовителя;
- указания по утилизации;
- слово «стерильно»;
- слова «однократного применения» или «одноразового пользования».

Допускается приводить дополнительную информацию, в т. ч. рекламного характера.

5.3 Упаковка

Упаковка обеспечивает сохранение стерильности салфеток.

Салфетки упаковываются поштучно или по несколько штук. При складывании салфеток их продольные и поперечные края загнуты вовнутрь так, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность кожного покрова или раны.

В качестве потребительской упаковки могут использоваться герметично завариваемые пакеты из комбинированного многослойного материала.

Вскрытие упаковки должно обеспечиваться без применения режущего инструмента.

Салфетки в потребительской упаковке могут укладываться в ящики из гофрированного картона. Масса брутто ящика не превышает 20 кг.

Допускается применять другие виды упаковочных средств, в т. ч. изготавливаемые по чертежам предприятия-производителя изделий, обеспечивающие их сохранность.

5.4 Транспортировка

Транспортирование продукции осуществляется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура – от -50 до $+50^{\circ}\text{C}$;
- влажность: до 100% при 25°C .

При погрузке, выгрузке и транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие салфетки от повреждений и загрязнений.

5.5 Хранение

Готовые салфетки хранят в закрытых сухих складских помещениях в условиях, исключающих вероятность воздействия влаги и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 м от источников огня и нагревательных приборов, при температуре от минус 10 до плюс 35°C и относительной влажности не более 95%.

При хранении должны быть приняты меры, предохраняющие салфетки от повреждений и загрязнений.

5.6 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие салфеток требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.7 Сведения об утилизации

Салфетки и материалы, используемые при их изготовлении, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды как в процессе эксплуатации, так и после ее окончания.

Утилизация осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 (по классу Б, принимая по загрязнённым кровью материалам) и СП 2.1.7.1386.

По вопросам утилизации обращаться: ООО «Авангард», фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 18; тел./факс: (812) 611-05-80, e-mail: quality-tosno2011@mail.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Отметка о продаже

Категория изделия _____

Производитель _____

Штамп
продавца

Дата продажи _____

Организация продавец _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет.

С правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

Гарантийный срок хранения – не менее 5 лет со дня изготовления.

По вопросам гарантии обращаться: ООО «Авангард», фактический адрес: 195009, Санкт-Петербург, Свердловская набережная, д. 18; тел./факс: (812) 611-05-80, e-mail: quality-tosno2011@mail.ru

ВНИМАНИЕ! Следите за правильным заполнением гарантийного талона. Все графы талона (за исключением граф для производителя/поставщика) должны быть заполнены. При неточном или неполном заполнении талона гарантия на изделие считается утраченной.

Гарантия производителя осуществляется в соответствии с ГК РФ на общих основаниях.

Изделие не должно носить следов механического или термического воздействий, а также следов воздействия различных химических агентов. Применение изделия допускается только в соответствии с инструкцией по применению к изделию.

Отметка производителя/поставщика

Дата	Описание	Гарантийный центр

