

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БИОМЕДИКАЛ»
Скоромнов И.В.
«17» 04 2006г.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Салфеток защитных влагонепроницаемых одноразовых

1. НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетки предназначены для применения в целях профилактики внутригоспитальной инфекции и обеспечения защиты постельного белья, каталок, перевязочных столов и другого инвентаря от загрязнения экссудатом и физиологическими выделениями человека в условиях разового использования. Салфетки могут применяться в больницах, диспансерах, при амбулаторном приеме больных и в быту.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Салфетки изготовлены из бумаги ламинированной по ТУ 5463-066-00278959-2004 или ТУ 5463-065-00278959-03.

Салфетки выпускаются 4-х типоразмеров: $(670 \times 650) \pm 20$, $(670 \times 1200) \pm 20$, $(670 \times 2100) \pm 20$, $(335 \times 480) \pm 20$.

Салфетки выпускаются двух видов – стерильные и нестерильные

Поверхность салфетки должна быть без разрывов и складок. Допускается наличие пятен площадью 0,1% от площади изделия и малозаметные складки, которые не портят товарный вид изделия.

Не допускается отсутствие полиэтиленового покрытия на поверхности двухслойного материала.

Салфетка стерильная должна быть упакована в индивидуальную упаковку из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82. Пакет должен быть заварен.

Салфетки в индивидуальной упаковке в количестве по 5 штук и этикетку упаковывают в групповую упаковку из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82. Пакет должен быть заварен.

Салфетки нестерильные в количестве 5 штук должны быть упакованы в групповую упаковку из пленки полиэтиленовой по ГОСТ 10354-82. Пакет должен быть заварен.

Салфетки в транспортной упаковке должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов для группы условий хранения 5 (ОЖ 4) ГОСТ 15150-69.

Средний срок годности салфеток 5 лет для нестерильных, 4 года для стерильных.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказания к применению данного изделия не выявлено.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

- вымыть руки перед использованием изделия;
- вскрыть упаковку
- извлечь необходимое количество.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- использовать по назначению непосредственно исходя из ситуации и необходимости.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Салфетки должны храниться в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация ИМН производится путем сжигания.

Зав. отделом маркетинга, к.т.н.



Зыкова С.В.