



Утверждаю

Директор по качеству ОАО «Синтез»

Л.Н.Пшеничникова

«*декабрь*» 2015г.

Инструкция по применению медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ®** **МАЛЫШ**

Регистрационное удостоверение: _____

Торговое наименование: **МОРЕНАЗАЛ®**

Описание: средство для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** представляет собой полимерный флакон с пробкой-капельницей, герметично закрытый завинчивающейся пластиковой крышкой объемом 5, 10, 15, 20 мл, содержит стерильный раствор натуральной морской соли, представляющий собой прозрачную бесцветную жидкость без запаха с солоноватым вкусом. Не содержит химических добавок и консервантов.

Состав: в 100 мл изотонического раствора содержится 1,08г морской соли (в пересчете на сухое вещество) и до 100мл воды для инъекций

В 100мл раствора содержится:

Натрий	не менее 2,5 мг/мл
Магний	не менее 0,35 мг/мл
Кальций	не менее 0,008 мг/мл
Калий	не менее 0,10 мг/мл
Гидрокарбонаты	не менее 0,03 мг/мл

Входящие в состав средства для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** микроэлементы и минералы морской соли оказывают увлажняющее, противовоспалительное действие, стимулируют восстановительную и защитную функции мерцательного эпителия верхних дыхательных путей, что улучшает носовое дыхание и усиливает сопротивляемость слизистой оболочки полости носа болезнетворным бактериям и вирусам.

Назначение средства для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ:**

Предназначено для ежедневного промывания, очищения и увлажнения слизистой носа, профилактики и комплексного лечения насморка и других заболеваний верхних дыхательных путей, восстановления свободного носового дыхания:

- удаляет избыточную слизь, содержащую аллергены, болезнетворные микробы, вирусы, пыль и другие факторы воспаления при насморке, размягчает и удаляет корочки из носовых ходов;
- способствует размягчению и удалению чешуек и корок после хирургических операций в полости носа и околоносовых пазух без риска кровотечения;
- увлажняет слизистую оболочку полости носа ребенка;
- способствует облегчению дыхания при насморке.

После промывания полости носа **средством для орошения и промывания полости носа для детей МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** повышается терапевтическая эффективность лекарственных средств, наносимых на слизистую оболочку полости носа, снижается риск распространения инфекции в околоносовые пазухи и полость уха.

Показания к применению средства орошения и для промывания полости носа для детей МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ:

- Профилактика и комплексное лечение острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических):
 - острые и хронические риниты (насморк, в том числе насморк при прорезывании зубов);
 - острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит, фронтит);
 - острые и хронические аденоидиты;
 - аллергические и вазомоторные риниты.
- Профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций.
- После хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух.
- Сухость слизистой носа у грудного ребенка при узких носовых ходах.
- Подготовка к введению в полость носа лекарственных средств.
- Ежедневная гигиена полости носа и носоглотки ребенка.

Противопоказания: гиперчувствительность к элементам раствора.

Применение при беременности и кормлении грудью:

Беременность и кормление грудью не являются противопоказаниями для применения.

Меры предосторожности:

- не использовать изделие, если целостность упаковки нарушена или повреждена;
- изделие использовать строго по назначению;
- не стерилизовать наконечник пробки-капельницы;
- не применять при гиперчувствительности к элементам раствора;
- не применять после истечения срока годности.

Подготовка к работе и порядок работы: Подготовка и проведение промывания средством для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** осуществляется с соблюдением общепринятых правил гигиены.

Рекомендации по применению: средство для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** разрешено к применению с первого дня жизни.

Применяется интраназально.

Для комплексного лечения: детям с первого дня жизни до 1 года по 1-2 капли в каждый носовой ход 3 раза в день, детям от 1 года до 7 лет по 2 капли в каждый носовой ход 4 раза в день, детям старше 7 лет по 2 капли в каждый носовой ход 4-6 раз в день.

В целях ежедневной гигиены и профилактики: по 1-2 капли в каждый носовой ход 1-2 раза в день.

Для размягчения и удаления выделений из носа средство для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** закапывают в каждый носовой ход в необходимом количестве, удаляя остаток жидкости, вытекающей из носа, одноразовым платком или ватным шариком. Процедуру можно повторять до тех пор, пока выделения, скопившиеся в носовом проходе, не будут размягчены и удалены.

Детям до 2х лет промывание проводится в положении лежа:

- повернуть голову ребенка набок
- отвинтить пластиковую крышку с пробки-капельницы
- нажать на пробку-капельницу до появления капли
- осторожно поместить наконечник пробки-капельницы в основание носового хода, находящегося сверху, закапать необходимое количество капель в ноздрю
- устранить вытекающий избыток жидкости с помощью ваты или носового платка
- повторить процедуру для другого носового хода

Для детей старше 2х лет:

- наклонить голову набок
- отвинтить пластиковую крышку с пробки-капельницы
- нажать на пробку-капельницу до появления капли
- осторожно поместить наконечник пробки-капельницы в основание носового хода, находящегося сверху, закапать необходимое количество капель в ноздрю
- устранить вытекающий избыток жидкости с помощью ваты или носового платка
- повторить процедуру для другого носового хода

Длительность применения не ограничена.

Побочные действия: не выявлены

Взаимодействий с лекарственными препаратами: не отмечено.

Срок годности со дня изготовления: 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения со дня изготовления : 3 года.

Условия хранения: Хранить в упаковке от производителя, флакон без упаковки должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей, в недоступном для детей месте, при температуре от +5°C до +25°C.

Утилизация изделия должна проводиться согласно документам, регламентирующим обращение с медицинскими отходами (СанПин 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами). Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Условия транспортировки: средство для орошения и промывания полости носа для детей **МОРЕНАЗАЛ® МАЛЫШ** транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок при температуре от 5°C до 25°C.

Гарантия производителя: производитель гарантирует соответствие изделия требованиям национальных стандартов и технических условий № 9398-151-00480201-2015 в течение всего срока годности при условии соблюдения правил транспортировки, хранения и условий эксплуатации, установленных производителем.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Претензии от покупателей принимает предприятие-производитель:

Открытое акционерное общество «Акционерное Курганское общество медицинских
препаратов

и изделий «Синтез» (ОАО «Синтез»).

640008, Россия, г. Курган, проспект Конституции, 7, тел/факс (3522) 48-16-89

morenazal.ru