

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ЗАО «Дельрус»



Ермаков В.Н.

2011г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Магистралы для аспирации и антикоагуляции крови,
варианты исполнения: 1400E, 1500-LL, 1500-BB

(наименование изделия медицинского назначения)


Магистралы для аспирации и антикоагуляции крови, исполнения: 1400E, 1500-LL и 1500-BB.

Назначение:

Магистралы для аспирации и антикоагуляции крови, исполнения: 1400E, 1500-LL и 1500-BB к аппарату OrthoPAT для реинфузии фирмы «Haemonetics» предназначены для проведения протоколов интраоперационного сбора крови из операционной раны, обработки её антикоагулянтом и постоперационного сбора крови из раневых дренажей, для последующей отмывки на аппарате OrthoPAT для дальнейшей реинфузии.

Состав и описание:

Магистралы для аспирации и антикоагуляции крови, исполнения: 1400E. Служит для сбора излившейся крови из операционного поля, обработки её раствором антикоагулянта и доставки в коллекторный резервуар. Представляет собой двухпросветную магистраль, состоящую из линии аспирации и линии антикоагуляции, на аспирационном конце которой находится камера смешивания крови с раствором антикоагулянта. Линия антикоагуляции оснащена пластиковой иглой для подключения к мешку с антикоагулянтом, капельной камерой и роликовым регулятором потока антикоагулянта. Коллекторный конец магистралы безрезьбовой для присоединения к резервуарам жёсткого типа.

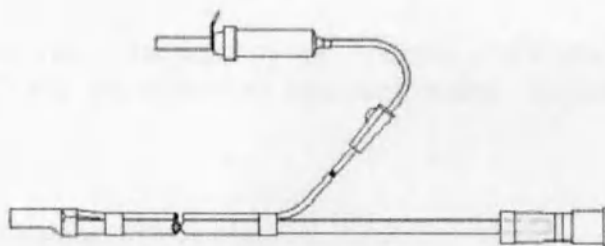

Магистралы для аспирации и антикоагуляции крови, исполнения: 1400E, 1500-LL и 1500-BB для послеоперационного сбора крови из раневых дренажей. Представляет собой магистраль, аспирационный конец которой имеет разветвитель на три линии, оснащённые коннекторами для присоединения к трём дренажным трубкам и порт для введения препаратов (антикоагулянта при необходимости). Резервуарный конец оснащён съёмным коннектором типа Luer или Boga для герметичного присоединения к соответствующим ёмкостям, при отсоединении данного коннектора резервуарный конец прикрепляется к коллекторному резервуару магистралы аутотрансфузионной.



- 1) Перед процедурой реинфузии интраоперационная магистраль аспирации и антикоагуляции в стерильных условиях достаётся из внешней упаковки и укладывается на стол операционной медсестры.
- 2) При возникновении необходимости реинфузии операционная сестра освобождает магистраль от стерильной упаковки, и подаёт хирургу. Хирург закрепляет на операционном белье специальными зажимами линию всасывания и надевает аспирационный наконечник (в комплект

не входит и выбирается хирургом в зависимости от профиля операционной).

- 3) Линия к источнику антикоагулянта передаются хирургом оператору аппарата OrthoPAT
- 4) Оператор аппарата OrthoPAT подключает линию антикоагулянта к мешку с раствором.
- 5) Регуляция скорости введения антикоагулянта осуществляется роликовым зажимом под визуальным контролем через капельную камеру.
- 6) По окончании интраоперационного сбора крови, интраоперационная линия аспирации и антикоагуляции отсоединяется. На коннектор резервуара надевается заглушка. Утилизация происходит в соответствии с регламентом медучреждения.
- 7) К установленным дренажам подсоединяется послеоперационная линия аспирации. Колпаки коннекторов обрезаются по диаметру установленных дренажей. Дренаж вставляется в коннектор. К резервуарному концу герметично присоединяется ёмкость с соответствующим разъёмом Luer или Bore. Зажимы на подключенных линиях открываются. Большой и аппарат для реинфузии транспортируются в палату послеоперационного наблюдения.
- 8) В палате послеоперационного наблюдения коннектор Luer или Bore отсоединяются, линия аспирации подключается к резервуару коллекторному аппарата для реинфузии. При необходимости антикоагуляции или введения иных препаратов, зажим основной линии перекрывается, препарат вводится через специальный коннектор.
- 9) По окончании процедуры реинфузии линия аспирации не отсоединяется от магистралей, все использованные расходные материалы отправляются на утилизацию единым комплексом.

Противопоказания для аппаратной реинфузии:

Наличие в излившейся крови посторонних химических веществ (антибиотиков, антисептиков и прочее см. инструкцию к аппарату для реинфузии), сепсис.

Условия хранения:

Предохранять от попадания прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от -20 до + 50С. Не нарушать герметичность. После извлечения из упаковки набор должен быть использован в течение 24 часов.

Срок годности: 3 года.

Срок годности обозначен на упаковке. Не применять после истечения срока годности!

Наименование, адрес местонахождения завода-изготовителя:

1. ATS Medizintechnik GmbH,
Weselstr. 78, D-46565 Voerde, Germany

