


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

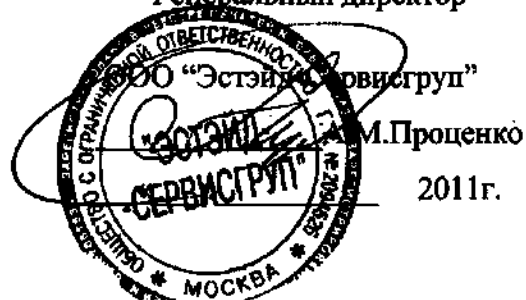

М.Проценко

2011 г.

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ**

**МАТЕРИАЛ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЯХ:
«ДИСИЛАН» и «ДИСИЛАН +»
по ТУ 9391-006-59004022-2011**

Г.Москва
2011 г.

1. Общие сведения.

Область применения – общая медицина и стоматология.

«Дисилан» и «Дисилан+» применяется для местной анестезии слизистой оболочки до инъекции; поверхностной анестезии при удалении молочных зубов; удалении подвижных зубов; вскрытии абсцессов; удалении зубного камня.

В состав материала входит такой известный анестетик как бензокаин, оказывающий глубокое и быстрое временное анестезирующее воздействие на обрабатываемую поверхность, тем самым, исключая болевые и неприятные ощущения при проведении работ. Ароматические добавки, входящие в состав, придают приятный запах и вкус.

2. Способ применения

Предварительно подсушить обрабатываемую поверхность слизистой оболочки полости рта. Возьмите необходимое количество геля и смажьте препаратом нужное место на слизистой оболочке. Для достижения более глубокой анестезии следует нанести гель на ватный тампон, а затем этим тампоном обработать подготовленную поверхность. При необходимости тампон можно приложить к обрабатываемому месту и оставить на некоторое время (1-2 мин.) до получения желаемого эффекта.

2. Комплектация.

«Дисилан» выпускается в виде геля.

«Дисилан+» выпускается в виде жидкости.

«Дисилан» и «Дисилан+» могут комплектоваться в двух видах поставки.

В состав комплекта входят:

Вид поставки-1:

- «Дисилан» гелеобразный в упаковке (банка (контейнер) по ГОСТ Р 51760) – 1 шт;
- этикетка – 1 экз.

В состав комплекта входят:

Вид поставки-2:

- «Дисилан+» жидкий в герметичной пластиковой бутылочке упаковка – 1 шт.
- этикетка – 1 экз.

По требованию заказчика «Дисилан» и «Дисилан+» могут поставляться в другой комплектации и упаковке по выбору заказчика.

4. Упаковка.

«Дисилан» и «Дисилан+» одного вида поставки должны быть уложены в пластиковый контейнер (банка по ГОСТ Р 51760 или герметичную пластиковую банку).

В качестве транспортной тары должны применяться ящики из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Количество упаковок геля определяет предприятие-изготовитель по согласованию с заказчиком.

5.Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие геля требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения геля – 2 года со дня изготовления.

После вскрытия целесообразно употребить гель в течение 1 года.

6.Транспортирование и хранение.

«Дисилан» и «Дисилан+» транспортируют всеми крытыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данных видах транспорта.

Условия транспортирования в диапазоне температур от +4°C +25°C.

«Дисилан» и «Дисилан+» в упаковке производителя должны храниться в диапазоне температур от минус 5°C до + 40°C.

«Дисилан» и «Дисилан+» необходимо хранить вне зоны досягаемости детей.

Предохранять от контакта с глазами.

Пронумеровано, проинуровано и
скреплено печатью

Процесс

