

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «БУФА»



А.А.Букин

ИНСТРУКЦИЯ

по применению внутриканальных анкерных штифтов и инструментов для их установки.

Штифты анкерные внутриканальные предназначены для установки в подготовленный канал зуба с целью реставрации разрушенных твердых тканей зуба и последующего клинического лечения.

Штифты анкерные должны соответствовать требованиям технических условий ТУ 9437-001-71919014-2010.

Материалы, применяемые для изготовления штифтов должны соответствовать следующему: титановые штифты - титановый сплав ВТ-6С ГОСТ 19807-94 и латунь Л63 ГОСТ 1066 с покрытием гальваническим золотом 1-3мкм.

Противопоказания к применению - индивидуальная непереносимость, аллергия на материалы из которого изготовлен применяемый штифт. Выраженных противопоказаний нет.

При подготовке к установке в подготовленный канал штифты не должны контактировать с кожей пальцев и рук, в противном случае могут быть смочены жирами, а это отрицательно повлияет на силу связки. Необходимо использовать перчатки при работе со штифтами.

Порядок установки изделия

Для подготовки канала используйте дрель расширительную и развёртку, соответствующую по размеру выбранному штифту.

Корневой канал должен быть расширен и углублен до необходимой длины. Избегайте отклонения от оси зуба.

Используйте ключ, чтобы установить штифт в канал с целью уточнения длины штифта. После этого выньте штифт.

После очистки и просушки канала и штифта, штифт погружается в цемент и устанавливается на место.

Штифты, установленные в мезиальные и дистальные каналы, обеспечивают наилучшую их фиксацию. А сами штифты создают дополнительные возможности, благодаря широкому выбору размеров.

Штифты в упаковке производителя должны храниться в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 в диапазоне температур - + 40С до +40 °С.