

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ОРТО-МЕД»

Крохалев В.Ю.

«20» августа 2013 г.



Инструкция по эксплуатации

СТЕЛКИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОРРЕГИРУЮЩИЕ

ОС-1 по ТУ 9396-012-49105561-2013

Назначение.

Стельки предназначены для полного или частичного восстановления опорно-двигательных функций стопы при статической недостаточности стоп детей, подростков и взрослых.

Изделие применяется по назначению врача. Стельки выпускаются следующих размеров (таблица 1).

Таблица 1

Половозрастная группа пациентов	Размеры стопы, мм
Детская	105-110-115-120-125-130-135-140-145-150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225-230-235-240
Женская	220-225-230-235-240-245-250-255-260-265-270
Мужская	250-255-260-265-270-275-280-285-290-295-300-305
Примечание - независимо от размера стопы к детской группе относятся пациенты до 18 лет, к мужской и женской - старше 18 лет	

! Внимание : стельки рассчитаны для применения пользователем с массой тела до 100 кг.

Стельки изготовлены: вспененный полиэтилен марки ППЭ-1М ТУ 2246-001-10489953 (верх стельки), ЭВАПЛАСТ марки ЭШ-2 СТО 8742-016-00300209-2014 (низ стельки) Комбинация материалов низа и верха стельки может быть выполнена и в обратном порядке: низ стельки- вспененный полиэтилен марки ППЭ-1М , верх стельки - ЭВАПЛАСТ марки ЭШ-2.

Показатели статической и циклической нагрузки

Стельки выдерживают статические и циклические нагрузки, значения которых установлены в таблице 2, не утрачивая работоспособности.

Таблица 2

Масса пользователя, кг	Значения нагрузки, Н		Число циклов
	статической	циклической	
60	1200	800	3·10
80	1600	1050	3·10
100	1800	1300	3·10

Показания.

Назначается детям, подросткам и взрослым при статической недостаточности стоп:

- продольное плоскостопие;
- поперечное плоскостопие;
- комбинированное плоскостопие(продольно-поперечное).

Противопоказания к назначению данного пособия

Противопоказано использование стелек при динамической недостаточности стоп (врожденных или ампутационных дефектах стоп, укорочении нижней конечности).

Побочные действия отсутствуют.

Методика применения

Изделие вкладывается в обувь клиента. Стельки носят в обуви на низком или среднем каблуке с закрытой носочной и пяточной частью. Изделие занимает дополнительный объем в обуви, поэтому рекомендуется выбирать обувь позволяющую свободно вкладывать стельки и не стеснять объемные параметры стопы. Обувь со стельками должны создавать комфорт для стопы пациента. Сроки и интенсивность эксплуатации должна определяться врачом.

Уход за изделием

Не допускается соприкосновение с острыми предметами, красящими веществами, растворителями. Влажная обработка при температуре до 40°, нейтральными растворами моющих средств или раствором детского мыла, с последующим промыванием в проточной воде. После промывания насухо протереть чистой хлопчатобумажной тканью. Не хранить вблизи отопительных приборов.

Уход за кожными покровами

Ежедневно, после применения стелек, необходимо проводить гигиеническую обработку кожных покровов стопы теплой водой с мылом с последующим массажем ее (при отсутствии противопоказаний к нему). По назначению лечащего врача, ежедневно выполнять комплекс общеукрепляющих и специальных гимнастических упражнений.

Транспортирование и хранение

Транспортирование стелек проводить любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании стелек должны быть обеспечены целостность и сохранность транспортной упаковки от загрязнений, механических повреждений и атмосферных осадков.

Хранение стелек должно производиться на стеллажах в закрытых сухих помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре не ниже плюс 15 и не выше плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 % с защитой от воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние хранящихся вкладышей от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1 м.

Гарантия 30 дней со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию.
Срок службы 6 месяцев со дня выдачи готового изделия.
Срок сохраняемости 6 месяцев

Изменение размеров пациента, изменения назначения врача не являются основаниями для выполнения гарантийных обязательств по

изделию. Изделие является изделием медицинского назначения и сдаче, замене, повторному использованию не подлежит. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении пациентом условий эксплуатации, необходимо обратиться на предприятие-изготовитель для проведения бесплатного ремонта или замены.

Утилизировать стельки –совместно с твердыми бытовыми отходами.

Производитель: ООО «ОРТО-МЕД», 454119 Челябинская область,
г. Челябинск, улица Аптечная 6а, тел: 89517713406

Директор
ООО «ОРТО-МЕД»



Прошито и пронумеровано
листов 4
Директор
ООО «ОРТО-МЕД» Крохалев В.Ю.

