



ПАСПОРТ

ред.2

КРПФ.942715.0107 ПС

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ»

Регистрационное удостоверение №ФСР 2011/10034 от 09.06.2016 г.

1. Назначение изделия

1.1 Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» (далее по тексту «штатив») предназначен для размещения пробирок различного назначения диаметром 13+17 мм, высотой 75 - 170 мм и пробирок диаметром 8÷11 мм, высотой 30 - 75 мм.

Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» рассчитан на размещение пробирок, используемых в лабораторной практике: пробирки цилиндрические (биологические), пробирки конические (в том числе центрифужные), вакуумные пробирки.

2. Основные параметры



Отверстие
комбинированное для
пробирок разного
диаметра



Буквенные (А...Е) и
числовые (1...10)
обозначения

Рис.1

2.1 Габаритные размеры (длина х ширина х высота) не более 260х140х70 мм

2.2 Масса не более 0,25 кг.

2.3 Штатив выполнен из полимерного материала: полипропилена.

2.4 Штатив выдерживает обработку паровым методом (автоклавирование) при температуре 121°C и обрабатывается любыми разрешенными в России дезинфицирующими средствами в соответствии с МУ №287-113 «Методические указания по дезинфекции, стерилизации изделий медицинского назначения».

2.5 Срок службы не менее 3-х лет.

3. Комплектность

3.1 Штатив – 1 шт.

3.2 Паспорт – 1 шт.

4. Подготовка и порядок работы

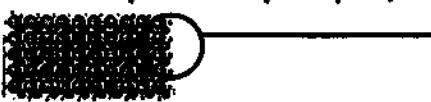
4.1 Провести распаковку транспортировочной тары, протереть штатив марлей, смоченной дезинфицирующим раствором, затем чистой водой. Удалить остатки воды и высушить штатив.

4.2 Перед началом и по окончании работы провести обработку штатива в соответствии с действующими методическими указаниями МУ №287-113 и инструкциями по применению конкретных дезинфицирующих средств, разрешенных в РФ, ополоснуть водой и высушить.

5. Устройство

5.1 Штатив цельнолитой, трехъярусный Z-образной формы. Количество отверстий - 50. Отверстия верхнего яруса штатива комбинированные, имеют форму «восьмерок», образованных из двух отверстий различного диаметра: 18 и 11,2 мм. По периметру верхнего яруса штатива имеются буквенно-числовые обозначения для обеспечения идентификации образцов в пробирках. Максимальное количество пробирок различного диаметра – 100 штук.

Варианты использования штатива:

1. 50 пробирок $\varnothing 13+17$ мм; $h=75+170$ мм 	2. 50 пробирок $\varnothing 8+11$ мм; $h=40$ мм 
3. 50 пробирок 25 пробирок $\varnothing 13+17$ мм; $h=75+170$ мм 25 пробирок $\varnothing 8+11$ мм; $h=40$ мм 	4. 100 пробирок 50 пробирок $\varnothing 13+17$ мм; $h=75+170$ мм 50 пробирок $\varnothing 8+11$ мм; $h=40$ мм (в одно отверстие 2 пробирки). 

6. Указания по технике безопасности

6.1 К работе по дезинфекции и стерилизации допускаются лица, ознакомленные с действующими правилами техники безопасности при работе с конкретными дезинфицирующими средствами.

7. Утилизация

7.1 Утилизация штатива после истечения срока службы должна производиться в соответствии с утвержденными нормативно-правовыми актами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

8. Свидетельство о приемке

8.1 Штатив для пробирок универсальный ШПУ-«КРОНТ» соответствует техническим требованиям ТУ 9452-037-11769436-2010 и признан годным к эксплуатации.

Год изготовления _____ Дата продажи _____

Подпись _____

Штамп предприятия

9. Правила транспортирования и хранения

9.1 Штатив в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться при следующих условиях: Температура окружающей среды $-50^{\circ}\text{C} + +50^{\circ}\text{C}$; Относительная влажность воздуха 100% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$. При более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной.

9.2 Штатив должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в соответствии с указанной на упаковке маркировкой. Допускается транспортирование всеми видами транспортных средств при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 98% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$.

10. Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок службы 12 мес. с даты продажи. гарантийный срок хранения - 12 мес. При обнаружении дефекта в гарантийный период дефектное изделие заменяется. Дефектное изделие и акт о наличии дефекта направляются на предприятие-изготовитель АО «КРОНТ-М».

Адрес предприятия – изготовителя АО «КРОНТ-М»: Россия. 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская, д.9, пом.1. (495) 500-48-84 (многоканальный), info@kront.com,
Internet: www.kront.com

