

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная компания «САНИТАС»
ООО «НПК «САНИТАС»
191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер, д. 13, оф.6
Тел: +7(812) 670-80-80

Руководство по эксплуатации

**Уборы головные медицинские одноразовые из нетканых материалов по
ТУ 9398-003-96750898-2015 в следующих исполнениях
(см. Приложение А)**

Описание: Уборы головные в общем виде должны представлять собой изделие, изготовленное из нетканых материалов, состоящее из одного слоя, круглой формы с креплениями в виде резинок (у шапочек-колпаков – в виде завязок).

Область применения: Уборы головные могут применяться в медицинских учреждениях, косметологических салонах, соляриях и т.д., а также учреждениях общественного питания.

Назначение: Предназначены для одноразового использования в лечебных учреждениях, для защиты головы медицинского персонала и пациентов от попадания микроорганизмов, биологических жидкостей и микрочастиц.

Показания к применению: Медицинские головные уборы используются, как для защиты волос от загрязнения, так и для защиты помещения от мелких частиц с головы.

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения):

1. Вскрыть упаковку.
2. Достать шапочку и расправьте складки.
3. Одеть шапочку. Обратите внимание, чтобы волосы были полностью покрыты шапочкой.
4. После использования выбросить в мусор.

Меры предосторожности при эксплуатации: Не использовать изделие повторно (только для одноразового использования). При нарушении целостности упаковки не использовать по назначению.

Запрещается использовать изделие, если: Истёк допускаемый срок хранения изделия, указанный на упаковке, либо отсутствует информация о конечном сроке хранения, нарушена целостность упаковки, упаковка находится во влажном состоянии (подмочена), категорически запрещается вторичное использование изделия.

Побочные действия/Противопоказания: не выявлены

Размеры/технические характеристики и состав: см. приложение Б.

Комплект поставки: В комплект поставки уборов головных должны входить собственно уборы головные в количестве 1, 3, 5, 10, 15, 25, 50, 100 шт. в картонной упаковке или 50 шт. в полиэтиленовой упаковке.

Утилизация или уничтожение: После использования, истечения срока годности, а также в случае повреждения упаковки и невозможности использовать изделие по назначению, они должны быть утилизированы. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующих Санитарных Правил и Норм Российской Федерации по обращению с медицинскими отходами, Методических указания по дезинфекции, предстерилизационной подготовке и стерилизации медицинских изделий.

Маркировка: Потребительская маркировка содержит следующую информацию: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак (при его наличии); адрес предприятия-изготовителя; наименование заказчика и его товарный знак (при его наличии);

наименование продукции с указанием количества слоёв; количество масок в упаковке; дату изготовления (год, месяц); срок хранения; номер и дату выдачи регистрационного удостоверения; обозначение настоящих технических условий, а также иную информацию, включая информацию рекламного характера.

Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 и наноситься на ярлык, прикрепляемый к транспортной таре, с указанием манипуляционного знака «Беречь от влаги».

Хранение и транспортировка: Уборы головные в транспортной упаковке могут транспортироваться всеми видами транспорта крытого исполнения или в контейнерах на любые расстояния, с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования масок должны соответствовать условиям для группы условий хранения 5 по ГОСТ 15150, хранения – по группе 2 в групповой таре либо в транспортной таре. Храниться уборы головные должны в упакованном виде в крытых, сухих, проветриваемых складских помещениях на поддонах или стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных, органических растворителей, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении масок должна быть обеспечена их защита от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков.

Срок годности и хранения: 5 лет

Гарантийные обязательства: Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие головных уборов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. По истечении гарантийного срока хранения головные уборы должны быть подвергнуты проверке на соответствие требованиям настоящих технических условий в полном объёме приёмо-сдаточных и типовых испытаний.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная компания «САНИТАС», 191025, Санкт-Петербург, Дмитровский пер. д. 13, оф.6
Тел/Fax: +7(812) 670-80-80

Генеральный директор ООО «НПК «САНИТАС»

Шантар Р.О.



Уборы головные медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-003-96750898-2015 в следующих исполнениях:

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 10г/м² с двойной резинкой;

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 14г/м² с двойной резинкой;

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 17г/м² с двойной резинкой;

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 20г/м² с двойной резинкой;

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 25г/м² с двойной резинкой;

Одноразовая шапочка с круглой одинарной резинкой различных размеров: 19",21",23" плотность 14г/м² ;

Одноразовая шапочка с резинкой без латекса различных размеров: 19",21",23" плотность 17г/м² ;

Шапочка-берет различных размеров: 19",21",23" плотность - 14г/м² ;

Шапочка-берет различных размеров: 19",21",23" плотность - 20г/м²;

Шапочка - колпак различных размеров: S, M, L плотность 20г/м²;

Шапочка - колпак различных размеров: S, M, L плотность 30г/м²;

Шапочка - колпак различных размеров: S, M, L плотность 40г/м².

Материал	Завод-изготовитель, страна происхождения
Нетканый материал СС (спанбонд) M00012-40-140, плотность от 10-40 г/м² окрашенный и неокрашенный. Цвета: Белый Краситель: 63776-M1-300 Americhem Голубой Краситель: 63397-D2-200 Americhem Зеленый Краситель: PP63076203 ZN Clariant Розовый Краситель: 63806 Americhem Оранжевый Краситель: 63807 Americhem Нетканый материал СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) SbPP 20gsm WHT37, плотность от 10-40 г/м² окрашенный и неокрашенный. Цвета: Белый Краситель: 63776-M1-300 Americhem Голубой Краситель: 63397-D2-200 Americhem Зеленый Краситель: PP63076203 ZN Clariant Розовый Краситель: 63806 Americhem Оранжевый Краситель: 63807 Americhem	ЗАО «РЕГЕНТНЕОТЕКС», Россия AVGOL Nonwoven Industries Ltd., Израиль
Тесьма эластичная MC 004 (132) Состав: 5% спандекс, 95% полиэфирная нить	JIANGYIN BAIRUIJIA PLASTICS SCIENCE & TECHNOLOGY CO. Китай

Шапочка-берет, плотность 14 г/м2, 20 г/м2	
Размер D, “ (дюйм)	19",21",23"
Одноразовая шапочка с круглой одинарной резинкой, плотность 14 г/м2	
Размер D, “ (дюйм)	19",21",23"
Одноразовая шапочка с резинкой без латекса, плотность 17 г/м2	
Шапочка - «Шарлотта», плотность 10 г/м2, 14 г/м2, 17 г/м2, 20 г/м2, 25 г/м2	
Размер D, “ (дюйм)	19",21",23"
Размер D, “ (дюйм)	19",21",23"
Шапочка – колпак плотностью 20 г/м2, 30 г/м2, 40 г/м ²	
Размер	S,M,L

Наименование параметра	Значение параметра при плотности материала, г/м ²						
	10	14	17	20	25	30	40
1. Разрывная нагрузка в сухом состоянии в продольном направлении, Н, не менее	20	21	22	25	30	42	60
2. Разрывная нагрузка во влажном состоянии в продольном направлении, Н, не менее	18	18,5	19	22,5	27	37	54
3. Разрывная нагрузка в сухом состоянии в поперечном направлении, Н, не менее	17	18	20	21	25	30	40
4. Разрывная нагрузка во влажном состоянии в поперечном направлении, Н, не менее	15	16	18	18,5	22,5	27	36
5. Разрывное удлинение в сухом состоянии, %, не менее	120	140	142	145	147	149	150
6. Разрывное удлинение во влажном состоянии, %, не менее	108	126	128	130	132	134	135

Приложение В.

Уборы головные медицинские одноразовые из нетканых материалов по ТУ 9398-003-96750898-2015 в следующих исполнениях:

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 10г/м² с двойной резинкой; - 2,85 г.

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 14г/м² с двойной резинкой; - 3,85 г.

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 17г/м² с двойной резинкой; - 4,65 г.

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 20г/м² с двойной резинкой; - 5,35 г.

Шапочка - "Шарлотта" различных размеров: 19",21",23" плотность 25г/м² с двойной резинкой; - 6,60 г.

Одноразовая шапочка с круглой одинарной резинкой различных размеров: 19",21",23" плотность 14г/м²; - 3,90 г.

Одноразовая шапочка с резинкой без латекса различных размеров: 19",21",23" плотность 17г/м²; - 4,70 г.

Шапочка-берет различных размеров: 19",21",23" плотность - 14г/м²; - 3,85 г.

Шапочка-берет различных размеров: 19",21",23" плотность - 20г/м²; - 5,35 г.

Шапочка - колпак различных размеров: S, M, L плотность 20г/м²; - 5,50 г.

Шапочка - колпак различных размеров: S, M, L плотность 30г/м²; - 8,0 г.

Шапочка - колпак различных размеров: S, M, L плотность 40г/м². -10,5 г.

Все головные уборы могут иметь допускаемое отклонение по массе $\pm 15\%$

Прошито и пронумеровано и скреплено
печатью 6 листа(ов). Должность,
ФИО Шанов Р.О (подпись)

ООО НПК «САНИТАС» ген. директор

"15" августа

2016 г.

