

«Утверждаю»

Генеральный директор
ООО «НПО Р+Мед»

А.А. Романчук



2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

По применению изделия медицинского назначения (медицинской техники):

**Картридж серии DialClean модификаций А и С
для гемодиализного аппарата.**



Allmed Medical GmbH

Инструкция по
применению

Картриджи DialClean

Russian

A. Предназначение**DialClean - A**

Дезинфекция и очистка гидравлического контура гемодиализного аппарата от органических отложений, жиров и белков.

DialClean - C

Дезинфекция и декальцификация гидравлического контура гемодиализного аппарата.

B. Предупреждение

Не превышайте максимально допустимое время дезинфекции, рекомендуемое производителем гемодиализных машин.

C. Предосторожность

- (1) Обеспечьте хорошее качество воды на входе
- (2) Выберите необходимые настройки для гемодиализного аппарата.
- (3) Лимонная кислота может вызвать раздражение глаз [DialClean-C].
- (4) Следуйте указаниям руководства по эксплуатации соответствующих гемодиализных аппаратов.

D. Применение

- (1) Подключите необходимый тип DialClean к гемодиализному аппарату.
- (2) Выберите программу, необходимую для:
 - DialClean - A
 - DialClean - C
- (3) Управляйте выбранной программой в соответствии с инструкциями, рекомендованными производителем гемодиализного аппарата.
- (4) Убрать использованный DialClean сразу после завершения программы

E. Показания

Картриджи Allmed DialClean A и C предназначены для очистки и дезинфекции гидравлического контура от отложений органических жиров и белков

F. Противопоказания

Противопоказаний при использовании картриджей DialClean A и DialClean C не выявлено.

G. Используемые материалы

	Лимонная кислота
	Карбонат натрия
PVC	Polyvinylchloride
PC	Polycarbonate
PE	Polyethylene
PP	Polypropylene
PTFE	Polytetrafluoroethane

H. Гарантия

Картриджи DialClean производства фирмы Allmed производятся под строгим контролем качества, и это качество гарантировано. Если картридж DialClean поврежден, он будет заменен на новый за наш счет после возвращения поврежденного. Однако, мы не будем нести ответственность за вред, причиненный пациенту или любому другому лицу, если повреждение произошло при транспортировке, неправильном хранении или использовании в вашей организации.

I. Изготовитель

Изготовитель / Стерилизован:

Allmed Medical GmbH

Karl-Marx-Strasse 23, 01109 Dresden, Germany



+49 351 8834556



+49 351 88880399



info@allmedgrp.com

Web

www.allmedgrp.com

J. Символы

Символы	Определение
	Осторожно, ознакомьтесь с сопроводительной документацией
	Для одноразового использования
	Условия хранения от 4°C~28°C
	Номер партии
	Дата производства
	Дата истечения срока годности
	Воспользуйтесь инструкцией

0535

A. Тип гемодиализных аппаратов:

Картриджи DialClean используются с аппаратами фирмы Gambro.

Ref. no.	Страница 1 of 1	Rev. no.	Дата выпуска
DFU.008	T026	01	01.01.2010

Сшито и заверено печатью 2

() лист а



Романчук А.А.