



Аппарат для ИК терапии

Infra Red Radiator

Руководство пользователя

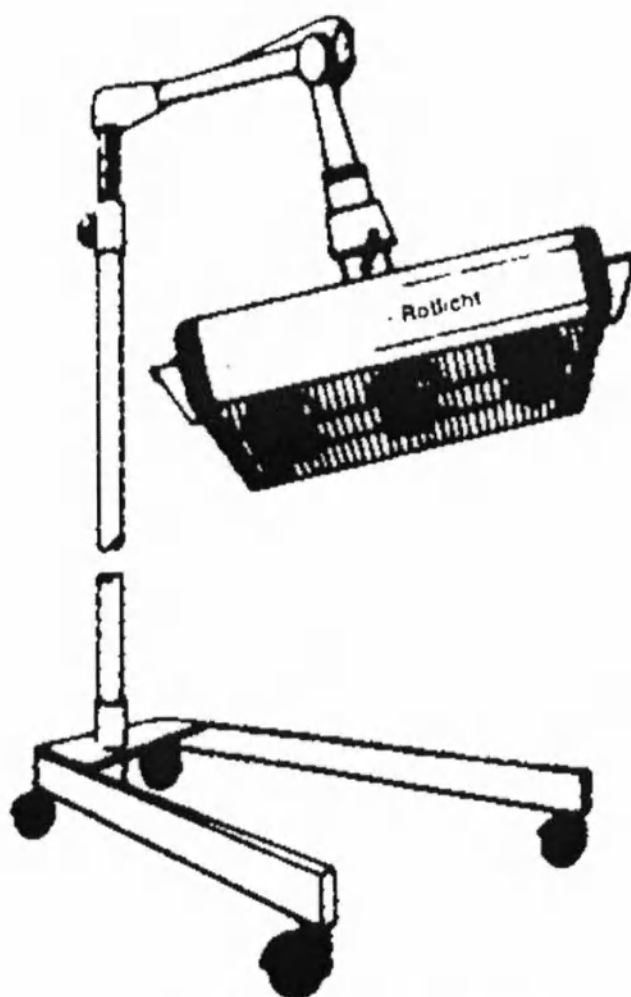

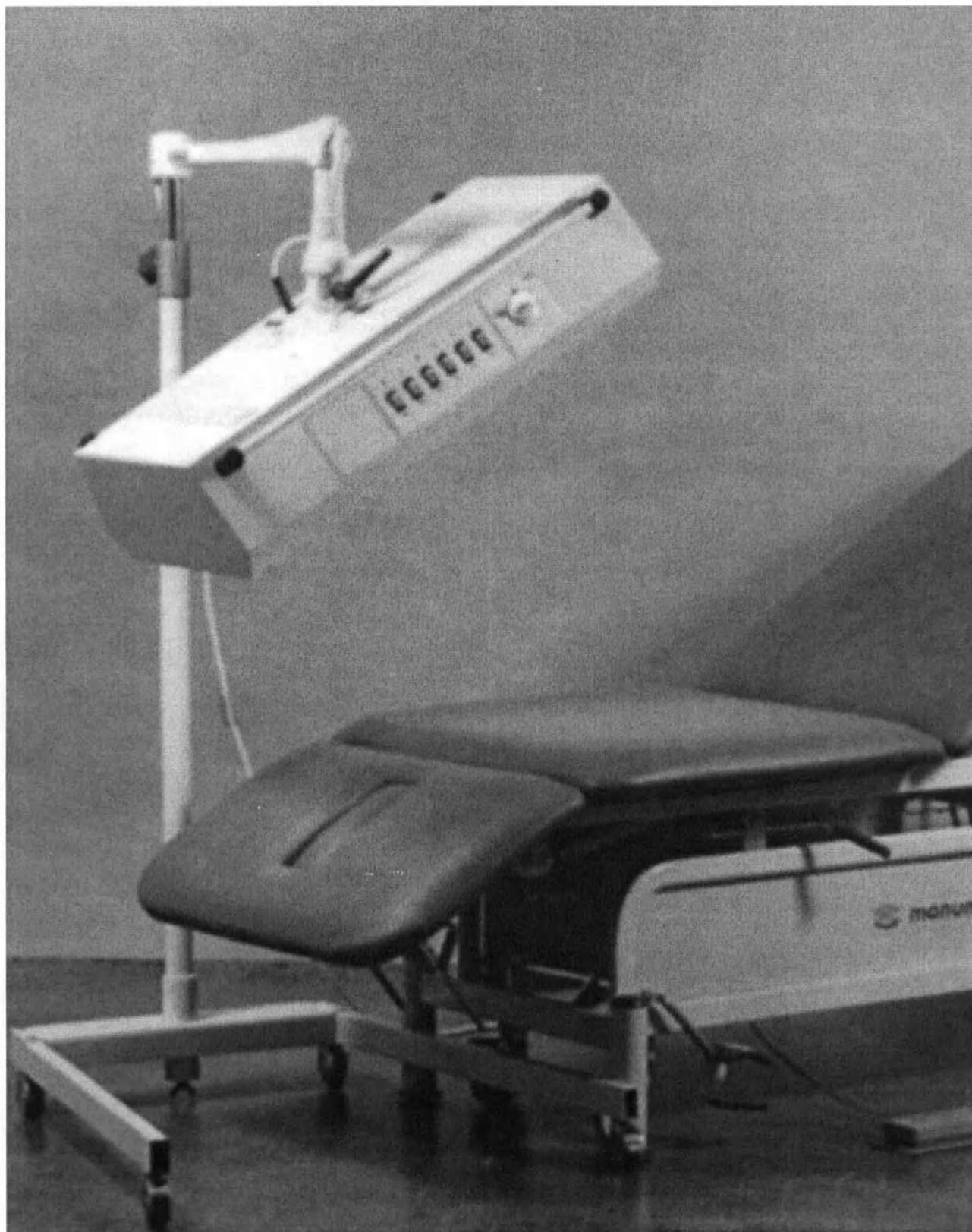

Содержание

Предисловие.....	4
Введение.....	4
Ответственность	5
Техническое обслуживание.....	5
Установка.....	5
Подсоединение.....	5
Органы управления.....	6
Использование аппарата.....	6
Обслуживание пользователем.....	6
Технические характеристики:	7

Предисловие

Мы очень признательны Вам, за ваше решение использовать наш аппарат для инфракрасной тепловой терапии.

Большое внимание при разработке и производстве было уделено надежности, точности работы, безопасности и долговечности.

Для правильного и безопасного использования IR6 мы настоятельно рекомендуем внимательно прочитать данную инструкцию перед первым использованием аппарата.

Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы эта инструкция всегда была доступна для тех лиц, которые имеют отношение к эксплуатации излучателя.

Введение

Имея 80 летний опыт производства и продажи аппаратуры для физиотерапии, Enraf Nonius представляет универсальный аппарат – инфракрасный излучатель IR6.

Удобная, мобильная конструкция, простое управление, широкий диапазон регулировок, несколько вариантов крепления – вот краткий перечень достоинств аппарата.

Ответственность

IR6 является современным, безопасным и простым в использовании устройством, которое было разработано, произведено, настроено и упаковано с большой тщательностью.

Enraf Nonius не принимает претензии в случае неправильного использования аппарата и/или принадлежностей или непонятого руководства. Это же относится к неправильному обслуживанию.

Техническое обслуживание

Мы рекомендуем Вам проводить ежегодное техническое обслуживание, проводимое сертифицированными инженерами или письменно уполномоченных нами. Также необходимо вести журнал обслуживания и всех выполняемых работ.

Не допускается открывать корпус прибора любым неуполномоченным на то лицам. В этом случае Энраф Нониус не принимает претензии, связанные с повреждением аппарата или нанесением вреда этим лицам. Ремонт аппарата могут проводить только инженеры нашей фирмы или уполномоченные лица.

Установка

Соберите аппарат, согласно приложенной инструкции. Не отсоединяйте блок излучателей от штанги, не зафиксировав поршень штанги винтом.

Если жидкость или постороннее тело попадет внутрь машины, немедленно выключите ее, отсоедините кабель электропитания от розетки и вызовите инженера для устранения неполадки и проверки машины.

Подсоединение

Обязательно подсоединение к заземленной розетке.

Проверьте, соответствует ли напряжение, указанное для аппарата напряжению вашей электросети.

Органы управления

1. Выключатели ламп
2. Ручка таймера
3. Ручка регулировки наклона излучателя
4. Ручка фиксации высоты штанги
5. Табличка с информацией об аппарате

Использование аппарата

1. Подсоедините аппарат к заземленной розетке.
2. Установите необходимое время процедуры
3. Включите необходимое количество ламп
4. По окончании процедуры прозвонит сигнал и лампы будут выключены.
5. При необходимости, можно выключить аппарат, повернув ручку таймера против часовой стрелки

Обслуживание пользователем

Не забывайте перед любыми операциями с аппаратом отключать его от сети.

Не разрешено открывать аппарат и проводить ремонт лицам, не имеющим на это разрешения фирмы.

Все внешние части излучателя могут очищаться влажной (не мокрой) мыльной тряпкой. Не разрешено использование порошковых абразивных чистящих веществ, а так же растворителей.

Перед повторным использованием IR6, дождитесь его высыхания.

Технические характеристики:

Габариты блока излучателей	75 x 39 x 25 cm
Вес блока излучателей	12 кг
Напряжение питания	230 В 50 Гц
Потребляемая мощность, не более	1500 Вт
Количество ламп-излучателей	6
Диапазон излучения	500 – 2500 nm
Мощность излучения	185 мВт /см ² на расстоянии 50 см
Площадь облучения	90 x 90 см на расстоянии 50 см

Каталожный номер аппарата _____

Серийный номер аппарата _____

Дата ввода в эксплуатацию ____ 200 г.