

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Повязок атравматичных, антимикробных, стерильных, с наноструктурным покрытием серебра, «Асептика», разработанных и представленных ООО «Медицинская компания «Асептика».

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Повязки атравматичные, антимикробные, с наноструктурным покрытием серебра «Асептика» (далее по тексту «Повязки»). Повязки «Асептика» предназначены для оказания первой медицинской помощи, местного лечения инфицированных ран различной этиологии, воспалительных кожных заболеваний, закрытия послеоперационных ран и пересаженного аутодермотрансплантата.

Повязки являются готовым к применению перевязочным средством. Повязки используются для оказания первой медицинской помощи при ожогах и поверхностных травмах, а также для лечения инфицированных, гранулирующих ран различной этиологии (посттравматических, послеоперационных, ожоговых, трофических язв и др.), воспалительных заболеваний кожи, а также для закрытия донорских участков и пересаженного аутодермотрансплантата. Повязки «Асептика» могут применяться в стационарах, амбулаторных медицинских учреждениях, в травматологических пунктах, полевых условиях и быту.

Повязки выпускаются 5-ти типоразмеров: 5х5см, 5х7см, 10х10см, 15х12см, 15х25см в герметичной упаковке из многослойного комбинированного материала по ТУ 5453-041-00203536-97. Стерилизация повязок осуществлена радиационным методом, дозой $(2,0 \pm 0,5)$ Мрад.

Инструкция составлена руководителем Государственного центра перевязочных, шовных и полимерных материалов в хирургии ФГУ «Институт хирургии им.А.Вишневского Росмедтехнологий», академиком РАМН Адамяном А.А. и генеральным директором ООО "Медицинская компания «Асептика» Пелехатой О.А.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Повязки являются атравматичными, антимикробными перевязочными средствами. В зависимости от вида подложки повязки выпускаются в 3-х исполнениях:

Исполнение 1. Повязки атравматичные, антимикробные, сетчатые, стерильные, с наноструктурным покрытием серебра «Асептика-1».

Исполнение 2. Повязки атравматичные, антимикробные, стерильные, из нетканого двухслойного полотна с наноструктурным покрытием серебра, «Асептика-2».

Исполнение 3. Повязки атравматичные, антимикробные, стерильные, из нетканого трехслойного полотна с наноструктурным покрытием серебра, «Асептика-3».

Повязки обладают антимикробной активностью к грамположительной и к грамотрицательной микрофлоре, в Исполнении 2 и 3 повязки обладают сорбционными свойствами: сорбируют (8-10 г/г). Повязки «Асептика» создают условия для нормального течения регенераторных процессов. Они достаточно пластичны, мягкие, нормально моделируются на различных участках тела, при перевязках не вызывают у пациентов болезненных ощущений и травматизацию подлежащих тканей.

Повязки «Асептика» - гипоаллергенны, не вызывают при контакте с раневой поверхностью местнораздражающих и аллергических реакций.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Повязки антимикробные, атравматичные, с наноструктурным покрытием серебра предназначены для первичного закрытия, лечения ран различной этиологии, в том числе вялотекущих, для закрытия послеоперационных швов, для снятия воспаления при кожных заболеваниях, а также для закрытия пересаженного аутодермотрансплантата..

Перед наложением повязок проводят стандартный туалет ран с помощью растворов антисептиков.

Первичную упаковку вскрывают стерильными ножницами, пинцетом извлекают повязку «Асептика» и при необходимости вырезают ее по контуру, соответствующему размеру и форме раны. Повязку аккуратно прижимают ко дну раны. Повязки в Исполнении 2 и 3 не требуют наложения сорбционных слоев. При использовании повязок в Исполнении 1 на сетчатой подложке поверх сетчатого полотна с наноструктурным покрытием осуществляют наложение сорбционного слоя в виде марлевых салфеток или нетканого сорбционного холстопршивного полотна. Фиксацию повязки осуществляют по стандартной методике с помощью марлевого, эластичного фиксирующего или трубчатого сетчатого бинта или с помощью фиксирующего пластыря. Перевязки

проводят не реже, чем через 1 сутки. При использовании аппликаций в виде сетчатого полотна с наноструктурным покрытием (Исполнение 1) имеется возможность ревизии раны после снятия сорбционного слоя через сетчатое полотно, находящееся на ране. При спокойном течении раны рекомендуется замена сорбционного слоя без снятия атравматичного сетчатого полотна.

Противопоказания: Повязки «Асептика» нецелесообразно применять для лечения гнойно-некротических ран, а также ран с сухим некрозом.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование повязок «Асептика» в упаковке может производиться любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Повязки «Асептика» хранят в сухих не отапливаемых складских помещениях при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не более 98 %. При хранении не допускается попадания на них солнечного света.

Гарантийный срок хранения повязок «Асептика» в упаковке - 5 лет с момента изготовления.

Руководитель Государственного центра перевязочных,
шовных и полимерных материалов в хирургии ФГУ
«Институт хирургии им. А.В.Вишневского
Росмедтехнологий», академик РАМН, профессор
Генеральный директор
ООО «Медицинская компания «Асептика»



А.А.Адамян

О.А.Пелехатая

