



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**АРМАВИРСКИЙ ЗАВОД
РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ**

Система менеджмента качества, действующая на заводе,
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000)

352931, Россия, г. Армавир,
Краснодарского края,
ул. Новороссийская, 2/4

Тел.: (861-37) 3-21-69
Тел./факс: 4-21-90, 4-64-22
E-mail: azri@arm.kes.ru

ОКПО 00149498 ОГРН 1022300637325

ИНН 2302008970 КПП 230201001

..... №

на № От

Руководство по эксплуатации

ПРЕЗЕРВАТИВОВ РЕЗИНОВЫХ

производства ОАО "Армавирский завод резиновых изделий" (Россия)

- Осторожно надорвите упаковку в месте насечки, не повредив презерватива.
- Сжав соскообразный кончик между большим и указательным пальцем, поместите презерватив на эрегированный половой член. При этом убедитесь, что резиновый ободок находится снаружи.
- Другой рукой осторожно разверните презерватив по всей длине, придерживая соскообразный кончик.
- После семяизвержения освободите половой член, крепко придерживая презерватив у его основания.
- Снимите презерватив только после того, как половой член полностью извлечен из влагалища.
- **Внимание!**
Презерватив предназначен для одноразового использования.

Генеральный директор ОАО «АЗРИ»



А. В. Харченко