



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»

Макаров
« » 2008г

Инструкция по применению

**Материал хирургический шовный рассасывающийся, в
кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями**

Москва, 2008

Материал хирургический шовный рассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями

Материал хирургический шовный рассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями, производства SMI AG, Бельгия представляет собой рассасывающиеся хирургические нити, предназначенные для применения в различных областях хирургии, гинекологии, урологии.

Показания:

Материал хирургический шовный рассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями применяется для аппроксимации мягких тканей и наложения лигатур практически во всех областях хирургии. Выбор шовного хирургического материала должен осуществляться в зависимости от состояния пациента, применяемой хирургической техники и характера операции.

Противопоказания:

Материал хирургический шовный рассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями может вызывать минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях, что является нормальной реакцией на имплантацию инородного тела.

Материал хирургический шовный рассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями **не применяется:**

- если требуется длительная поддержка ран под натяжением.
- при наложении лигатур в сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии.
- для операций, требующих длительного восстановления.

Инструкции по применению:

Распечатайте внешнюю упаковку из фольги, потянув два края в противоположные стороны, при этом следите за тем, чтобы не повредить внутреннюю стерильную упаковку материала. Затем руками в стерильных перчатках откройте внутреннюю упаковку, надорвав ее в верхней части. Продукт предназначен для одноразового использования!

При использовании помните:

Всегда тщательно проверяйте прочность сделанного узла.

Не допускайте повреждений шовных материалов хирургическими инструментами (такими, как зажим, иглодержатель, кусачки и т.д.)

Хирургические иглы удерживаются за заднюю часть.

Неиспользованный материал подлежит утилизации.

Хирургические иглы подлежат утилизации в отдельном контейнере.

Стерильность:

Материал хирургический шовный стерилизуется окисью этилена. Не подлежит повторной стерилизации! Не используйте материал в открытой или поврежденной упаковке!

Хранение

Продукт должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и повышенной температуры. Хранить в оригинальной упаковке в чистом, сухом помещении при температуре до 25°C.

Не использовать материал с истекшим сроком годности!

Значение символов на упаковке



0499 Символ CE с номером официального органа сертификации означает, что данный продукт отвечает основным требованиям Приложения 1 директивы 93/42/EWG (EEC) о медицинских продуктах



Знак LOT, сопровождающийся комбинацией букв и цифр, означает номер партии продукта.



Данный символ с указанием даты означает дату, до которой можно использовать продукт (срок годности).



Символ означает, что продукт стерилен.



Символ означает, что данный продукт является одноразовым и не подлежит многократному использованию.



Данный символ означает внимательно следовать инструкции по применению и ее приложениям.

REF Символ обозначает номер заказа.

USP указывает диаметр нити в соответствии с фармакопей США.

metric указывает диаметр нити в соответствии с фармакопей Европы.