



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Новartis Консьюмер Хелс»



О. В. Степанова

20__г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению

**Спрей дозированный для орошения полости носа с морской солью
«Вибролор»**

Производства:

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Etraz, 1260 Nyon, Switzerland.
Ursapharm Arzneimittel GmbH, Industriestrasse, 66129, Saarbrücken, Germany

Инструкция по применению изделия медицинского назначения

Вибролор спрей с морской солью

Спрей дозированный для орошения полости носа с морской солью

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием Вибролора спрея с морской солью. При наличии вопросов обратитесь за консультацией к врачу или провизору.

Почему своевременный уход за полостью носа помогает лечить насморк?

- Для малышей:

При насморке Вашему малышу становится трудно дышать, он перестает кушать, плохо спит. Дети в раннем возрасте часто болеют острыми респираторными заболеваниями, начинают появляться слизистые выделения, которые не дают Вашему малышу свободно дышать.

Заложенность носика вызывает дискомфорт и может ухудшить самочувствие ребенка. Устранение этой проблемы не только успокаивает Вашего малыша, но и помогает избегать более серьезных последствий.

Для взрослых:

При насморке, вызванном простудой или аллергией, взрослым также очень важно поддерживать слизистую оболочку носа в здоровом состоянии.

Помимо насморка, признаками неблагополучного состояния слизистой являются такие симптомы, как сухость, раздражение и неприятный зуд. Следует помнить, что нездоровая слизистая подвержена воспалению и уязвима для болезнетворных микроорганизмов.

Очищение и увлажнение носа при помощи Вибролора спрея с морской солью помогает нормализовать естественные физиологические процессы слизистой оболочки, благодаря этому восстанавливаются ее защитные функции.

Что представляет собой Вибролор спрей с морской солью и как он действует?

Вибролор спрей с морской солью является изотоническим раствором для орошения слизистой носа в виде спрея на основе морской соли и декспантенола.

Раствор морской соли содержит важные минералы и микроэлементы, которые способствуют мягкому увлажнению и очищению полости носа.

Декспантенол (пантотеновая кислота, провитамин В₅) способствует восстановлению (регенерации) воспаленной слизистой оболочки. Кроме того, декспантенол дополнительно обладает увлажняющим эффектом.

Вибролор спрей с морской солью:

- разжижает слишком густую слизь и облегчает удаление слизи и корочек из носовой полости;

-увлажняет слизистую и обеспечивает активацию естественной очистительной функции слизистой;

• способствует заживлению воспаленной слизистой оболочки носа благодаря использованию высококачественной морской соли, богатой минералами и полезными микроэлементами, и включению в состав декспантенола (провитамина В₅).

Вибролор спрей пригоден для использования у детей, начиная с грудного возраста, так и взрослых.

Когда следует использовать Вибролор спрей с морской солью?

Вибролор спрей с морской солью используют с лечебными, профилактическими и гигиеническими целями для промывания и увлажнения слизистой оболочки полости носа:

- Промывание полости носа при насморке, заложенности носа, а также аллергии. Вибролор спрей с морской солью особенно показан для использования беременным женщинам, которым не рекомендовано применение сосудосуживающих лекарственных препаратов.
- Профилактика насморка и защита слизистой носа от раздражающего воздействия окружающей среды (пыль, табачный дым) и воздействия вдыхаемых аллергенов (поллиноз, аллергия на домашнюю пыль, шерсть животных, перья).
- Увлажнение слизистой оболочки носа при пересыхании или раздражении, при сухом воздухе в помещении в результате кондиционирования воздуха, работы нагревательных приборов, во время авиаперелетов.
- Ежедневная гигиена полости носа.

Регулярное применение Вибролора спрея с морской солью очищает полость носа, защищает носовые ходы и способствует удалению потенциально болезнетворных агентов.

На что нужно обратить внимание перед применением Вибролор спрей с морской солью: **Не следует использовать Вибролор спрей с морской солью при аллергии на любой из ингредиентов, список которых приведен в инструкции по применению.**

Посоветуйтесь с врачом перед использованием Вибролора спрея с морской солью, если Вы перенесли операцию или травму полости носа.

В период беременности или вскармливания грудью Вы можете использовать Вибролор спрей с морской солью в соответствии с рекомендациями по применению.

Как применять Вибролор спрей с морской солью

Вибролор спрей с морской солью пригоден для использования во всех возрастных группах.

- Грудным младенцам и детям младшей возрастной группы (до 2 лет): назначают по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю 2 - 4 раза в сутки, по необходимости.
- Детям старше 2 лет и взрослым: назначают по 1 - 2 впрыскивания в каждую ноздрю 2 - 4 раза в сутки, по необходимости.

При насморке необходимо очистить нос перед тем, как проводить процедуру.

Инструкция по использованию:

1. При необходимости очищают носовые ходы.
2. Снимают защитную крышку.

Перед первой процедурой несколько раз нажимают на флакон, направляя струю в воздух (Рис. 1)

Рис. 1



Рис. 2

После этого флакон с дозатором готов к использованию.

- Грудным младенцам и детям младшей возрастной группы

до 2 лет):

Подносят наконечник к входу в носовое отверстие, не вводя его внутрь. Проводят одно впрыскивание.

Повторяют процедуру, впрыскивая спрей в другой носовой ход

- Детям старше 2 лет и взрослым: вставляют наконечник в носовой ход.

Проводят 1-2 впрыскивания и осторожно вдыхают воздух через нос.

Повторяют процедуру, впрыскивая спрей в другой носовой ход (Рис. 2).

После процедуры очищают и высушивают насадку, закрывают флакон защитной крышечкой. Для соблюдения правил гигиены каждый флакон должен использоваться только одним лицом.

Возможные побочные реакции

В очень редких случаях возможны реакции непереносимости.

Состав Вибролора спрея с морской солью:

Вещество	Концентрация в расчете на флакон (20 мл)
Декспантенол (провитамин B5)	1000,0 мг
Дигидрофосфат калия	50,0 мг
Моногидрофосфат калия	22,6 мг
Морская соль	26,6 мг
Вода для инъекций	19122,8 мг

Благодаря применяемой технологии микродозирования газ-пропеллент не используется.

Форма выпуска: спрей дозированный для орошения полости носа во флаконах 20 мл.

Одно впрыскивание эквивалентно 0.14 мл раствора.

Хранить в недоступном для детей месте.

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Не следует применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

После первого вскрытия упаковки срок годности 6 недель.

Не использовать при повреждениях внешней упаковки и/или флакона, даже если эти повреждения кажутся незначительными.

Производитель:

Новартис Консьюмер Хелс СА., Рю де Летраз, 1260 Нион, Швейцария.

Novartis Consumer Health SA, Route de l'Eiraz, 1260 Nyon, Switzerland.

Произведено Урсафарм Арзнеймиттель ГмбХ, Германия

Индустриштрассе – 66129 Саарбрукен, Германия

Ursapharm Arzneimittel GmbH, Germany

Industriestrasse – 66129 Saarbrücken, Germany