



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «МедИнформ»

Макарян О.Е.
« » 2008г
«МедИнформ»
«MedInform»
ОГРН 1027705013383
МОСКВА

Инструкция по применению

**Материал хирургический шовный нерассасывающийся,
в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями**

Москва, 2008

Материал хирургический шовный нерассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями

Материал хирургический шовный нерассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями, производства SMI AG, Бельгия представляет собой нерассасывающиеся хирургические нити, предназначенные для применения в различных областях хирургии, гинекологии, урологии.

Показания:

Материалы хирургические шовные нерассасывающиеся в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями, предназначены для удержания краев раны или тканей в глубине раны, при наличии большой тянущей силы. Нерассасывающиеся шовные материалы поставляются в различных размерах (диаметрах и длинах нити), в кассетах и отдельных упаковках, без игл, или предварительно закрепленными на атравматических стальных иглах различных типов.

Выбор шовного хирургического материала должен осуществляться в зависимости от состояния пациента, применяемой хирургической техники и характера операции.

Противопоказания:

Материал хирургический шовный нерассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями может вызывать минимальную первоначальную воспалительную реакцию в тканях, что является нормальной реакцией на имплантацию инородного тела.

Материал хирургический шовный нерассасывающийся, в кассетах и отдельных упаковках, с принадлежностями, не применяется:

- При хирургических швах, при полостных операциях, где может развиваться эффект «прорезывания ткани» или образование «пролежня» в подлежащих тканях.
- При повышенной чувствительности или аллергии пациента на шелк и/или на компоненты шовного материала (относительное противопоказание, при жизнеугрожающих состояниях может применяться под контролем врача)

Инструкции по применению:

Распечатайте внешнюю упаковку из фольги, потянув два края в противоположные стороны, при этом следите за тем, чтобы не повредить внутреннюю стерильную упаковку материала. Затем руками в стерильных перчатках откройте внутреннюю упаковку, надорвав ее в верхней части. Продукт предназначен для одноразового использования!

При использовании помните:

Всегда тщательно проверяйте прочность сделанного узла.

Не допускайте повреждений шовных материалов хирургическими инструментами (такими, как зажим, иглодержатель, кусачки и т.д.)

Хирургические иглы удерживаются за заднюю часть.

Неиспользованный материал подлежит утилизации.

Хирургические иглы подлежат утилизации в отдельном контейнере.

Стерильность:

Материал хирургический шовный стерилизуется окисью этилена. Не подлежит повторной стерилизации! Не используйте материал в открытой или поврежденной упаковке!

Хранение

Продукт должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей и повышенной температуры. Хранить в оригинальной упаковке в чистом, сухом помещении при температуре до 25°C.

Не использовать материал с истекшим сроком годности!

Значение символов на упаковке

 0499 Символ CE с номером официального органа сертификации означает, что данный продукт отвечает основным требованиям Приложения 1 директивы 93/42/EWG (EEC) о медицинских продуктах

 Значок LOT, сопровождающийся комбинацией букв и цифр, означает номер партии продукта.

 Данный символ с указанием даты означает дату, до которой можно использовать продукт (срок годности).

 Символ означает, что продукт стерил.

 Символ означает, что данный продукт является одноразовым и не подлежит многократному использованию.

 Данный символ означает внимательно следовать инструкции по применению и ее приложениям.

REF Символ обозначает номер заказа.

USP указывает диаметр нити в соответствии с фармакопей США.

metric указывает диаметр нити в соответствии с фармакопей Европы.