

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

«Изделий марлевых медицинских стерильных «Шеврон» с рентгеноконтрастной нитью» в следующих вариантах исполнения:

1. Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 0,50 x 1,20 см; 0,80 x 1,20 см; 0,80 x 1,50 см; 0,90 x 1,25 см; 1,00 x 1,40 см; 1,20 x 1,50 см; 1,20 x 2,20 см.
2. Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 0,50 x 1,20 см; 0,80 x 1,20 см; 0,80 x 1,50 см; 0,90 x 1,25 см; 1,00 x 1,40 см; 1,20 x 1,50 см; 1,20 x 2,20 см.
3. Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 20 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 0,50 x 1,20 см; 0,80 x 1,20 см; 0,80 x 1,50 см; 0,90 x 1,25 см; 1,00 x 1,40 см; 1,20 x 1,50 см; 1,20 x 2,20 см.
4. Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити / 1 см^2 «Шеврон»: 0,50 x 1,20 см; 0,80 x 1,20 см; 0,80 x 1,50 см; 0,90 x 1,25 см; 1,00 x 1,40 см; 1,20 x 1,50 см; 1,20 x 2,20 см.
5. Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: диаметр 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см; 3,0 см; 3,5 см; 4,0 см; 4,5 см; 5,0 см; 5,5 см; 6,0 см; 6,5 см; 7,0 см; 7,5 см.
6. Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: диаметр 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см; 3,0 см; 3,5 см; 4,0 см; 4,5 см; 5,0 см; 5,5 см; 6,0 см; 6,5 см; 7,0 см; 7,5 см.
7. Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 20 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: диаметр 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см; 3,0 см; 3,5 см; 4,0 см; 4,5 см; 5,0 см; 5,5 см; 6,0 см; 6,5 см; 7,0 см; 7,5 см.
8. Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити / 1 см^2 «Шеврон»: диаметр 1,5 см; 2,0 см; 2,5 см; 3,0 см; 3,5 см; 4,0 см; 4,5 см; 5,0 см; 5,5 см; 6,0 см; 6,5 см; 7,0 см; 7,5 см.
9. Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 5 x 5 см – 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных; 7,5 x 7,5 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 10 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 20 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных.
10. Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 5 x 5 см – 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных; 7,5 x 7,5 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 10 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 20 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных.
11. Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 20 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 5 x 5 см – 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных; 7,5 x 7,5 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 10 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 20 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных.
12. Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити / 1 см^2 «Шеврон»: 5 x 5 см – 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных; 7,5 x 7,5 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 10 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных, 32 сложенных; 10 x 20 см - 8 сложенных, 12 сложенных, 16 сложенных.
13. Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью промытые плотностью 13 нитей / 1 см^2 «Шеврон»: 20 x 30 см – 4 сложенных, 6 сложенных, 8 сложенных; 30 x 30 см - 4 сложенных, 6 сложенных, 8 сложенных; 40 x 40 см - 4

20. Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью непромытые плотностью 24 нити / 1 см² «Шеврон»: 20 x 30 см – 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений; 30 x 30 см - 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений; 40 x 40 см - 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений; 45 x 45 см - 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений. 12 сложений; 45 x 70 см - 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений; 50 x 60 см - 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений; 90 x 8 см - 4 сложения, 6 сложений, 8 сложений.

1. Назначение, показания к применению, область применения

Указанное изделие предназначено для одноразового применения в качестве перевязочного материала, используемого для промывания раны, абсорбции крови или транссудата в целях предотвращения заражения раны; применяется в операционных в больницах, лабораториях и медицинской помощи на дому.

2. Противопоказания, побочные эффекты

Противопоказаний и побочных эффектов нет.

3. Описание изделия

1) Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью «Шеврон» плотностью 13 нитей / 1 см², 17 нитей / 1 см², 20 нитей / 1 см², 24 нити / 1 см² (рис.1)

Структура

Продукт изготовлен из марли медицинской гигроскопической (100 % хлопок) путем резки и складывания вручную.



Рис.1

Характеристики продукта

Мягкий, нетоксичный, без запаха.

Цвет однородный. Масляные пятна, желтые точки, бахрома, оборванные нити или инородные включения отсутствуют. Характеристики отвечают требованиям стандарта: YZB/Hubei 0049—2007 (стандарты на регистрацию продукции пров. Хубэй, Китай).

2) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью «Шеврон» плотностью 13 нитей / 1 см², 17 нитей / 1 см², 20 нитей / 1 см², 24 нити / 1 см² (рис.2)

Структура

Продукт изготовлен из марли медицинской гигроскопической (100 % хлопок) путем резки и складывания вручную.

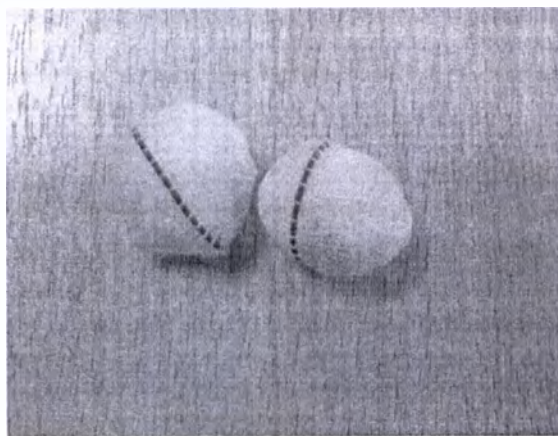


Рис.2

Характеристики продукта

Мягкий, нетоксичный, без запаха.

Цвет однородный. Масляные пятна, желтые точки, бахрома, оборванные нити или инородные включения отсутствуют. Характеристики отвечают требованиям стандарта: YZB/Hubei 0049—2007 (стандарты на регистрацию продукции пров. Хубэй, Китай).

3) Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью «Шеврон» плотностью 13 нитей / 1 см², 17 нитей / 1 см², 20 нитей / 1 см², 24 нити / 1 см² (рис.3)

Структура продукта

Продукт изготовлен из марли медицинской гигроскопической (100 % хлопок) путем резки и складывания.

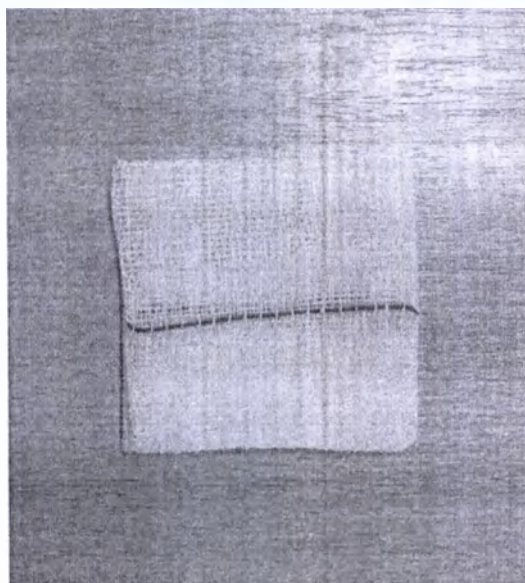


Рис.3

Характеристики продукта

Мягкий, нетоксичный, без запаха.

Цвет однородный. Масляные пятна, желтые точки, бахрома, оборванные нити или инородные включения отсутствуют. Характеристики отвечают требованиям стандарта: YZB/Hubei 0045—2007 (стандарты на регистрацию продукции пров. Хубэй, Китай).

4) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью промытые «Шеврон» плотностью 13 нитей / 1 см², 17 нитей / 1 см², 20 нитей / 1 см², 24 нити / 1 см² (рис.4)

Структура продукта

Продукт изготовлен из марли медицинской гигроскопической (100 % хлопок) путем резки, складывания и сшивания (нитью из 100% хлопка), с петлей (100% хлопок). Промывание тампонов для лапаротомии для придания им гофрированной структуры осуществляют следующим образом: погружают в очищенную воду на 15 минут, затем сушат в центробежной сушилке, после чего подвергают горячей сушке в течение 50 минут.

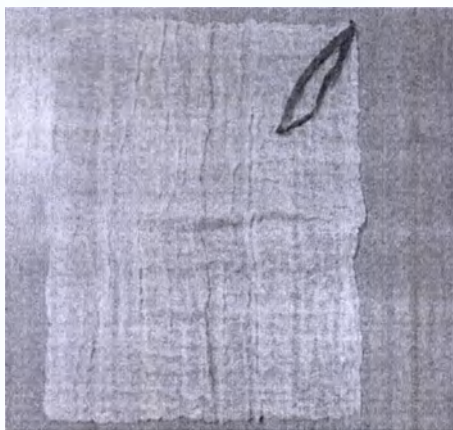


Рис.4

Характеристики продукта

Мягкий, нетоксичный, без запаха.

Цвет однородный. Масляные пятна, желтые точки, бахрома, оборванные нити или инородные включения отсутствуют. Характеристики отвечают требованиям стандарта: YZB/Hubei 0051—2007 (стандарты на регистрацию продукции пров. Хубэй, Китай).

5) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью непромытые «Шеврон» плотностью 13 нитей / 1 см², 17 нитей / 1 см², 20 нитей / 1 см², 24 нити / 1 см² (рис.5)

Структура продукта

Продукт изготовлен из марли медицинской гигроскопической (100 % хлопок) путем резки, складывания и сшивания (нитью из 100% хлопка), с петлей (100% хлопок).

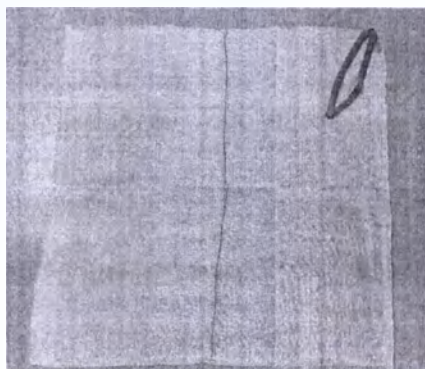


Рис.5

Характеристики продукта

Мягкий, нетоксичный, без запаха.

Цвет однородный. Масляные пятна, желтые точки, бахрома, оборванные нити или инородные включения отсутствуют. Характеристики отвечают требованиям стандарта: YZB/Hubei 0051—2007 (стандарты на регистрацию продукции пров. Хубэй, Китай).

4. Основные технические характеристики

Наименование	Техническая спецификация
1) Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация (0,50 x 1,20) ± 0,15 см (масса 0,30 г); (0,80 x 1,20) ± 0,15 см (масса 0,50 г); (0,80 x 1,50) ± 0,15 см (масса 0,72 г); (0,90 x 1,25) ± 0,15 см (масса 0,63 г); (1,00 x 1,40) ± 0,15 см (масса 0,92 г); (1,20 x 1,50) ± 0,15 см (масса 1,21 г); (1,20 x 2,20) ± 0,15 см (масса 2,70 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: 36 ± 1,5 г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 78 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 35 Н/5 см. Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
2) Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация (0,50 x 1,20) ± 0,15 см (масса 0,31 г); (0,80 x 1,20) ± 0,15 см (масса 0,51 г); (0,80 x 1,50) ± 0,15 см (масса 0,73 г); (0,90 x 1,25) ± 0,15 см (масса 0,64 г); (1,00 x 1,40) ± 0,15 см (масса 0,93 г); (1,20 x 1,50) ± 0,15 см (масса 1,22 г); (1,20 x 2,20) ± 0,15 см (масса 2,71 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: 42 ± 1,8 г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 93 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 45 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
3) Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 20 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация (0,50 x 1,20) ± 0,15 см (масса 0,33 г); (0,80 x 1,20) ± 0,15 см (масса 0,53 г); (0,80 x 1,50) ± 0,15 см (масса 0,75 г); (0,90 x 1,25) ± 0,15 см (масса 0,66 г); (1,00 x 1,40) ± 0,15 см (масса 0,95 г); (1,20 x 1,50) ± 0,15 см (масса 1,24 г); (1,20 x 2,20) ± 0,15 см (масса 2,73 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: 46 ± 2,0 г/м²; Максимальная прочность на разрыв:

	Сухой (продольное) ≥ 103 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 50 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
4) Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити/ 1 см² «Шеврон»	Спецификация (0,50 x 1,20) $\pm 0,15$ см (масса 0,36 г); (0,80 x 1,20) $\pm 0,15$ см (масса 0,56 г); (0,80 x 1,50) $\pm 0,15$ см (масса 0,78 г); (0,90 x 1,25) $\pm 0,15$ см (масса 0,69 г); (1,00 x 1,40) $\pm 0,15$ см (масса 0,98 г); (1,20 x 1,50) $\pm 0,15$ см (масса 1,27 г); (1,20 x 2,20) $\pm 0,15$ см (масса 2,76 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $51 \pm 2,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 115 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 65 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
5) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см² «Шеврон»	Спецификация Диаметр $1,5 \pm 0,5$ см (масса 0,25 г); $2 \pm 0,5$ см (масса 0,66 г); $2,5 \pm 0,5$ см (масса 1,04 г); $3 \pm 0,5$ см (масса 1,41 г); $3,5 \pm 0,5$ см (масса 1,80 г); $4 \pm 0,5$ см (масса 2,23 г); $4,5 \pm 0,5$ см (масса 2,70 г); $5 \pm 0,5$ см (масса 3,22 г); $5,5 \pm 0,5$ см (масса 3,86 г); $6 \pm 0,5$ см (масса 4,32 г); $6,5 \pm 0,5$ см (масса 4,85 г); $7 \pm 0,5$ см (масса 5,35 г); $7,5 \pm 0,5$ см (масса 5,90 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $36 \pm 1,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 78 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 35 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
6) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см² «Шеврон»	Спецификация Диаметр $1,5 \pm 0,5$ см (масса 0,26 г); $2 \pm 0,5$ см (масса 0,67 г); $2,5 \pm 0,5$ см (масса 1,10 г); $3 \pm 0,5$ см (масса 1,43 г); $3,5 \pm 0,5$ см (масса 1,82 г); $4 \pm 0,5$ см (масса 2,25 г); $4,5 \pm 0,5$ см (масса 2,72 г); $5 \pm 0,5$ см (масса 3,25 г); $5,5 \pm 0,5$ см (масса 3,88 г); $6 \pm 0,5$ см (масса 4,35 г); $6,5 \pm 0,5$ см (масса 4,87 г); $7 \pm 0,5$ см (масса 5,37 г); $7,5 \pm 0,5$ см (масса 5,93 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $42 \pm 1,8$ г/м²;

	Сухой (продольное) ≥ 103 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 50 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
4) Тампоны марлевые стерильные для препарирования с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити/ 1 см^2 «Шеврон»	Спецификация $(0,50 \times 1,20) \pm 0,15$ см (масса 0,36 г); $(0,80 \times 1,20) \pm 0,15$ см (масса 0,56 г); $(0,80 \times 1,50) \pm 0,15$ см (масса 0,78 г); $(0,90 \times 1,25) \pm 0,15$ см (масса 0,69 г); $(1,00 \times 1,40) \pm 0,15$ см (масса 0,98 г); $(1,20 \times 1,50) \pm 0,15$ см (масса 1,27 г); $(1,20 \times 2,20) \pm 0,15$ см (масса 2,76 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $51 \pm 2,5 \text{ г/м}^2$; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 115 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 65 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
5) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см^2 «Шеврон»	Спецификация Диаметр $1,5 \pm 0,5$ см (масса 0,25 г); $2 \pm 0,5$ см (масса 0,66 г); $2,5 \pm 0,5$ см (масса 1,04 г); $3 \pm 0,5$ см (масса 1,41 г); $3,5 \pm 0,5$ см (масса 1,80 г); $4 \pm 0,5$ см (масса 2,23 г); $4,5 \pm 0,5$ см (масса 2,70 г); $5 \pm 0,5$ см (масса 3,22 г); $5,5 \pm 0,5$ см (масса 3,86 г); $6 \pm 0,5$ см (масса 4,32 г); $6,5 \pm 0,5$ см (масса 4,85 г); $7 \pm 0,5$ см (масса 5,35 г); $7,5 \pm 0,5$ см (масса 5,90 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $36 \pm 1,5 \text{ г/м}^2$; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 78 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 35 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
6) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см^2 «Шеврон»	Спецификация Диаметр $1,5 \pm 0,5$ см (масса 0,26 г); $2 \pm 0,5$ см (масса 0,67 г); $2,5 \pm 0,5$ см (масса 1,10 г); $3 \pm 0,5$ см (масса 1,43 г); $3,5 \pm 0,5$ см (масса 1,82 г); $4 \pm 0,5$ см (масса 2,25 г); $4,5 \pm 0,5$ см (масса 2,72 г); $5 \pm 0,5$ см (масса 3,25 г); $5,5 \pm 0,5$ см (масса 3,88 г); $6 \pm 0,5$ см (масса 4,35 г); $6,5 \pm 0,5$ см (масса 4,87 г); $7 \pm 0,5$ см (масса 5,37 г); $7,5 \pm 0,5$ см (масса 5,93 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $42 \pm 1,8 \text{ г/м}^2$;

	Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 93 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 45 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание $BaSO_4$ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
7) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 20 нитей / 1 см² «Шеврон»	Спецификация Диаметр $1,5 \pm 0,5$ см (масса 0,29 г); $2 \pm 0,5$ см (масса 0,70 г); $2,5 \pm 0,5$ см (масса 1,13 г); $3 \pm 0,5$ см (масса 1,45 г); $3,5 \pm 0,5$ см (масса 1,84 г); $4 \pm 0,5$ см (масса 2,28 г); $4,5 \pm 0,5$ см (масса 2,74 г); $5 \pm 0,5$ см (масса 3,28 г); $5,5 \pm 0,5$ см (масса 3,90 г); $6 \pm 0,5$ см (масса 4,37 г); $6,5 \pm 0,5$ см (масса 4,89 г); $7 \pm 0,5$ см (масса 5,39 г); $7,5 \pm 0,5$ см (масса 5,96 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $46 \pm 2,0$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 103 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 50 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание $BaSO_4$ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
8) Шарики марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити / 1 см² «Шеврон»	Спецификация Диаметр $1,5 \pm 0,5$ см (масса 0,31 г); $2 \pm 0,5$ см (масса 0,72 г); $2,5 \pm 0,5$ см (масса 1,15 г); $3 \pm 0,5$ см (масса 1,47 г); $3,5 \pm 0,5$ см (масса 1,86 г); $4 \pm 0,5$ см (масса 2,31 г); $4,5 \pm 0,5$ см (масса 2,76 г); $5 \pm 0,5$ см (масса 3,30 г); $5,5 \pm 0,5$ см (масса 3,93 г); $6 \pm 0,5$ см (масса 4,39 г); $6,5 \pm 0,5$ см (масса 4,92 г); $7 \pm 0,5$ см (масса 5,41 г); $7,5 \pm 0,5$ см (масса 5,98 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью; Поверхностная плотность: $51 \pm 2,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 115 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 65 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация - этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание $BaSO_4$ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
9) Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 13 нитей / 1 см² «Шеврон»	Спецификация $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 8 сложенных (масса 0,7 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 12 сложенных (масса 0,9 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 16 сложенных (масса 1,1 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 8 сложенных (масса 1,4 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 12 сложенных (масса 1,9 г),

	$(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 2,4 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 4,4 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 2,4 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 3,3 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 4,2 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 7,8 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 4,2 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 6,2 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 8,4 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность: $36 \pm 1,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 78 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 35 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
10) Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 17 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 0,8 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 1,0 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 1,2 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 1,5 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 2,0 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 2,5 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 4,5 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 2,5 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 3,4 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 4,3 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 8,0 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 4,3 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 6,4 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 8,6 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность: $42 \pm 1,8$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 93 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 45 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
11) Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 20 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 0,9 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 1,1 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 1,3 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 1,6 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 2,1 г),

	$(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 2,6 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 4,8 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 2,6 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 3,7 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 4,6 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 8,5 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 4,5 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 6,7 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 8,9 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность: $46 \pm 2,0$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 103 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 50 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
12) Тампоны марлевые стерильные с рентгеноконтрастной нитью плотностью 24 нити / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 1,1 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 1,3 г), $(5 \times 5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 1,6 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 1,8 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 2,4 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 3,0 г), $(7,5 \times 7,5) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 5,3 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 2,9 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 4,1 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 5,1 г), $(10 \times 10) \pm 0,2$ см - 32 сложения (масса 9,0 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 8 сложений (масса 4,8 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 12 сложений (масса 7,3 г), $(10 \times 20) \pm 0,2$ см - 16 сложений (масса 9,6 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность: $51 \pm 2,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 115 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 65 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
13) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью промытые плотностью 13 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация $(20 \times 30) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 7,9 г), $(20 \times 30) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 11,8 г), $(20 \times 30) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 15,8 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 11,9 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 17,9 г),

	$(30 \times 30) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 23,0 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 16,8 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 23,9 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 29,8 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 23,1 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 34,1 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 44,9 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 12 сложений (масса 67,0 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 29,8 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,4 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 56,0 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 31,8 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 47,8 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 64,1 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 29,8 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,1 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 54,8 г). с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: $36 \pm 1,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) > 78 Н/5 см. Сухой (поперечное) < 35 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
14) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью промытые плотностью 17 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Спецификация $(20 \times 30) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 8,0 г), $(20 \times 30) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 11,9 г), $(20 \times 30) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 15,9 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 12,0 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 18,0 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 23,1 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 16,9 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 24,0 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 29,9 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 23,2 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 34,2 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 45,0 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 12 сложений (масса 67,1 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 29,9 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,5 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 56,1 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 31,9 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 47,9 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 64,2 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 29,9 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,2 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 55,0 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью,

	Поверхностная плотность: $42 \pm 1,8 \text{ г/м}^2$; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) $\geq 93 \text{ Н/5 см}$, Сухой (поперечное) $\geq 45 \text{ Н/5 см}$; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
15) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью промытые плотностью 20 нитей / 1 см^2 «Шеврон»	Спецификация (20x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 8,1 г), (20x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 12,0 г), (20x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 16,0 г), (30x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 12,1 г), (30x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 18,1 г), (30x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 23,2 г), (40x40) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 17,0 г), (40x40) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 24,1 г), (40x40) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 30,0 г), (45x45) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 23,3 г), (45x45) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 34,3 г), (45x45) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 45,1 г), (45x45) $\pm 2 \text{ см}$ - 12 сложений (масса 67,3 г), (45x70) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 30,0 г), (45x70) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 43,6 г), (45x70) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 56,2 г), (50x60) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 32,0 г), (50x60) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 48,0 г), (50x60) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 64,4 г), (90x8) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 30,0 г), (90x8) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 43,4 г), (90x8) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 55,2 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: $46 \pm 2,0 \text{ г/м}^2$; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) $\geq 103 \text{ Н/5 см}$, Сухой (поперечное) $\geq 50 \text{ Н/5 см}$; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
16) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью промытые плотностью 24 нити / 1 см^2 «Шеврон»	Спецификация (20x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 8,3 г), (20x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 12,4 г), (20x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 16,5 г), (30x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 12,5 г), (30x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 18,6 г), (30x30) $\pm 2 \text{ см}$ - 8 сложений (масса 24,0 г), (40x40) $\pm 2 \text{ см}$ - 4 сложения (масса 17,4 г), (40x40) $\pm 2 \text{ см}$ - 6 сложений (масса 24,5 г),

	$(40 \times 40) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 30,6 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 23,6 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 34,6 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 45,5 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 12 сложений (масса 67,8 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 30,2 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,3 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 56,5 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 32,3 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 48,3 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 64,7 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 30,3 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,7 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 55,6 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: $51 \pm 2,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 115 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 65 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
17) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью непромытые плотностью 13 нитей / 1 см ² «Шеврон»	Структура продукта Продукт изготовлен из марли медицинской гигроскопической (100 % хлопок) путем резки, складывания и сшивания (нитью из 100% хлопка), с петлей (100% хлопок). Характеристики продукта Мягкий, нетоксичный, без запаха. Цвет однородный. Масляные пятна, желтые точки, бахрома, оборванные нити или инородные включения отсутствуют. Характеристики отвечают требованиям стандарта: YZB/Hubei 0051—2007 (стандарты на регистрацию продукции пров. Хубэй, Китай). Спецификация $(20 \times 30) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 7,8 г), $(20 \times 30) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 11,7 г), $(20 \times 30) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 15,7 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 11,8 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 17,8 г), $(30 \times 30) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 22,9 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 16,7 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 23,8 г), $(40 \times 40) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 29,7 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 23,0 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 34,0 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 44,8 г), $(45 \times 45) \pm 2$ см - 12 сложений (масса 66,9 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 29,7 г), $(45 \times 70) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,3 г),

	(45x70) ± 2 см - 8 сложений (масса 55,9 г), (50x60) ± 2 см - 4 сложения (масса 31,7 г), (50x60) ± 2 см - 6 сложений (масса 47,7 г), (50x60) ± 2 см - 8 сложений (масса 64,0 г), (90x8) ± 2 см - 4 сложения (масса 29,7 г), (90x8) ± 2 см - 6 сложений (масса 43,0 г), (90x8) ± 2 см - 8 сложений (масса 54,7 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: $36 \pm 1,5 \text{ г/м}^2$; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) $\geq 78 \text{ Н/5 см}$, Сухой (поперечное) $\geq 35 \text{ Н/5 см}$; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
18) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью непромытые плотностью 17 нитей / 1 см^2 «Шеврон»	Спецификация (20x30) ± 2 см - 4 сложения (масса 7,9 г), (20x30) ± 2 см - 6 сложений (масса 11,8 г), (20x30) ± 2 см - 8 сложений (масса 15,8 г), (30x30) ± 2 см - 4 сложения (масса 11,9 г), (30x30) ± 2 см - 6 сложений (масса 17,9 г), (30x30) ± 2 см - 8 сложений (масса 23,0 г), (40x40) ± 2 см - 4 сложения (масса 16,8 г), (40x40) ± 2 см - 6 сложений (масса 23,9 г), (40x40) ± 2 см - 8 сложений (масса 29,8 г), (45x45) ± 2 см - 4 сложения (масса 23,1 г), (45x45) ± 2 см - 6 сложений (масса 34,1 г), (45x45) ± 2 см - 8 сложений (масса 44,9 г), (45x45) ± 2 см - 12 сложений (масса 67,0 г), (45x70) ± 2 см - 4 сложения (масса 29,8 г), (45x70) ± 2 см - 6 сложений (масса 43,4 г), (45x70) ± 2 см - 8 сложений (масса 56,0 г), (50x60) ± 2 см - 4 сложения (масса 31,8 г), (50x60) ± 2 см - 6 сложений (масса 47,8 г), (50x60) ± 2 см - 8 сложений (масса 64,1 г), (90x8) ± 2 см - 4 сложения (масса 29,8 г), (90x8) ± 2 см - 6 сложений (масса 43,1 г), (90x8) ± 2 см - 8 сложений (масса 54,8 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: $42 \pm 1,8 \text{ г/м}^2$; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) $\geq 93 \text{ Н/5 см}$, Сухой (поперечное) $\geq 45 \text{ Н/5 см}$; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO_4 в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
19) Тампоны марлевые	Спецификация

стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью непромытые плотностью 20 нитей / 1 см² «Шеврон»	(20x30) ± 2 см - 4 сложения (масса 8,0 г), (20x30) ± 2 см - 6 сложений (масса 11,9 г), (20x30) ± 2 см - 8 сложений (масса 15,9 г), (30x30) ± 2 см - 4 сложения (масса 12,0 г), (30x30) ± 2 см - 6 сложений (масса 18,0 г), (30x30) ± 2 см - 8 сложений (масса 23,1 г), (40x40) ± 2 см - 4 сложения (масса 16,9 г), (40x40) ± 2 см - 6 сложений (масса 24,0 г), (40x40) ± 2 см - 8 сложений (масса 29,9 г), (45x45) ± 2 см - 4 сложения (масса 23,2 г), (45x45) ± 2 см - 6 сложений (масса 34,2 г), (45x45) ± 2 см - 8 сложений (масса 45,0 г), (45x45) ± 2 см - 12 сложений (масса 67,1 г), (45x70) ± 2 см - 4 сложения (масса 29,9 г), (45x70) ± 2 см - 6 сложений (масса 43,5 г), (45x70) ± 2 см - 8 сложений (масса 56,1 г), (50x60) ± 2 см - 4 сложения (масса 31,9 г), (50x60) ± 2 см - 6 сложений (масса 47,9 г), (50x60) ± 2 см - 8 сложений (масса 64,2 г), (90x8) ± 2 см - 4 сложения (масса 29,9 г), (90x8) ± 2 см - 6 сложений (масса 43,2 г), (90x8) ± 2 см - 8 сложений (масса 55,0 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: 46 ± 2,0 г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 103 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 50 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
20) Тампоны марлевые стерильные для лапаротомии с петлей с рентгеноконтрастной нитью непромытые плотностью 24 нити / 1 см² «Шеврон»	Спецификация (20x30) ± 2 см - 4 сложения (масса 8,1 г), (20x30) ± 2 см - 6 сложений (масса 12,0 г), (20x30) ± 2 см - 8 сложений (масса 16,0 г), (30x30) ± 2 см - 4 сложения (масса 12,1 г), (30x30) ± 2 см - 6 сложений (масса 18,1 г), (30x30) ± 2 см - 8 сложений (масса 23,2 г), (40x40) ± 2 см - 4 сложения (масса 17,0 г), (40x40) ± 2 см - 6 сложений (масса 24,1 г), (40x40) ± 2 см - 8 сложений (масса 30,0 г), (45x45) ± 2 см - 4 сложения (масса 23,3 г), (45x45) ± 2 см - 6 сложений (масса 34,3 г), (45x45) ± 2 см - 8 сложений (масса 45,1 г), (45x45) ± 2 см - 12 сложений (масса 67,3 г), (45x70) ± 2 см - 4 сложения (масса 30,0 г), (45x70) ± 2 см - 6 сложений (масса 43,6 г), (45x70) ± 2 см - 8 сложений (масса 56,2 г), (50x60) ± 2 см - 4 сложения (масса 32,0 г),

	$(50 \times 60) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 48,0 г), $(50 \times 60) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 64,4 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 4 сложения (масса 30,0 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 6 сложений (масса 43,4 г), $(90 \times 8) \pm 2$ см - 8 сложений (масса 55,2 г) с вшитой рентгеноконтрастной нитью, Поверхностная плотность: $51 \pm 2,5$ г/м²; Максимальная прочность на разрыв: Сухой (продольное) ≥ 115 Н/5 см, Сухой (поперечное) ≥ 65 Н/5 см; Кратность применения – одноразовое; Стерильно, стерилизация – этиленоксид; Рентгеноконтрастная нить изготовлена из ПВХ (поливинилхлорид) марки SG-3. Содержание BaSO₄ в рентгеноконтрастной нити более 59 %.
--	---

Отклонение по указанным массам составляет $\pm 5\%$

Характеристики марли медицинской приведены ниже:

Цвет	Белый
Смачиваемость	≤ 5 с
Кислотность и щелочность	Нейтральная
Аэробные и анаэробные бактерии	Отсутствуют
Дрожжевые и плесневые грибы	Отсутствуют

5. Подготовка к работе изделия

Перед использованием проверить целостность упаковки и срок годности.

Изделие поставляется в стерильном виде. Стерильность гарантируется только, если упаковка сухая и не повреждена.

Использовать сразу после вскрытия упаковки в асептических условиях.

Изделие должно иметь вшитую рентгеноконтрастную нить, необходимо проверить её наличие перед применением. В случае отсутствия рентгеноконтрастной нити воздержитесь от использования данного изделия.

6. Использование

Данное стерильное медицинское изделие изготовлено из марли (100 % хлопок), поэтому обладает гигроскопичностью, что позволяет использовать его в больницах и клиниках в ходе хирургических операций и лечения ран для перевязки, изоляции органов, впитывания воды, жидкостей, крови.

С помощью рентгеноконтрастной нити при рентгеноскопии можно выявить очаг инфицирования в послеоперационный период (в первые же дни). Нить, контрастируя в рентгеновских лучах, дает возможность быстро и неинвазивно обнаружить заражение в случае, если перевязочный материал стал его источником. Нить дает возможность хирургу обнаружить и ликвидировать очаг заражения на очень ранних сроках.

7. Условия хранения и транспортировки

Транспортировка изделий происходит с помощью фургонов и грузовых автомобилей с безбортовой платформой. Необходимо убедиться в чистоте и ровной поверхности всех транспортных средств.

Упаковка должна быть герметичной, хранить изделия необходимо в помещении при температуре от 0 °С до 40 °С, вдали от опасных материалов, таких как легковоспламеняющиеся, взрывчатые и т.д., вдали от химикатов, защита от загрязнений. Защита от влажности и воздействия солнечного света. Оптимальная для хранения влажность воздуха составляет от 20 % до 65 %. Помещение, в котором будет осуществляться хранение, должно быть сухим и чистым, хорошо проветриваться. Особого режима давления при хранении и транспортировке продукта не требуется. Окна склада должны представлять собой закрытые застекленные окна с обеспечением мер по предотвращению растрескивания. Товары должны располагаться на поддоне.

8. Условия применения и эксплуатации

- Изделия стерильны, повторная стерилизация не требуется.
- Изделие должно иметь рентгеноконтрастную нить, необходимо проверить ее наличие перед применением. В случае отсутствия рентгеноконтрастной нити воздержитесь от использования данного изделия.
- Все варианты исполнения медицинского изделия должны использоваться только в стерильных условиях при комнатной температуре.
- Температура эксплуатации от +10 °С до +35 °С.
- Использовать в течение указанного срока годности
- Убедиться в герметичности упаковки и отсутствии нарушений
- Прекратить применение в случае увлажнения, плесени или повреждения упаковки
- Только для одноразового применения, повторное применение недопустимо

9. Сведения об утилизации или уничтожении

Изделия марлевые из 100% хлопка являются экологически чистыми. Изделия марлевые являются утилизируемым медицинским расходным материалом и не подлежат переработке. Изделия марлевые после использования подлежат захоронению или сжиганию. Утилизация должна осуществляться в соответствии с законодательством РФ на момент утилизации.

10. Срок годности

Срок годности составляет 5 лет с момента производства.

11. Гарантийные обязательства

На основании всех правильно валидированных условий эксплуатации, применения, хранения за пределами Китая полную ответственность за нарушение качества изделий марлевых несет компания Kingphar. Компания Kingphar обязуется принять меры по компенсации при нарушении качества изделий марлевых.

12. Адрес/телефон/сайт организации для обращения потребителей

Производитель не несет ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием продукта.

По всем вопросам, касающимся качества «Изделий марлевых медицинских стерильных «Шеврон» с рентгеноконтрастной нитью», просьба обращаться по адресу:

«Хубэй Цяньцзян Кингфар Медикал Материал Ко, Лтд.» (Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd.), Yuanguang Road, 433100 Qianjiang, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (KHP)

Тел.: +86 728 648 0913

e-mail: info@QJMDMGAUZE.COM

или к дистрибьютору в Российской Федерации:

ООО «БОЗОН»

125212 Москва, ул. Выборгская, 16-1

Тел. +7(495) 9373397, e-mail: info@bozon.ru.

湖北省潜江市江赫医用材料有限公司
HUBEI QIANJIANG KINGPHAR MEDICAL MATERIAL CO., LTD

王忠厚

Total numbered, bound and sealed 18 (eighteen) pages.
President Wang Zhongxiao from Hubei Qianjiang Kingphar Medical Co Ltd.

2108

湖北省潜江市江赫医药材料有限公司
HUBEI QIANJIANG KINGPHAR MEDICAL MATERIAL CO., LTD.

Перевод штампов и удостоверительной надписи на документе «Руководство по применению
«Изделий марлевых медицинских стерильных «Шеврон» с рентгеноконтрастной нитью»»

Стр. 18

/Подпись: Ван Чжунсяо/

/Штамп: «Хубэй Цяньцзян Кингфар Медикал Материал Ко., Лтд.» (Hubei Qianjiang Kingphar Medical Material Co., Ltd.)/

Оборотная сторона стр. 19

Всего пронумеровано, сшито и скреплено печатью 18 (восемнадцать) листов.

Президент компании «Хубэй Цяньцзян Кингфар Медикал Материал Ко., Лтд.» Ван Чжунсяо (Wang Zhongxiao)

/Подпись: Ван Чжунсяо/

/Штамп: «Хубэй Цяньцзян Кингфар Медикал Материал Ко., Лтд.»/

Переводчик

Город Москва.

Двадцать девятого апреля две тысячи шестнадцатого года.

Я, Миллер Николай Николаевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Серебrenниковым Федором Олеговичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-2117


Взыскано по тарифу: 100 руб. 00 коп.

Нотариус



[Handwritten signature in blue ink]

限公司
CO., LTD.

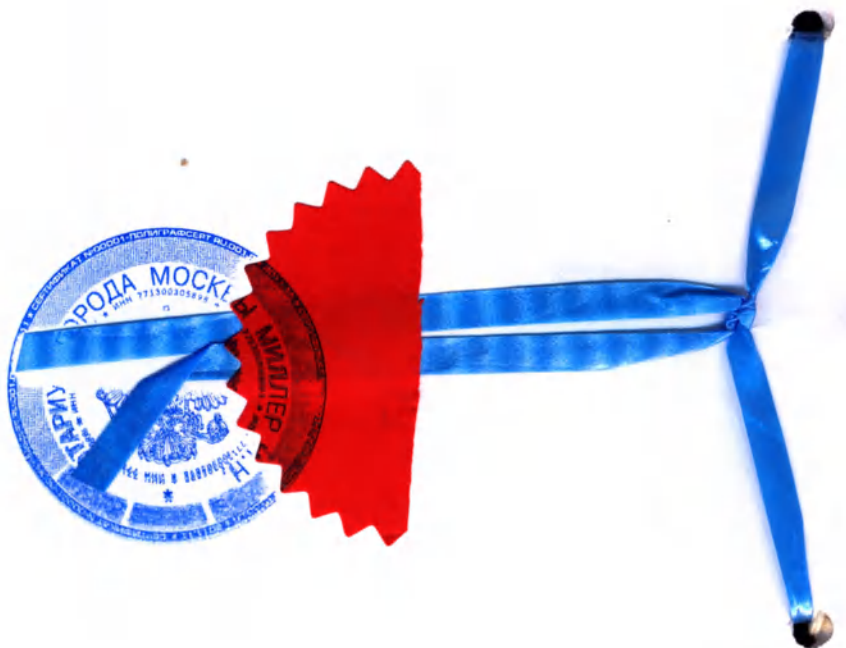

Всего прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью
до (двадцать) листов.
нотариус