

ИНСТРУКЦИЯ

По применению бутылок стеклянных для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов по ГОСТ 10782-85 в следующих исполнениях:

1 - бутылка II-250-2-МТО по ГОСТ 10782-85, -объем 250 см³

2 - бутылка II-450-2-МТО по ГОСТ 10782-85. -объем 450 см³

Бутылки предназначены для донорской крови, ее компонентов, трансфузионных и инфузионных препаратов.

Бутылки уложенные на поддоны по ГОСТ 9078-84 и ГОСТ 9557-87 и упакованные в полиэтиленовую термоусадочную пленку по ГОСТ 25951-83, распаковывают и направляют на входной контроль для проверки качества изготовления.

После приёмки, бутылки моют, сушат и стерилизуют.

Рекомендуются следующие условия мойки:

давление воды - 0,2-0,25 МПа (2,0-2,5 кгс/кв. см)

температура воды - (50-60) град. С

давление пара - 0,15-0,3 МПа (1,5-3,0 кгс/кв. см)

давление воздуха - 0,03-0,05 МПа (0,3-0,5 кгс/кв. см)

Внимание: Применение ершей и абразивных средств и составов для мойки бутылок группы 2 не допускается".

Рекомендуется стерилизация воздушным методом со следующими режимами :

температура воздуха (280-350) град. °С.

Время стерилизации - от 5 до 30 минут.

Стерильные бутылки должны быть использованы сразу же для наполнения, допускается их хранение не более 24 часов при условиях, полностью исключающих нарушение стерильности.

Утилизация: Использованные изделия утилизируются складирова в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790-2010

Транспортирование и хранение

Бутылки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Транспортирование бутылок по железной дороге производят повагонными или мелкими отправлениями, при мелких отправлениях - в деревянных ящиках.

Пакет-поддоны при транспортировании и хранении штабелируют в два яруса.

Транспортирование и хранение - по условиям хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие бутылок требованиям ГОСТ 10782-85 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

Производитель: АО «Стратегия»

Адрес: 301370, Россия, Тульская обл., Алексинский район,

деревня Павлово, дом 35-а

Тел. 8(48753) 5-69-44



АО "Стратегия"		Страна-изготовитель: Россия	
		Юридический адрес изготовителя: 301370, Тульская обл., Алексинский район, д. Павлова, 35 "А"	
ки стеклянные для крови, инфузионных и инфузионных ратов по ГОСТ 10782-85		Телефон: 8 (48753) 5-69-44	
		Факс: 8 (48753) 5-78-88	
		E-mail: info@alex-glass.ru	
Бутылка II-250-2-МТО		по ГОСТ 10782-85	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г			
Количество, шт/рядов:	Нормативный документ:	ГОСТ 10782-85	
	СМЕНА	№ м/л	ДАТА
ета			
г	560		
мм	1200*800*150		
Контролёр ОТК _____			

АО "Стратегия"		Страна-изготовитель: Россия	
		Юридический адрес изготовителя: 301370, Тульская обл., Алексинский район, д. Павлова, 35 "А"	
ки стеклянные для крови, инфузионных и инфузионных ратов по ГОСТ 10782-85		Телефон: 8 (48753) 5-69-44	
		Факс: 8 (48753) 5-78-88	
		E-mail: info@alex-glass.ru	
Бутылка II-450-2-МТО		по ГОСТ 10782-85	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г			
Количество, шт/рядов:	Нормативный документ:	ГОСТ 10782-85	
	СМЕНА	№ м/л	ДАТА
ета			
г	565		
мм	1200*800*150		
Контролёр ОТК _____			



Дудерова И.К.