


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ЗАО НПФ «Огонек»

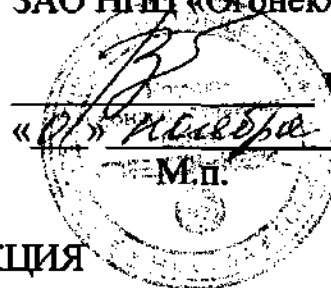

Чугунов В.В.  
2010г.

**ИНСТРУКЦИЯ  
по применению**

**Тутор на голеностопный сустав безнагрузочный (правый, левый) ТН0-21  
(далее – тутор).**

1. **НАЗНАЧЕНИЕ:** Применяется при ДЦП, последствиях ОНМК, последствиях повреждения спинного мозга, состояниях после оперативного и консервативного лечения косолапости, угрозе формирования эквино-варусной или вальгусной деформации стопы.
2. **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Тутор изготовлен из ламинированного полиэтилена, шлевки из полиамида, застежки - текстильные ворсовые типа "Контакт".
3. **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Выраженные деформации стопы и голеностопного сустава.
4. **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Тутор надевается на хлопчатобумажный чулок.
5. **ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Обеспечивается фиксация стопы в нейтральном или заданном положении коррекции, так как возможна индивидуальная подгонка тутора путем обрезки и термической доблоковки. Производится профилактика развития "одеяльных" контрактур, эквиноварусных и вальгусных деформаций стопы. Срок применения тутора до 20 часов в сутки. Допускается стояние в туторе при наличии обуви. Ходьба в туторе запрещена.
6. **ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Туторы должны храниться на стеллажах на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению тутором. Туторы не должны подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть тутор следует в ручном режиме с применением детского мыла.

Главный инженер

Чулкова М.М.