


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО НПЦ «Огонек»

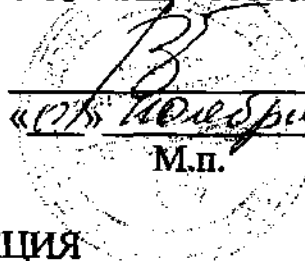

Чугунов В.В.

2010 г.

М.п.

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению**

**Аппарат на голеностопный сустав с шарниром (правый, левый) АН0-21
(далее- аппарат).**

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ:** Аппарат показан при ДЦП, последствиях ОНМК, повреждениях спинного мозга, состояниях после травм и операций на нижней конечности, профилактике и лечении посттравматических деформаций.
- 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Аппарат состоит из гильзы башмачка и голени, изготовленных из полиэтилена толщиной 3 мм, соединенных между собой упругим элементом из полипропилена. Внутренняя поверхность гильз аппарата имеет облицовку из пенополиэтилена. Фиксируется при помощи застежек типа «Контакт».
- 3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** Фиксированные деформации стопы и голеностопного сустава, травматические повреждения, требующие стабильной фиксации.
- 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат подгоняется по нижней конечности пациента и надевается на хлопчатобумажный носок. Крепление аппарата осуществляется с помощью застежек типа «Контакт», закрепленных на боковых поверхностях гильз башмачка и голени с помощью заклепок «Холнитен».
- 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ:** Аппарат обеспечивает опороспособность пораженной конечности с одновременным удержанием ее в заданном положении с частичной разгрузкой и сохранением подвижности в неповрежденных суставах, необходимой при ходьбе.
- 6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:** Аппарат должен храниться на стеллаже на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов в сухих, проветриваемых помещениях, обеспечивающих сохранность изделий при температуре от 18 до 40°C и относительной влажности воздуха 50...70%. Пациент должен строго соблюдать указания, изложенные в инструкции по применению аппаратом. Аппарат не должен подвергаться воздействию растворителей, щелочей и красящих веществ. Мыть аппарат следует с применением мягких моющих средств.

Главный инженер

Чулкова М.М.