

Инструкция по применению медицинского изделия

Стерильная гемостатическая абсорбирующая желатиновая губка Cutanplast
производства компании «МАША БРУНЕЛЛИ С.П.А.»
(MASCIA BRUNELLI S.P.A.), Италия.

Область применения

Стерильная гемостатическая абсорбирующая желатиновая губка Cutanplast, производства компании «МАША БРУНЕЛЛИ С.П.А.» (MASCIA BRUNELLI S.P.A.), Италия, предназначена для обеспечения гемостаза при наложении на кровоточащую поверхность. Применение губки Cutanplast (в сухом или смоченном в стерильном физиологическом растворе виде) показано во время большинства типов хирургических операций: общая хирургия (паренхиматозная и торакальная хирургия): Cutanplast STANDARD, Cutanplast SMALL, Cutanplast LARGE, Cutanplast 20x60 мм, Cutanplast 80x20 мм, Cutanplast 80x50x10 мм; оториноларингология и ламинэктомия: Cutanplast SPECIAL; проктология: Cutanplast ANAL; стоматология: Cutanplast DENTAL; нейрохирургия, сосудистая хирургия, пластическая хирургия: Cutanplast FILM, Cutanplast FILM x50; процедура диализа: Cutanplast DIAL; хирургическая ортопедия и гинекология: Cutanplast POWDER.

Инструкция по применению

- Губка Cutanplast прикладывается к промытой ране в сухом виде, либо после предварительного увлажнения в стерильном физиологическом растворе.
- Губка Cutanplast прикладывается непосредственно на поврежденную область, если необходимо - с небольшим надавливанием. За короткое время происходит адгезия фибрина, и губка Cutanplast начинает контролировать кровотечение.
- Размер губки Cutanplast, который необходимо использовать, должен быть пропорционален размеру места кровотечения. Губка Cutanplast разрезается стерильными ножницами, но не рвется и не ломается.
- Губка Cutanplast имеет меньшую клейкость по сравнению с марлевыми тампонами.
- Губка Cutanplast может быть оставлена на месте или убрана после остановки кровотечения. Продукт полностью абсорбируется в течение примерно 3 недель.
- Особенности использования Cutanplast POWDER: добавить 4-5 мл стерильного физиологического раствора или раствора антибиотика в открытый стерильный флакон с Cutanplast POWDER; перемешать до получения однородной массы и придать губке нужную форму. Использовать немедленно.

Предупреждение

- Перед использованием проверить целостность упаковки.
- Изделие поставляется в стерильном виде. Стерильность гарантируется только, если упаковка сухая и не повреждена.
- Использовать сразу после вскрытия упаковки.
- Не использовать изделие после истечения срока годности, указанного на упаковке.
- При использовании изделия следует поддерживать строгие асептические условия.
- Неиспользованные части изделия не могут быть стерилизованы вновь и должны быть уничтожены.

- Гемостатические возможности губки Cutanplast не должны заменять обычные процедуры по остановке кровотечения (накладывание швов, сдавливание, перевязка).
- Когда Губка Cutanplast вводится в полость, рекомендуется сдавить ее, так как после абсорбции влаги изделие расширяется и может давить на окружающие ткани.
- В нейрохирургии губка не должна оставаться в закрытой полости, так как, набухая, может спровоцировать давление на нервные ткани.
- Губка Cutanplast, как и все желатиновые гемостатические губки, предназначена для обеспечения гемостаза: любое другое ее применение должно быть предварительно внимательно взвешено пользователем.
- Держать в недоступном для детей месте.

Противопоказания

- Не использовать губку Cutanplast для пациентов, имеющих аллергию на свиной желатин.
- Не использовать на зараженных ранах.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при комнатной температуре.

Доступные варианты исполнения изделия следующих размеров

1. Cutanplast STANDARD (50x70x10 мм).
2. Cutanplast SPECIAL (50x70x1 мм).
3. Cutanplast FILM (70x200x0,5 мм).
4. Cutanplast ANAL (80x30 мм).
5. Cutanplast DENTAL (10x10x10 мм).
6. Cutanplast DIAL (30x30x10 мм).
7. Cutanplast POWDER (1 г)
8. Cutanplast SMALL (50x30x10 мм).
9. Cutanplast LARGE (80x125x10 мм).
10. Cutanplast 20x60 мм (20x60x7 мм).
11. Cutanplast 80x20 мм (80x20x10 мм).
12. Cutanplast 80x50x10 мм (80x50x10 мм).
13. Cutanplast FILM x50 (70x200x0,5 мм).

Производитель

«МАША БРУНЕЛЛИ С.П.А.», Италия,
 MASCIA BRUNELLI S.P.A., Viale Monza 272 - 20128 Milano (MI), Italy
 Тел. (+39) 02.25.209.1, факс (+39) 02.25.76.428, e-mail mktg@masciabrunelli.it

Производитель не несет ответственность за последствия, вызванные неправильным использованием продукта.

Генеральный директор
 ООО «МЕДЭКС-Консалт»



«13» апреля 2013 г.
 Т.В. Нам