

Инструкция по применению

ЦЕЛОФТАЛ®

Раствор офтальмологический вязкоэластичный (2% гидроксипропилметилцеллюлоза)

Описание

ЦЕЛОФТАЛ® – стерильный, изотонический, апиrogenный, вязкоэластичный раствор, содержащий высоко-очищенную, не вызывающую воспаления 2 % гидроксипропилметилцеллюлозу с молекулярной массой более 80000 Дальтон. ЦЕЛОФТАЛ® выпускается в одноразовых шприцах по 1,5 мл. Каждый мл раствора содержит: гидроксипропилметилцеллюлоза 20,0 мг; кальция хлорид 0,48 мг; натрия хлорид 4,9 мг; калия хлорид 0,75 мг; магния хлорид, гексагидрат 0,3 мг; натрия цитрат 1,7 мг; натрия ацетат 3,9 мг; натрия гидроксид и/или кислота хлористоводородная концентрированная для доведения pH; вода для инъекций. Осмоляльность ЦЕЛОФТАЛА® составляет 255-315 мОсм, pH $7,2 \pm 0,4$. ЦЕЛОФТАЛ® имеет формулу с вязкостью 4000 ± 1500 мПас.

Характеристики

Вязкоэластичный раствор ЦЕЛОФТАЛ® показан для проведения хирургических процедур на переднем отрезке глаза.

Обладает следующими характеристиками:

- заполняет пространство и защищает прилежащие ткани;
- абсолютно прозрачен;
- обладает превосходными свойствами текучести;
- не обладает антигенными свойствами;
- поддерживает объем передней камеры во время операции на переднем отрезке глаза и улучшает визуализацию во время операций, что позволяет снизить риск повреждения эндотелия роговицы и других прилегающих тканевых структур глаза;
- легко выводится в конце оперативного вмешательства; не требует хранения в холодильнике.

Показания

Вязкоэластичный раствор ЦЕЛОФТАЛ® показан для проведения хирургических процедур на переднем отрезке глаза, включая удаление катаракты и имплантацию интраокулярной линзы. ЦЕЛОФТАЛ® поддерживает объем передней камеры во время операции на переднем отрезке глаза и улучшает визуализацию во время операций, что позволяет снизить риск повреждения эндотелия роговицы и других прилегающих тканевых структур глаза. Вязкоэластичность ЦЕЛОФТАЛА® помогает сохранять нормальное состояние стекловидного тела во время операции и предотвратить схлопывание камеры.

Противопоказания

В настоящее время нет известных противопоказаний для использования ЦЕЛОФТАЛА® при строгом соблюдении инструкции по применению.

Особые указания:

- Следует принимать меры предосторожности, уместные при хирургии на переднем отрезке глаза. Возможно транзиторное повышение внутриглазного давления в послеоперационном периоде. Если послеоперационное внутриглазное давление превышает норму, назначается соответствующая терапия. Для уменьшения риска

развития такого эффекта рекомендуется удалять ЦЕЛОФТАЛ® из передней камеры глаза в конце операции.

- Канюля и колпачок содержат сухую натуральную резину.
- Шприц и канюля предназначены только для одноразового использования.
- Использовать только если контейнер не имеет повреждений.

Побочные эффекты:

ЦЕЛОФТАЛ®, офтальмологический вискоэластичный раствор, хорошо переносится при проведении хирургических процедур на глазе. Возможно транзитное повышение внутриглазного давления в послеоперационном периоде. Если послеоперационное внутриглазное давление превышает норму, назначается соответствующая терапия. Для уменьшения риска развития такого эффекта рекомендуется удалять ЦЕЛОФТАЛ® из передней камеры глаза в конце операции.

Описаны случаи воспалительных реакций в послеоперационном периоде (гипопион, ирит), случаи отека и декомпенсации роговицы после операций с использованием вискоэластиков. Однако невозможно установить прямой связи между применением ЦЕЛОФТАЛА® и развитием этих осложнений.

Применение

При проведении хирургических процедур на переднем отрезке глаза, ЦЕЛОФТАЛ® осторожно вводят в переднюю камеру с помощью канюли. ЦЕЛОФТАЛ® можно вводить до и после удаления хрусталика, хотя предпочтительнее вводить его до удаления, так как это позволяет снизить риск повреждения эндотелия роговицы и других прилегающих тканевых структур глаза. Хирургические материалы, инструменты и интраокулярные линзы могут покрываться ЦЕЛОФТАЛОМ® перед применением. При необходимости ЦЕЛОФТАЛ® можно вводить дополнительно во время операции.

ЦЕЛОФТАЛ® следует удалить из глаза непосредственно перед завершением операции.

Форма выпуска

ЦЕЛОФТАЛ® – стерильный, апиrogenный, одноразовый вискоэластичный раствор, 1,5 мл упакован в одноразовый шприц. Стерильная, одноразовая канюля прилагается.

Условия хранения

Хранить при температуре 8-27°C, в защищенном от света месте.

Не допускать замораживания.

Производитель:

«с.а. Алкон-Куврер н.в.»/ «s.a. Alcon-Couvreur n.v.»

В-2870 Пуурс, Бельгия

Владелец регистрации на территории Российской Федерации

ООО «Алкон Фармацевтика»

Адрес компании ООО «Алкон Фармацевтика» и принятия претензий:

109004, Москва, ул. Николоямская, 54

Тел. 961-13-33

