




Теперь Вы можете легко почистить микромотор и гильзу ручки изнутри. Для этого можно использовать мягкую щетку, кисточку и сжатый воздух.

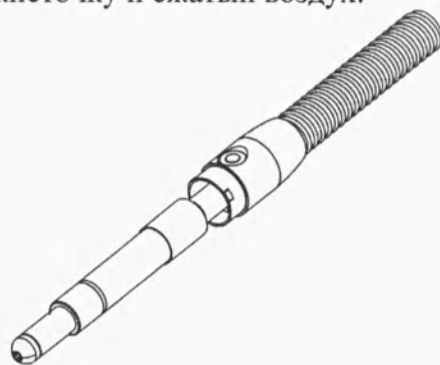

Для щадящей чистки и дезинфекции мы рекомендуем влажные салфетки с дезинфицирующим средством.



Не используйте дезинфицирующие спреи и аэрозоли.



Они могут проникать в подшипники и приводить к их повреждению. Всегда следуйте указаниям и инструкциям производителей как очищающих, так и дезинфицирующих средств.

7.2.2 Чистка блока управления

Блок управления можно чистить только с внешней стороны специальными чистящими средствами для пластика или средством для дезинфекции поверхностей, например, салфетками, предварительно увлажненными Инцидином Ликвид.