

ИПЕЕН® ПРЕМИУМ – назначение и характеристика
Альгинатная оттискная масса

Производитель:

АО „СпофаДентал“, Чернокостелецка 84, Чешская Республика-100 31 Прага 10,
www.spofadental.com

Представитель для ЕС:

SPOFA DENTAL a.s. Westendstraße 19, D-60325 Frankfurt am Main

Состав:

Alginate salt, diatomaceous earth, additives, pigments

Характеристика:

Ипеен®-Премиум является гидроколлоидной альгинатной оттискной массой для использования в ортопедической стоматологии и ортодонтии. Гипсовые модели, полученные из слепков материалом Ипеен®-Премиум, обладают гладкой, твёрдой поверхностью с великолепным воспроизведением деталей. Оттискная масса имеет приятный вкус ментола.

Показания:

1. Оттиски для изготовления частичных съёмных протезов.
2. Оттиски для изготовления полных съёмных протезов.
3. Рабочие оттиски для изготовления индивидуальных ложек.
4. Оттиски в ортодонтии для изготовления съёмных аппаратов.
5. Оттиски для изготовления учебных моделей.
6. Оттиски для изготовления прикусных шаблонов.
7. Оттиски для изготовления временных мостовидных конструкций из пластмассы.

Противопоказания:

В случае наличия повышенной чувствительности к некоторым компонентам материала.

Побочные эффекты:

В исключительных случаях при попадании альгинатной оттискной массы на слизистую оболочку может наблюдаться её временное раздражение, сухость во рту, и т.п.)

Применение:

Перед дозировкой и замешиванием оттискной массы рекомендуется ёмкость, содержащую Ипеен®-Премиум встряхнуть для тщательного перемешивания порошка. Порошок набирается из пластмассовой банки или пакетика приложенной меркой и выравнивается подходящим инструментом по краям ложки. Одна мерка равна 9г порошка. Для подготовки оттиска нижней челюсти обычно используются две мерки порошка, для верхней челюсти 3 мерки.

Перед замешиванием порошка с водой ёмкость, предназначенная для воды, сначала наполняется необходимым количеством воды с помощью мерки, которая входит в упаковку с альгинатной массой. На мерке обозначены две черты, соответствующие объёмам 20мл и 40мл, что соответствует для одной и двум меркам порошка. Порошок смешивается с водой в соотношении 9г порошка: 20мл воды.

Замешивание проводится пластмассовым шпателем так, чтобы порошок полностью перемешался с водой, наилучшим способом делать это путём

13.05.2017

растирания вдоль стен чашки для замешивания. Замешивание не должно длиться более 30 секунд.

Замешанная альгинатная масса Ипеен®-Премиум вкладывается в оттискную ложку и вводится в рот не позднее 90 секунд после начала замешивания порошка с водой. Оттиск фиксируется в полости рта как минимум 90 секунд. Время отверждения с начала замешивания длится максимум 2 мин. 15 сек. при температуре 23 °С. Оттиск рекомендуется извлекать из полости рта через 60 сек. после отверждения. После извлечения жёсткий оттиск ополоснуть струёй воды и дезинфицировать (например, в растворе Йодизола®, разбавленном в соотношении 1:10). Несмотря на то, что оттиск можно хранить 24 часа в среде со 100 % влажностью (например, в полиэтиленовом пакете или герметической транспортной ёмкости), рекомендуется его залить гипсом (например, Мраморит® или Конвертин® Хард) непосредственно после его получения.

Предупреждение:

Для подготовки альгинатной оттискной массы рекомендуется использовать воду при температуре около 23 °С. В случае повышенной температуры время обработки сокращается. Также жёсткость воды имеет влияние на время обработки, чем жёще вода, тем короче время обработки. Обычно время обработки с использованием дистиллированной или деминерализованной воды при температуре 23 °С равно 105 секундам. Пустая упаковка и не использованные остатки материала утилизируются ликвидировать обычным путём.

Хранение:

В сухом и тёмном помещении при температуре 5-25 °С, в плотно закрытой ёмкости. Следите, чтобы температура ни в коем случае не превышала 25 °С.

Срок годности : 2 года

Упаковка: 500 г в пластмассовой ёмкости

20 x 450 г, 1 x 450 г - в алюминиевых пакетах