



группа компаний

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Каролина-Дент»

тел: (495) 225-42-26

<http://www.karolina.ru>

Электролитный пр-д, д 3, стр 11

факс 499) 317-69-78

karolina@karolina.ru

115230 Москва, Россия

RETENSIN® PLUS

Адгезионный материал с одной составной частью

Производитель:

СпофаДентал АО, Маркова 238, ЧР-506 46 г. Иичин, www.sporadental.com. Произведено в Италии.

Описание:

Retensin® Plus – это адгезионный материал с одной составной частью для соединения композиционных материалов, металлов, амальгамов и керамики. Это адгезионный материал, который выделяет фтор. Он приблизительно из 25% наполнен смесью аэросила и баритового стекла, охраняемой патентом. Retensin® Plus комбинирует гидрофильные свойства прогрессивной технологии праймеров с исключительной химией „структурной связью“, которую с восторгом принимают все исследовательские работники во всем мире. Этот софистицированный адгезионный материал позволяет зубному врачу более скорую и более легкую аппликацию практически без любых ограничений в области твердости.

Противопоказания:

Материал нельзя наносить на дентин вблизи зубной мякоти или на открытую полость мякоти. Не используйте в случаях, когда известна повышенная чувствительность пациента на любую составную часть смеси, или если нельзя точно соблюдать рабочий порядок.

Побочное воздействие:

Только в исключительных случаях нельзя у некоторых пациентов использовать из-за реакции повышенной чувствительности на некоторую составную часть продукта. В сомнительных случаях может контакт акриловым мономером в продуктах причинить возвратные изменения на слизистой оболочке. Никакие другие местные, или системные побочные эффекты не наблюдались.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Следующие пункты определяют некоторые главные идеи хорошей связи на поверхности:

- Изолируйте зуб от соседних зубов. Используйте тонкие прозрачные ленточные матрицы. Очень рекомендуем кофердам.
- Retensin® Plus * имеет единичную фазу праймера, которая обеспечивает удовлетворительные результаты для различных видов поверхности. Retensin® Plus действует также хорошо как без учета того, если зуб сухой или влажный, если, однако, его поверхность полностью высушена, или загрязнена кровью или слюной.
- Если это возможно, рекомендуем наклеить дентин.

Меры безопасности:

* Избегайте контакта с кожей, глазами и мягкой тканью. В случае контакта помойте кожу водой. Материал может причинить дерматит.

Для использования Retensin® Plus Bottle во флаконе:

- До нанесения флакон коротко встряхните.
- В одноразовую смесительную подкладку нанесите одну каплю адгезионного материала.
- Полностью смочите острие аппликатора.
- Перейдите в отдел с названием „Инструкция по аппликации адгезионного материала“

Инструкция по аппликации адгезионного материала:

- При помощи травящего геля ** травите поверхность стекломассы и / или дентина в течение 15 секунд. Тщательно ополосните и слегка осушите, чтобы произошла полная сушка.
- Легким движением наносите в течение 15 секунд на поверхность стекломассы и / или дентина тонкий слой Retensin® Plus. Пометка: Если ретенционная область наполнителя находилась в детине, рекомендовано нанести еще один слой.
- Слегка сушите воздухом в течение 3 секунд.
- Оставьте отвердевать под воздействием света в течение 20 секунд*.
- В максимально 2 мм толщиной слоях наносите композиционный материал (Super-Cor™). Каждый нанесенный слой оставьте отвердевать под воздействием света в течение как минимум 40 секунд.

Меры безопасности:

КД

**** Содержит фосфорную кислоту. Избегайте контакта с кожей, глазами и мягкой тканью. В случае контакта с кожей или глазами пораженное место немедленно ополосните водой и в случае попадания в глаза отыщите медицинскую помощь. Не используйте во внутрь.**

Связь композиционного материала с композиционным материалом

- Препарируйте от 2 до 3 мм края, облегающего отломленный композиционный материал.
- 10 секунд травите композиционный материал плавиковой кислотой **. Исключите контакт со слизистой оболочкой, а если это возможно, используйте кофердам. Тщательно помойте и хорошо осушите.
- Ополосните и тщательно осушите и убедитесь в том, что травящее вещество было полностью удалено.
- На выравненную поверхность композиционного материала нанесите Silane Primer и слегка осушите (1 секунда).
- На поверхность композиционного материала нанесите Retensin® Plus.
- Слегка сушите воздухом в течение 3 секунд.
- Оставьте отвердевать под воздействием света в течение 20 секунд*.
- Нанесите композиционный материал и оставьте отвердевать под воздействием света.

Меры безопасности:

***** Содержит плавиковую кислоту. Избегайте контакта с кожей, глазами и мягкой тканью. В случае контакта с кожей или глазами пострадавшее место немедленно ополосните водой. Отыщите медицинскую помощь. Не применяйте во внутрь. Из-за безопасности рекомендуем в случае использования плавиковой кислоты использовать кофердам. Тщательно ополосните (ВСЬ ГЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ УДАЛЕН!) и осушите воздухом.**

Связь композиционного материала с металлом и фарфором:

- Препарируйте от 2 до 3 мм края облегающего отломленный фарфор. В тех местах, где это возможно, удалите из металла осколки и огрубите его поверхность. Иногда выгодно создать в металле надрезы.
- На поверхность фарфора нанесите слой 9% - 12% геля плавиковой кислоты и оставьте действовать в течение от четырех (4) до пяти (5) минут. Избегайте контакта со слизистой оболочкой, а если это возможно, используйте кофердам. Тщательно ополосните и тщательно осушите.
- Легким движением в течение 15 секунд нанесите на все поверхности тонкий слой Retensin® Plus. Нанесите тонкий равномерный слой.
- Слегка сушите воздухом в течение 3 секунд.
- Оставьте отвердевать под воздействием света в течение 20 секунд*.
- Согласно инструкции производителя нанесите на открытый непрозрачный металл, создающий под воздействием света полимерное соединение.
- В максимально 2 мм слоях наносите композиционный материал Super-Cor™. Каждый слой оставьте отвердевать под воздействием света в течение 40 секунд.

Ликвидация отходов:

Руководствуйтесь региональными директивами.

Хранение:

Храните при комнатной температуре.

Срок хранения

2 года

После истечения срока годности далее не используйте.

Упаковка:

5 мл в пластмассовом флаконе

***—Рекомендованное время отвердевания: Optilux 501 в режиме Boost в течение 10 секунд, L.E. Demetron I 10 секунд, L.E. Demetron II 5 секунд. При использовании остальных полимерных ламп руководствуйтесь рекомендациями производителя.**

Ревизия 3.8.2007 г.

Генеральный директор ООО «Каролина-Дент»



Ганзин А.Г.
2008 г.