

(8)



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**“ Материал стоматологический слепочный Stomaflex:
Stomaflex Putty, Stomaflex Light, Stomaflex Liquid Catalyst, Stomaflex Gel Catalyst “
производства фирмы SpofaDental a.s., Чешская Республика**

Назначение(показания и применению):

Stomaflex® Putty:

- Первичные оттиски по двухэтапной методике ("putty-wash") в сочетании с *Stomaflex® Light*.
- Оттиски по методу copper band.
- Оттиски для восстановления съемных протезов
- Универсальный силиконовый материал высокой вязкости для зуботехнических лабораторий

Stomaflex® Light:

- Материал для корригирующего слоя для получения оттиска по двухэтапной методике ("putty-wash") в сочетании с *Stomaflex® Putty*.
- Для получения функциональных оттисков с беззубых челюстей в индивидуальной оттисковой ложке.

Противопоказания:

Не использовать при наличии у пациента повышенной чувствительности к некоторым компонентам материала.

Инструкции к применению:

Замешивание:

Stomaflex® Putty:

- Взять оттисковый материал из банки мерной ложкой и сделать в нем оттиск края мерной ложки. На каждую мерную ложку массы выдавливается из тубы две равномерных полосы пасты катализатора длиной, соответствующей длине мерной ложки (т.е., две полоски примерно по 4 см). Массу тщательно смешивать с катализатором до получения однородной окраски (максимально 45 секунд). При работе использовать защитные перчатки из полиэтилена или латекса.
- Взять оттисковый материал (putty) так же, как упоминалось выше. Распределить материал и капнуть 14-16 капель жидкого катализатора.
- Тщательно перемешать массу до получения однородной пасты (максимально 45 секунд). При работе использовать защитные перчатки из полиэтилена или латекса.

Stomaflex® Light:

- Выдавить нужное количество силиконовой пасты из тубика на пластинку для смешивания и добавить полоску пасты катализатора приблизительно такой же длины. Тщательно перемешать обе пасты шпателем до получения однородной окраски (максимально 30 секунд)
- Выдавить нужное количество силиконовой пасты из тубика на пластинку для смешивания и добавить соответствующее количество жидкого катализатора (в расчете 2 капли на 1 см. пасты). Перемешать обе пасты, растереть широким шпателем до получения однородной массы (максимально 30 секунд).

Примечание: Увеличение количества катализатора и/или повышенная температура сокращают время обработки и время затвердения, и наоборот.

Применение:

Stomaflex® Putty:

Замешанная масса накладывается на индивидуальную или перфорированную оттискную ложку, которая не позднее чем за 90 секунд после начала замешивания вводится в полость рта. Оттиск фиксируется в полости рта минимум 3:5 минут.

Stomaflex® Light:

- Замешанная масса накладывается на подготовленную оттискную ложку (предварительного оттиска, тщательно высушенного и очищенного от слюны) и не позднее двух минут с начала замешивания вводится в полость рта..

Примечание: После выведения оттиска из рта тщательно устранить излишки оттискной массы с межзубных промежутков и из зубодесневой бороздки.

В случае изготовления оттисков по двухэтапной методике, замешанная масса накладывается на подготовленную оттискную ложку (тщательно высушенную и очищенную от слюны) и вводится в рот пациента за 1.5 минуты до начала замешивания. Оттиск фиксируется коротким сильным нажатием (максимум 10 секунд), после чего фиксировать без давления минимум 3.5 минуты. В случае необходимости оттискную массу можно вложить в область зубодесневой бороздки аппликационной канюлей, после чего изготовить оттиск стандартным способом.

- **Примечание:** После выведения оттиска из рта тщательно устранить излишки оттискной массы с межзубных промежутков и из зубодесневой бороздки.

Изготовление оттисков:

- Для достижения оптимальной адгезии между предварительным и корригирующим оттисками необходимо тщательно очистить и высушить предварительный оттиск. Излишки слюны могут вызвать расслоение оттисков.
- Для дезинфекции оттиска использовать обычный дезинфицирующий раствор (например Jodisol® разбавленный с водой в соотношении 1:10).
- Оттиск хранить в сухом месте при обычной температуре помещения до 25 °C.
- Максимальное время для изготовления оттиска не установлено, однако рекомендуется отлить модель в течение 4 часов с момента его выведения из рта.

Побочные эффекты:

Катализатор с-силиконовых оттискных материалов содержит компоненты, которые могут в редких случаях раздражать слизистую оболочку.

Правила безопасного использования:

Катализатор принадлежит к материалам раздражающим и вредным для здоровья, поэтому необходимо предотвращать прямое попадание материала на кожу или на слизистую. В случае попадания стереть пасту сухой тканью и сполоснуть большим количеством воды.

Пастообразный катализатор может повредить роговицу глаза, поэтому в случае попадания пасты в глаза необходимо немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

С-силиконовый оттискный материал является химически инертным после отверждения. Избегайте попадания материала на ткань, т.к. силиконы не выводятся с текстильных материалов.

Примечание:

после каждого применения плотно закрыть тюбик с катализатором Gel Catalyst и бутылочку с

жидким катализатором Stomaflex® Liquid Catalyst. Воздействие воздуха на пасту увеличивает время схватывания слепка и способствует затвердеванию материала в горлышке тубы.

С-силиконовые оттисковые материалы нельзя использовать вместе с поливинилсилоксановыми оттисковыми материалами. Возможное частичное образование осадка на пасте катализатора после его извлечения из тубика не отразится на качестве слепка.

Утилизация излишков материала:

Оттисковый материал и упаковку возможно утилизировать обычным способом. Излишки неиспользованного катализатора необходимо передать фирме, которая специализируется на утилизации опасных отходов.

Условия хранения:

В сухом и тёмном помещении при температуре 5-25 °C, в хорошо закрытой упаковке.

Срок годности:

Stomaflex® Putty: 2 года

Stomaflex® Liquid Catalyst: 2 года

Stomaflex® Light: 2 года

Gel Catalyst: 2 года

Маркировка окончания срока годности указана на упаковке : YYYY-MM (YYYY = год , MM = месяц)

Упаковка:

Stomaflex® Putty: – 1300 г. материала в пластиковой банке

Stomaflex® Liquid Catalyst – 4x10 г. Жидкости в бутылке

Stomaflex® Light – 130 г. пасты в тубике

Gel Catalyst – 60 г. пасты в тубике

Технические данные:

	Stomaflex Putty		Stomaflex Light	
Тип оттискового материала согласно ISO 4823	Тип 0 – очень высокая консистенция		Тип 3 – низкая консистенция	
	Катализатор Gel catalyst	Жидкий катализатор Liquid catalyst	Катализатор Gel catalyst	Жидкий катализатор Liquid catalyst
Соотношение при замешивании базисная паста/катализатор	23.3 г / 0.5 г	23.3 г / 0.46 г	10 г / 0.9 г	10 г / 0.6 г
Время замешивания	Макс. 45 секунд	Макс. 45 секунд	30 секунд	30 секунд
Общее рабочее время, включая время замешивания	1:00 – 1:30 мин.	1:30 – 2:00 мин.	макс. 2:00 мин.	макс. 2:00 мин.
Время затвердевания	2:15 – 3:00 мин	3:00 – 3:45 мин	3:00 – 4:00 мин	4:00 – 4:30 мин
Минимальное время нахождения оттиска во рту	3:30 мин	4:00 мин	3:30 мин	4:00 мин

Восстановление после деформации	≥ 97.5 %	≥ 97.5 %	≥ 98 %	≥ 98 %
Линейное изменение в размерах	- 1.0 - 0 %	- 1.0 - 0 %	- 1.3 - 0%	- 1.3 - 0%

Вышеприведённые значения действительны при температуре 23 °С и влажности воздуха 50 %.
В случае повышенной температуры упомянутые показатели сокращаются, и наоборот.

Дата проверки: 31 марта 2009 г.

