

Копия Верна:
директор ООО «Вега»
С.А. Бердичевский

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ВЕГА»
С.А. Бердичевский
" 10.06.2010 г.
М.п.

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации изделия медицинского назначения

Бинты марлевые медицинские, стерильные и нестерильные

(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Бинты марлевые медицинские, стерильные и нестерильные предназначены для оказания первой помощи при ранениях и ожогах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бинты соответствуют размерам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

Наименование бинта	Длина, м	Ширина, см
Стерильные	$2,0 \pm 0,1$	$5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$3,0 \pm 0,2$	$5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$4,0 \pm 0,2$	$5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$5,0 \pm 0,2$	$5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$7,0 \pm 0,3$	$14,0 \pm 1,0$
Нестерильные	$2,0 \pm 0,1$	$3,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $8,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$3,0 \pm 0,2$	$3,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $8,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$4,0 \pm 0,2$	$3,0 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $8,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$5,0 \pm 0,2$	$3,0 \pm 0,5$; $4,0 \pm 0,5$; $5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $8,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$
	$7,0 \pm 0,3$	$5,0 \pm 0,5$; $7,0 \pm 0,5$; $8,5 \pm 0,5$; $10,0 \pm 0,5$; $12,0 \pm 0,5$; $14,0 \pm 0,5$

Бинты должны быть без швов и с обрезанной кромкой. Наличие необрезанной кромки или кромки с бахромой допускается на внутреннем конце бинта длиной не более 0,5 м.

Разрывная нагрузка готовых бинтов соответствует требованиям , указанным в таб. 2.

Таблица

Наименование бинтов	Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50x200 мм, не менее	
	Н	кгс
<u>Стерильные из хлопчатобумажной марли</u>	<u>78</u>	<u>8</u>
<u>Стерильные из хлопчатобумажной марли с вискозным волокном</u>	<u>59</u>	<u>6</u>
<u>Нестерильные из хлопчатобумажной марли</u>	<u>88</u>	<u>9</u>
<u>Нестерильные из хлопчатобумажной марли с вискозным волокном</u>	<u>69</u>	<u>7</u>

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нет.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

При подготовке к работе необходимо разорвать оболочку и снять ее. Лево-
рукой взять за конец бинта и, придерживая правой рукой, развернуть его.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Для оказания помощи правой рукой взять за скатку бинта и наложить би-
на на рану или ожог и прибинтовать.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Бинты хранятся в сухом месте.

Бинты используются для наложения повязок на раны или ожоги при
оказании первой помощи.

Зам. директора

по фармацевтической деятельности _____ С.А. Астапова
(подпись)