

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор ООО «ВЕГА»

С.А. Бердичевский

С.А. Бердичевский 2010 г.

РУКОВОДСТВО

по эксплуатации изделия медицинского назначения Пакет перевязочный
медицинского первой помощи с одной подушечкой стерильный
(наименование изделия медицинского назначения)

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Пакет перевязочный медицинский первой помощи с одной подушечкой стерильный предназначен для оказания первой помощи при ранениях и ожогах.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пакеты в наружной оболочке имеют размер:

длина 10, 4 ± 0,5 см, ширина 5 ± 0,5 см, толщина 2 ± 0,5 см.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нет.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

При подготовке работе необходимо разорвать оболочку и снять ее. Лево́й рукой взять за конец бинта и, придерживая правой рукой, развернуть его до скатки бинта.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Для оказания помощи правой рукой взять за скатку бинта и развернуть повязку. Не прикасаясь накладываемой поверхностью подушечки к рукам и посторонним предметам, наложить ее на рану или ожог, стороной, противоположной пришиванию бинта, и прибинтовать подушечку.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пакеты перевязочные хранятся в сухом месте.

Пакеты перевязочные используются для наложения повязок на раны или ожоги при оказании первой помощи.

Зам. директора

по фармацевтической деятельности

С.А. Астапова
(подпись)

С.А. Астапова

