

УТВЕРЖДЕНА

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 2010 г. № _____

Генеральный директор
ООО «РАДА-ФАРМА»



Залевская О.И.
_____ 2010 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению раствора для обработки твердых тканей зубов
«РадаДент® плюс»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие медицинского назначения «Средство для профилактики заболеваний полости рта «РадаДент® плюс», в исполнении раствор для обработки твердых тканей зубов «РадаДент® плюс», является пенетратором лазерного излучения в ткани и фотосенсибилизатором к лазерному излучению длиной волны 662 нм. Применяется при лечении острых и хронических воспалительных процессов в мягких и твердых тканях полости рта, зубов и челюстных костей с целью бактериотоксического и противовоспалительного эффектов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раствор для обработки твердых тканей зубов «РадаДент® плюс» должен соответствовать требованиям ТУ 9391-002-54914021-2010. Содержание активного вещества (суммы натриевых солей хлоринов) в растворе - от 0,315% до 0,385%.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная чувствительность к любому из компонентов раствора. Беременность и период кормления грудью. Детский возраст (опыта применения средства нет).

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе не требуется. Должны строго соблюдаться условия хранения.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

При острых и хронических формах пульпита и периодонтита, после механической и антисептической обработки корневых каналов зуба осуществляется введение раствора «РадаДент® плюс» в корневой канал

при помощи эндодонтической иглы. Экспозиция раствора 4 минуты, после чего необходимо промыть корневой канал водой. Далее проводят световое воздействие излучением с длиной волны(662±3) нм в соответствии с инструкцией к лазеру.

При необходимости возможно дополнительное введение раствора «РадаДент® плюс» в воспалительный очаг через свищевой ход.

Для воздействия на инфицированные твердые ткани зуба ватный тампон, смоченный в растворе «РадаДент® плюс», помещают в отпрепарированную кариозную полость, экспонируют в течении 4-х минут, после необходимо промыть кариозную полость водой. Далее проводят световое воздействие излучением с длиной волны(662±3) нм в соответствии с инструкцией к лазеру.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


Хранить при температуре 0 до +8°C, в защищенном от света и недоступном для детей месте.

Начальник отдела по производству
БАД и изделий мед. назначения
ООО «РАДА-ФАРМА»

 Мамаева О. В.

Главный врач КЦС ФМБА России
д.м.н., профессор

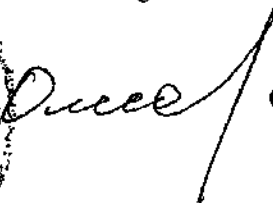

 Олесова В.Н.