

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «РАДА-ФАРМА»



Залевская О.И.

2012 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения
«РадаГель».

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие медицинского назначения «РадаГель» предназначен для снижения побочного теплового воздействия на нормальные биоткани, непосредственно примыкающие к зонам светового воздействия, на патологические очаги различной этиологии и одновременно на увеличение эффективности клинического результата от светотерапевтической процедуры.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«РадаГель» должен соответствовать требованиям ТУ 9398-001-54914021-2012. Содержание активного вещества (суммы натриевых солей хлорина е₆, хлорина р₆, пурпурина 5) в геле – от 0,45 до 5,5 %.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная чувствительность к любому из компонентов геля. Беременность и период кормления грудью. Детский возраст (опыта применения изделия нет).

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Специальной подготовки к работе не требуется. Должны строго соблюдаться условия хранения.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ

«РадаГель» наносят наружно в виде аппликации на кожу или слизистую оболочку за 15-60 минут до светового воздействия из расчета 1 мл геля на 3-5 см² поверхности.

Через 15-60 минут нанесенный гель удаляется смоченным дистиллированной водой ватным тампоном и производится световое воздействие в соответствии с утвержденными медицинскими технологиями.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре от 0 до +40°C, не более 4 часов или в холодильнике при температуре (0 – 8)° C. В сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей (в защищенном от света месте).

7. СРОК ГОДНОСТИ

Гарантийный срок годности: два года со дня изготовления.

Фирма изготовитель: ООО «РАДА-ФАРМА», Россия, 111024, г. Москва, Перовский проезд, д.35, стр.3, тел./факс 725-78-86, 600-07-92, e-mail: office@radapharma.ru, ogf@radapharma.ru, ИНН 7729399114.