

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО МедИнформ
Проценко Р.М.**



« » 2011г.

М. П.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**Материалы стоматологические вспомогательные
производства SpofaDental a.s., Чешская Республика, Markova 238 50646 Jicin Czech Republic**

2011

СИЛИСАН® N

Специальный раствор для фосфатные формовочные массы

Производитель:

АО „СпофаДентал“, Маркова 238, Чешская Республика – 506 46 Йичин, www.spofadental.com

Состав:

соль кремневой кислоты, чистый спирт 96%, денатурированный 2% бензина

Характеристика:

Силисан N представляет собой специальную жидкость, способную улучшить качество фосфатных формовочных масс.

Применение:

При смешивании с порошкообразной формовочной массой Силикан, Силикан Универсал образуется высокопрочная формовочная масса с оптимальным расширением при затвердевании и тепловым расширением. Концентрация Силисана N зависит от вида отливаемого сплава, рекомендуемые водные растворы Силисана N приводятся в информациях, прилагаемых к отдельным формовочным массам.

Внимание:

При использовании металлических форм для литья (колец) необходимо их внутреннюю сторону покрыть керамической лентой (КП-50), позволяющей формовочной массе расширяться и, благодаря этому исключить усадку отливаемого сплава.

Хранение:

В сухом месте при температуре $20 \pm 5^\circ\text{C}$ в хорошо закрытой упаковке.

Низкие температуры ($+5^\circ\text{C}$) могут вызвать обесценивание средства.

Срок применения:

2 года

Упаковка:

1000 г

СПОФАДЕНТ® ПЛЮС, МИФАМ® СУПЕР ЛЮКС Акриловые трехслойные сетчатые зубы

Производитель:

АО „СпофаДентал“, Маркова 238, Чешская Республика – 506 46 Йичин, www.spofadental.com

Характеристика:

Смолистые трехслойные флуоресцентные зубы для съемных зубных протезов.

Индикация:

1. Комплектные съемные протезы.
2. Частичные съемные протезы.
3. Имедиат-протезы.

Обработка:

Зубы классическим способом устанавливаются в восковые штампы, в которых они подвергаются имитации движений в артикуляторе (прибор для имитацией жевательных движений) или в оклюдоре. Далее продолжаем работу общепринятым порядком работы – в кювете. Во время изоляции гипса в кювете необходимо заботиться о том, чтобы изоляционным материалом (напр. ИЗОДЕНТ®) не были покрыты смолистые зубы в месте, в котором они должны быть соединены с базальной смолой. Ретенцию в смоле можно повысить насечкой нижней поверхности зубов и увлажнение мономером. Для наполнения формы используйте смолистое тесто (напр. СУПЕРАКРИЛ® ПЛЮС) с правильной консистенцией.

Ликвидация мусора:

Пустую упаковку и неиспользованный остаток материала ликвидируйте в месте с нормальным мусором, возникающим на рабочем месте.

Хранение:

В сухом и темном месте, при температуре от 5 до 30 °C, в хорошо закрытой упаковке.

Срок применения:

5 лет

Упаковка:

комбинация – 1x28
комбинация – 2x28
комбинация – 6x6
комбинация – 4x8
комбинация – 2x14 СПОФАДЕНТ® ПЛЮС
комбинация – 12x8 МИФАМ® СУПЕР ЛЮКС
комбинация – 18x6 МИФАМ® СУПЕР ЛЮКС
образец оттенков

Оттенки:

СПОФАДЕНТ® ПЛЮС – согласно системе VITA™ – A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4

МИФАМ® СУПЕР ЛЮКС – согласно системе Биодент – A1, A2, B1, B2, B3, G1, G2, G3, N2, N3, N5, R1, R2, R3, R5, C3

Трехслойные зубы своим естественным видом и цветовым выполнением полностью удовлетворяют требованиям зубных техников и окончательных пользователей.

VITA is a registered trademark of VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen.

Дата последней ревизии: 3. 8. 2005 г.

ПРЕМАКРИЛ® ПЛЮС

Самотвердеющая пластмасса для изготовления базисов съёмных протезов и ортодонтических аппаратов

Производитель:

АО „СПОФА-ДЕНТАЛ“, Чернокостелецка 84, Чешская Республика-100 31 Прага 10,
www.spofadental.com

Представитель в ЕС:

SPOFA DENTAL a.s., Westendstraße 19, D-60325 Frankfurt am Main

Состав: Порошок: poly(methylmethacrylate), dibutyl phthalate, pigments

Жидкость: methylmethacrylate, ethylene glycol dimethacrylate,
hydroquinone, pigments

Характеристика:

ПРЕМАКРИЛ ПЛЮС представляет собой самотвердеющую модифицированную метакриловую пластмассу, предназначенную для ортодонтии. Её преимуществом является краткость периода растворения перламутрового полимера и с этим связанная продолжительность периода сохранения пластичности массы. Следующей инновацией является расширение шкалы цветовых оттенков пластмассы. Цветовую шкалу образуют пять цветовых оттенков: Р(R) – красный, ГР(GR) – зеленый, Г(G) – жёлтый, О(O) – бесцветный, Б(B) – синий и ПИНК (PINK) – розовый. В отличие от системы базисных пластмасс в случае ПРЕМАКРИЛ ПЛЮС (за исключением оттенка "О" и „ПИНК“) окрашена только жидкость.

Показания:

- 1) Изготовление ортодонтических аппаратов,
- 2) Изготовление имедиат-протезов,
- 3) Починка съёмных протезов.

Противопоказания: Не применяется в случае известной сверхчувствительности по отношению к некоторым составным частям материала.

Побочные эффекты:

У пациентов с потенциальной чувствительностью на метилметакрилат может материал вызывать раздражение в области протезного ложа.

Изготовление:

Смешивание производится в стеклянной или керамической ёмкости. После перемешивания необходимо оставить смешанную пластмассу в покое (при дальнейшем перемешивании появилась бы пористость материала). При обычном способе изготовления материал непосредственно накладывается на изолированную гипсовую модель. В этой фазе в пластмассовое тесто устанавливаются ретенционные элементы. Таким образом подготовленный ортодонтический аппарат полимеризуется под простым давлением в воде.

Соотношение при замешивании:

Весовое – 2г порошка и 1г жидкости

Объёмное – 3:1 (3 доли порошка и 1 доля жидкости)

Время замешивания: 90 секунд

Время работы с пластмассовым тестом: 5-6 минут при температуре 25 С (с начала замешивания до момента затвердевания)

Время полимеризации: в течение 15 минут при давлении 0,2 – 0,3 Мпа, в воде при температуре 50 – 60С.

Внимание: Необходимо учитывать то, что если окружающая температура превышает 23-25С процесс работы с пластмассой ускоряется.

Хранение: В сухой среде при температуре 5 – 25С.

Срок годности: 4 года.

Упаковка:

Порошок :500 г – оттенки: бесцветный и ПИНК

Жидкость :250 г – оттенки: бесцветный, красный, синий, зеленый, желтый



Всесоюз

Обязательный текст упаковочной аннотации,

Разработанный согласно нормам ISO 1567

30.3.2000