

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО МедИнформ
Проценко Р.М.



« » _____ 2012г.

М. П.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

Материал стоматологический адгезивный Bond 008 в наборах и отдельных упаковках
производства **SpofaDental a.s., Чешская Республика, Markova 238 50646 Jicin Czech Republic**

2012

Bond 008 **BOND Solvent Free Adhesive**

Производитель: SpofaDental A.S., Markova 238, CZ-506 46 Jicin, www.spofadental.com. Сделано в США.

Описание:

Bond 008 - это однокомпонентный, самопротравливающий светоотверждаемый бондинговый агент, не содержащий растворитель.

Отсутствие растворителей, таких как ацетон, спирт, вода и т.д., позволяет исключить необходимость высушивания воздухом, экономя время врача и пациента. Более того, сформированный слой адгезива, препятствует микроподтеканию со стороны гибридного слоя и поддерживает соединение между бондируемыми поверхностями. Bond 008 предназначен для прямых композитных реставраций и демонстрирует высокую силу адгезии к дентину и эмали.

Показания:

- Прямые композитные реставрации
- Починка сколов композита, керамики и металлических каркасов.
- Совместим с материалами двойного отверждения, только в случае световой полимеризации первого слоя (материала двойного отверждения)

Противопоказания:

- Не использовать у пациентов с аллергией на метакрилаты
- Не использовать с материалами химического отверждения
- Не использовать для прямого покрытия пульпы
- Не рекомендуется использование на неотпрепарированной эмали

Инструкции по применению:

1. Подготовьте поверхность в соответствии с принципами адгезивной стоматологии. Убедитесь, что тщательно удален весь дебрис, оставшийся после препарирования.
2. В течение 2-3 секунд просушите рабочее поле струей воздуха или используйте абсорбирующую губку для высушивания. Убедитесь в том, чтобы в струю воздуха не попадали капли масла.
3. Удалите колпачок и зафиксируйте иглу с ворсинками на шприц. Убедитесь, что насадка зафиксирована в правильном положении. Медленно распределите материала по поверхности зуба через кончик иглы.
4. Втирающими движениями тщательно нанесите слой бондингового агента на всю поверхность зуба.
5. При помощи кончика иглы продолжайте распределять материал по поверхности зуба в течение 20 секунд.
6. Полимеризуйте в течение 10 секунд.
7. Снимите насадку и утилизируйте иглу после использования.
8. Нанесите композит в соответствии с инструкциями производителя.

Утилизация материала:

Обратитесь к местным законам, регулирующим принцип утилизации данного типа материалов.

Условия хранения и использования:

Хранить при температуре 2-8 °C. Использовать при комнатной температуре.

Срок годности:

2 года. Не использовать после истечения срока годности.

Упаковка:

2x 1 мл адгезива Bond 008 в шприце
2x 10 Игл с ворсинками

Дата последней версии 12.3.2012



Всего 2 стр.