

Инструкция по использованию

LYOSTYPT®

Описание

LYOSTYPT® - это коллагеновая гемостатическая губка, полученная из коллагеновых волокон крупного рогатого скота. LYOSTYPT® сохраняет свою форму, даже когда пропитывается кровью, поэтому в случае необходимости, ее можно легко удалить после остановки кровотечения.

Рыхлая структура поверхности LYOSTYPT® идеальна для адгезии тромбоцитов, тем самым являясь дополнительным стабилизатором свертываемости.

Способ стерилизации: облучение

Форма выпуска: прямоугольные пластины различных размеров

Состав

10 см³ содержат 100 мг коллагена.

Показания

- местный гемостаз капиллярных кровотечений
- кровотечения из паренхиматозных органов
- обильные кровотечения
- как вспомогательное средство при другой технике гемостаза

Способ действия

Контакт коллагена с кровью способствует агрегации тромбоцитов. Коллаген является дополнительным стабилизатором свертываемости.

Противопоказания

LYOSTYPT® нельзя использовать

- на инфицированных участках
- при фиксации эндопротезов цементом, поскольку снижает вяжущие свойства цемента
- при гиперчувствительности к протеинам животного происхождения

Предварительные меры

См. способ наложения

Взаимодействие с другими материалами

Уменьшает вязкость костного цемента.

Эффективность LYOSTYPT® снижают вещества, подавляющие агрегацию и препараты, подавляющие коагуляцию.

Предупреждения

Нет

Способ наложения

Наложить LYOSTYPT® соответствующего размера на рану или же поместить непосредственно в рану. LYOSTYPT® можно подогнать по размеру, используя ножницы. Пораженный участок необходимо как можно тщательнее промокнуть от крови. Затем LYOSTYPT® следует прижать к ране при помощи щипцов или зажима до тех пор пока не почувствуете, что салфетка прилипла к ране.

Излишки материала следует удалить после гемостаза. При кожных ранах следует избегать проникновения LYOSTYPT® через края кожи.

LYOSTYPT® можно оставлять в месте наложения, но можно удалить после остановки кровотечения. Абсорбция продолжается в течение 3 недель в результате воздействия энзимов и фагоцитов. Скорость рассасывания зависит от количества использованного LYOSTYPT®.

Побочные эффекты

- Редко могут образовываться спайки при внутриабдоминальном использовании.

Примечания и условия

LYOSTYPT® нельзя использовать после истечения указанного на упаковке срока годности.

LYOSTYPT® следует использовать немедленно после раскрытия упаковки

LYOSTYPT® следует хранить при температуре 25±5° C.

Другая информация

Помимо хороших гемостатических качеств LYOSTYPT® дает свойством сохранять свою форму, мягкостью и гигроскопичностью материала. Материал обладает высокой совместимостью с кровоточащей поверхностью. Прилипание LYOSTYPT® к инструментам и марлевым салфеткам минимально. Повторная стерилизация не допускается.

Упаковка

	Номер по каталогу		
Кол-во в упаковке	12 штук	3 x 5 см	1069128
Кол-во в упаковке	6 штук	5 x 8 см	1069152
Кол-во в упаковке	4 штуки	10 x 12 см	1069209
Кол-во в упаковке	2 штуки	20 x 30 см	1069250
Кол-во в упаковке	4 штуки	5 x 30 см	1069306



Жуков М.С.