

Общество с ограниченной ответственностью

«БИЛАЙФ»

ИНН/КПП 7703611609/770301001

ОГРН 1067757959213

123022 г. Москва, Пресненский вал ул., д. 5, стр. 1

Тел. (495) 646-01-37

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия медицинские компрессионные лечебные и профилактические VENOSAN (ВЕНОСАН)

Изделия медицинские компрессионные лечебные и профилактические VENOSAN (ВЕНОСАН) производства компании «ЗАЛЬЦМАНН АГ, ЗАЛЬЦМАНН МЕДИКО», РОРШАХЕР ШТРАССЕ 304, СН-9016, САНКТ-ГАЛЛЕН, ШВЕЙЦАРИЯ, изготавливаются с учетом новейших медицинских достижений и современных технологий в текстильной промышленности. Изделия содержат экологически чистые волокна (протестированные в соответствии со стандартом Öko-Tex 100), которые улучшают качество жизни и Ваше самочувствие. Компрессионные изделия VENOSAN (ВЕНОСАН) отвечают всем действующим в настоящее время национальным и международным правилам, имеют знак качества в области медицинских компрессионных изделий и периодически подвергаются проверкам в официальных контролирующих органах. Ваши VENOSAN (ВЕНОСАН) являются изделием медицинского назначения, поэтому крайне необходимо, чтобы Вы прочитали настоящую инструкцию по применению очень внимательно.

Важно

Посоветуйтесь со специалистом, прежде чем впервые надеть Ваши изделия.

Важно, чтобы изделие было правильно подобрано по размеру и точно Вам подходило.

Никогда не заворачивайте верхний край изделия, т.к. двойное давление может привести к опасному перетягиванию.

Если при ношении медицинских компрессионных чулок боль в ногах усиливается или ухудшается самочувствие, немедленно обратитесь к врачу или специалисту.

Следите за тем, чтобы обувь была качественной и не могла повредить деликатную ткань медицинских компрессионных чулок.

Кремы, мази и масла могут испортить изделия или оставить на них пятна.

При четком соблюдении всех правил носки и ухода за изделиями они сохраняют свои качества в течение 6 месяцев. После истечения этого срока сохранение компрессии не гарантируется и мы рекомендуем приобрести новое изделие.

Вы можете также посетить наш сайт по адресу www.venosan.com

Порядок надевания изделия

Острые длинные ногти, грубая кожа рук, кольца, браслеты и наручные часы могут повредить деликатный трикотаж изделий VENOSAN (ВЕНОСАН). Поэтому, прежде чем надевать или снимать изделие, необходимо удалить украшения с рук и надеть обычные бытовые резиновые перчатки.

Далее действуйте следующим образом, если Вы одеваете гольфы, чулки или колготы:

1. Убедитесь, чтобы Ваши ноги были сухими. При необходимости можно использовать тальк. Наденьте шелковый носочек, который прилагается в комплекте и служит в качестве вспомогательного средства при надевании чулок.
2. Выверните чулок до пятки, т.е. все изделие, кроме следа, должно быть вывернуто наизнанку.
3. Большими пальцами растяните след чулка в стороны и натяните Ваш VENOSAN (ВЕНОСАН) на ступню. При надевании чулок с закрытым мыском согните большой палец ноги - шелковый носочек соскользнет и Вы легко сможете вытянуть его из-под пятки. Возьмитесь за верхний край чулка и натяните чулок на пятку.
4. Когда все изделие собрано у щиколотки, распределите его зигзагообразными движениями по ноге вверх, захватывая трикотаж большими пальцами изнутри.

Если Вы одеваете рукава или перчатки, соблюдайте правила, которые описаны выше с учетом того, что Вы одеваете изделие на руку и используете одну руку для одевания изделия.

Ваши изделия VENOSAN (ВЕНОСАН) изготовлены из высокоэластичного материала, поэтому очень важно не тянуть изделие сильно за верхний край, а с помощью резиновых перчаток равномерно распределить изделие по ноге по направлению к колену/запястью/плечу.

Порядок снятия изделия (гольфы, чулки, колготы):

1. Возьмите изделие за верхний край (манжет), выверните изделие наизнанку и стягивайте вниз до уровня щиколотки и далее по направлению к пятке.
2. Вставьте большие пальцы между ногой и трикотажем и снимите изделие с пятки.
3. Медленно снимите чулок со ступни.

Если Вы снимаете рукава или перчатки, соблюдайте правила, которые описаны выше с учетом того, что Вы снимаете изделие с руки и используете одну руку для снятия изделия.

Инструкция по уходу

Ваши изделия VENOSAN (ВЕНОСАН) можно стирать в стиральной машине при температуре не выше 40°C и ухаживать за ними, как за обычным синтетическим нижним бельем. Регулярная стирка не повредит Вашим чулкам. Не используйте при стирке смягчающие средства, отбеливатели или пятновыводители (такие как терпентин, бензин и другие).

Протирайте силиконовые резинки на чулках тканью, смоченной в спирте, обезжиривая их, чтобы они сохраняли свои липкие свойства.

Сушить при комнатной температуре на сухом полотенце

Нельзя сушить компрессионные изделия на солнце и на отопительной батарее

Показания

Первичное и вторичное варикозное расширение вен.

Варикозная болезнь во время беременности.

Отеки во время беременности.

Флебосклерозирующее лечение варикозной болезни.

Состояние после хирургического лечения варикозной болезни.

Тромбофлебит поверхностных вен.

Тромбоз глубоких вен, состояние после тромбоза.

Посттромботический синдром.

Профилактика тромбоза глубоких вен у амбулаторных больных.

Профилактика трофических венозных язв.

Лимфо-венозная недостаточность.

Ангидисплазии - врожденные аномалии венозной системы.

Лимфедема (слоновость) нижних конечностей.

Посттравматический отек.

Послеоперационный отек.

Циклический идиопатический отек.

Липоэдема II стадии.

Нарушение венозного оттока вследствие продолжительного состояния неподвижности (артрогенный застойный синдром, парезы или частичные парезы конечностей).

Прочие показания: послеожоговые состояния, лечение рубцов

Противопоказания

При указанных ниже заболеваниях запрещается пользоваться медицинскими компрессионными чулками VENOSAN (ВЕНОСАН).

Полный запрет при:

- Тяжелом нарушении артериального кровообращения
- Тяжелой невропатологии
- Тяжелой микроангиопатии
- Для лежачих больных

В зависимости от выраженности отека при:

- Ярко выраженных отеках
- Мокнущих дерматитах
- Декомпенсированные формы сердечно-легочной недостаточности
- Сразу же после тромбоза глубоких вен

В случае невыполнения вышеуказанных противопоказаний изготовитель снимает с себя всякую ответственность.

Риск и побочные действия

При носке чулок с силиконовой полоской возможно возникновение раздражения у людей с чувствительной кожей.

Хранение лечебных изделий

Могут храниться в течение 36 месяцев (см. этикетку). Для профилактических изделий срок годности не предусмотрен. Хранить при комнатной температуре в месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей.

100-процентная гарантия качества

Ваши изделия VENOSAN (ВЕНОСАН) были тщательно проверены перед отгрузкой с завода. Тем не менее, если в течение 6 месяцев при условии правильного ухода обнаружатся дефекты материала, Вы имеете право на бесплатную замену. Принесите бракованное изделие вместе с чеком обратно в магазин, где Вы его приобрели, или направьте непосредственно к нам по адресу:

SALZMANN AG, Salzmänn MEDICO, Rorschacher Strasse 304, CH-9016 St. Gallen, Switzerland, Швейцария.

Генеральный директор: _____

Иванишвили Л.О./



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

3 (три) листов(а)

Генеральный директор:

