


репродуктивной системы или преждевременных родов. Именно поэтому так важно регулярно измерять pH влагалища. При изменении цвета индикатора, показывающего нарушение баланса необходимо срочно обратиться к врачу и провести соответствующее обследование микрофлоры влагалища методами, диагностирующие наличие той или иной инфекции.

5. Проведение теста


Определение вагинального параметра pH осуществляется очень просто и безболезненно. Необходимо расслабиться и в точности соблюдать указанные ниже действия.

1. Перед началом теста следует вымыть руки;
2. Открыть коробку, вынуть тест, открыть пленку. Взять аппликатор за кольцообразную ручку;

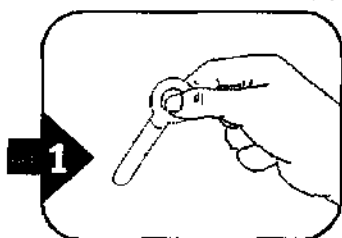


3. Удерживайте аппликатор за ручку большим и указательным пальцем, как показано на рис. 1. Большой палец должен всегда располагаться на стороне вагинального аппликатора, на которой нет измерительной зоны.

4. Не допускайте, чтобы измерительная зона pH соприкасалась с другими жидкостями;
5. Сядьте с раздвинутыми коленями или поставьте одну ногу на туалетное сиденье или другую прочную поверхность;
6. Теперь свободной рукой осторожно откройте влагалищное отверстие;

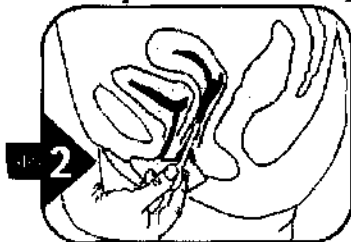

7. Введите вагинальный аппликатор во влагалище, как если бы Вы использовали тампон, см. рис. 2. (Примерно на глубину 1 – 3 см, но не глубже, чем до круглой ручки); Введение вагинального аппликатора полностью безболезненно;
8. Теперь осторожно прижмите введенный аппликатор примерно на 10 секунд к задней стенке влагалища (в сторону прямой кишки), чтобы измерительная зона pH как следует намокла. Достаточное увлажнение очень важно для оценки результатов теста;
9. Осторожно вынуть вагинальный аппликатор из влагалища;
10. Сравнить цвет индикатора теста с цветом на шкале, записать результат;
11. Использованный тест подлежит утилизации как обычный бытовой мусор.

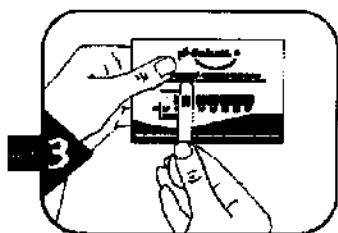

Параметры pH во влагалище составляют от 4,0 до 4,4, т.е. в норме.

Цвет индикатора желтоватого цвета.

Параметр pH во влагалище свыше 4,4 – за пределами нормы. Цвет индикатора темнее и переходит в коричневато-зелено-синий тон.

Важно. Если на измерительной зоне pH после проведения теста нет единой окраски, то это указывает на неправильность проведения теста. Возможная причина может заключаться в том, что измерительная зона недостаточно увлажнена влагалищным секретом. В этом случае можно еще раз повторить замер с тем же вагинальным аппликатором. Но можно использовать и новый тест.

Каждый аппликатор используют только один раз. При помощи аппликатора на влагалищную кислотность определяет только параметр pH, но не подтверждает наличие или отсутствие инфекций.

6. Спецификация и характеристики

Экспресс-тест на влагалищную кислотность «**PREMIUM DIAGNOSTICS**» - представляет собой вагинальный аппликатор размером около 8 см. Вагинальный аппликатор из полистирола состоит из круглой ручки и вводной части длиной 4,5 см, сделанной в форме тубуса. На кончике вводной части расположена реагентная матрица (индикатор привитый к целлюлозе) для замера pH.

Корпус аппликатора изготовлен из полимера марки: Полистирол медицинский.

Красящие компоненты соответствуют стандартам Европейского Сообщества для игрушек и продуктов питания.

О pH-индикационной полоске известно, что она применяется для определения уровня pH влагалища в течение нескольких лет компанией конкурентом