

Руководство по эксплуатации

«Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие: медицинские зонды, бужи, катетеры, медицинские канюли»

производства: VITA-Medizintechnik (ВИТА-Медицинтехник), Oberer Bann 60, 78532, Tuttlingen, Germany, Германия, тел.: +49(0)7461-81-03 факс: +49(0)7461-9115484 E-mail: info@vita-medizintechnik

Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие: медицинские зонды, бужи, катетеры, медицинские канюли (Приложение 1) (далее «инструменты») - медицинский инструмент в виде трубки из металла для исследования естественных ходов и полостей в организме человека, катетеризации, тоннелизации и проколов органов с последующим отсасыванием из них жидкости. Инструменты предназначены для многократного использования.

Материал, применяемый в изготовлении инструментов, разрешен Министерством Здравоохранения РФ. Он устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки в растворе с применением препаратов, применяемых в медицине и стерилизации.

Все виды инструмента являются коррозионно-стойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.

Дезинфекция и стерилизация

Инструменты устойчивы к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки, воздушной стерилизации.

Предстерилизационная и дезинфекционная очистка состоит из:

1.погружение инструментов в дезинфицирующий моющий раствор (не использовать хлоро-, хлоридо-, перекиси водорода содержащие и другие средства, которые вызывают коррозию. Рекомендуется использовать средства с нейтральным pH 7,0 или слабо щелочные средства с ингибитором коррозии) сразу после использования их в ходе операции при температуре 25° С в течение 30-60 мин (не оставляйте инструменты в растворе больше положенного времени!);

2.мойка в моющем растворе при помощи ерша в течение 0,5±0,1 мин (не использовать металлические щетки и губки)

После мойки в моющем растворе и перед стерилизацией обязательно соблюдать пункты №3,4,5.

3.ополаскивание проточной водой в течение 3±1 мин;

4.ополаскивание дистиллированной водой в течение 0,5±0,1 мин;

5.протирайте инструменты с помощью сухой тканевой тряпки, оставьте на открытом воздухе при температуре 22-40°С до полного исчезновения влаги.

На не полностью высушенном изделии, оставленном на хранение, могут появиться следы коррозии.

Примечание: Инструмент, который имеет коррозию, следует обязательно отделить от другого инструмента, так как он может вызывать коррозию.

Перед стерилизацией инструменты должны быть чистые, полностью высушены и в открытом виде. Стерилизацию инструмента проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре 170-180⁰С в течение 50-60 мин.

За коррозию, вызванную влагой, дезинфицирующим раствором, остатками крови и других веществ – завод изготовитель ответственности не несет.

Применение.

Для правильного использования и применения инструментов требуется соответствующее образование, квалификация и опыт работы.

Условия правильной эксплуатации инструментов:

- а) не допускать падения инструмента с большой высоты на твёрдую поверхность;
- б) не допускать длительное хранение инструмента в условиях высокой влажности;
- в) не допускать самостоятельного ремонта и регулировок инструмента в период гарантийного срока;
- г) по окончании работ очистить инструмент от загрязнителей.

Хранение.

Хранение инструментов должно осуществляться при температуре от 10°С-30° С и влажности воздуха от 30 до 60%. При этом температура и влажность воздуха в помещениях хранения не должны резко колебаться. Инструменты не должны быть подвержены прямым солнечным лучам и влаге, а также подвергаться воздействию химических паров. Не допускается хранить навалом.

Утилизация

Утилизация инструмента должна производиться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Гарантии производителя

Гарантированный срок хранения инструментов 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации инструментов 1 год.

Директор ООО «МК Волга-НН»



Д.В. Голунов

Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие:

1. **Медицинские зонды:** 17-33-000-11, 17-33-004-11, 17-33-000-13, 17-33-004-13, 17-33-000-14, 17-33-004-14, 17-33-000-16, 17-33-004-16, 17-33-000-18, 17-33-004-18, 17-33-000-20, 17-33-004-20, 17-33-000-25, 17-33-004-25, 17-33-013-11, 17-33-013-13, 17-33-013-14, 17-33-013-16, 17-33-013-18, 17-33-013-20, 17-33-013-25, 17-33-033-10, 17-33-027-11, 17-33-027-13, 17-33-027-14, 17-33-027-16, 17-33-027-20, 17-33-120-16, 17-33-117-14, 17-33-126-20, 17-33-110-11, 17-33-110-13, 17-33-110-14, 17-33-110-16, 17-33-110-18, 17-33-110-20, 17-33-122-13, 17-33-122-14, 17-33-122-16, 17-33-122-18, 17-33-130-01, 17-33-130-02, 17-33-130-03, 17-33-130-04, 17-33-264-28, 17-33-260-15, 17-33-262-12, 17-33-262-18, 17-33-271-12, 17-33-271-14, 17-33-271-16, 17-33-271-18, 17-33-270-12, 17-33-270-14, 17-33-270-16, 17-33-270-18, 17-33-270-23, 19-50-078-32, 19-50-082-35, 17-33-138-00, 17-33-138-01, 17-33-138-12, 17-33-138-23, 17-33-138-34, 17-33-138-45, 17-33-138-67, 17-33-138-78, 17-33-139-00, 17-33-139-01, 17-33-139-12, 17-33-139-23, 17-33-139-34, 17-33-139-45, 17-33-139-67, 17-33-139-78, 02-12922-00, 02-12923-00, 02-12924-00, 02-12926-00, 02-12927-00, 02-2923-10, 02-2919-10, 02-2922-10, 02-2924-10, 02-2925-10, 02-2926-10, 02-2927-10, 02-2918-20, 02-12920-00, 02-12930-00.

2. **Бужи:** 19-56-620-06, 19-56-620-08, 19-56-620-10, 19-56-620-12, 19-56-620-14, 19-56-620-16, 19-56-620-18, 19-56-620-20, 19-56-620-22, 19-56-620-24, 19-56-620-26, 19-56-620-28, 19-56-620-30, 19-56-620-32, 19-56-620-34, 19-56-620-36, 19-56-620-38, 19-56-620-40, 19-56-610-06, 19-56-610-08, 19-56-610-10, 19-56-610-12, 19-56-610-14, 19-56-610-16, 19-56-610-18, 19-56-610-20, 19-56-610-22, 19-56-610-24, 19-56-610-26, 19-56-610-28, 19-56-610-30, 19-56-610-32, 19-56-610-34, 19-56-610-36, 19-56-610-38, 19-56-610-40, 19-56-612-10, 19-56-612-12, 19-56-612-14, 19-56-612-16, 19-56-612-18, 19-56-612-20, 19-56-612-22, 19-56-612-24, 19-56-612-26, 19-56-612-28, 19-56-612-30, 19-56-660-00.

3. **Катетеры:** 19-56-615-15, 19-56-616-15, 19-56-617-15, 19-56-650-08, 19-56-650-10, 19-56-650-12, 19-56-650-14, 19-56-650-16, 19-56-650-18, 19-56-650-20, 19-56-650-22, 19-56-650-24, 19-56-660-08, 19-56-660-10, 19-56-660-12, 19-56-660-14, 19-56-660-16, 19-56-660-18, 19-56-660-20, 19-56-660-22, 19-56-660-24.

4. **Медицинские канюли:** 17-35-014-15, 17-35-014-25, 17-35-014-30, 17-35-014-40, 17-35-014-60, 17-35-018-15, 17-35-018-25, 17-35-018-30, 17-35-018-40, 17-35-018-60, 17-35-050-10, 17-35-050-11, 17-35-050-12, 17-35-050-14, 17-35-050-15, 17-35-040-24, 17-35-030-03, 17-35-030-04, 17-35-030-05, 17-35-030-06, 17-35-030-07, 17-35-030-08, 17-35-030-09, 17-35-030-10, 17-35-030-11, 17-35-030-12, 17-35-030-14, 17-35-030-15, 17-35-031-03, 17-35-031-04, 17-35-031-05, 17-35-031-06, 17-35-031-07, 17-35-031-08, 17-35-031-09, 17-35-031-10, 17-35-031-11, 17-35-031-12, 17-35-031-14, 17-35-031-15, 17-35-032-03, 17-35-032-04, 17-35-032-05, 17-35-032-06, 17-35-032-07, 17-35-032-08, 17-35-032-09, 17-35-032-10, 17-35-032-11, 17-35-032-12, 17-35-032-14, 17-35-032-15, 17-35-033-03, 17-35-033-04, 17-35-033-05, 17-35-033-06, 17-35-033-07, 17-35-033-08, 17-35-033-09, 17-35-033-10, 17-35-033-11, 17-35-033-12, 17-35-033-14, 17-35-033-15, 17-35-034-03, 17-35-034-04, 17-35-034-05, 17-35-034-06, 17-35-034-07, 17-35-034-08, 17-35-034-09, 17-35-034-10, 17-35-034-11, 17-35-034-12, 17-35-034-14, 17-35-034-15, 17-35-045-00, 17-35-045-05, 17-35-045-07, 17-35-045-09, 17-35-045-12, 17-35-046-00, 17-35-046-04, 17-35-046-06, 17-35-046-08, 17-35-047-10, 17-35-047-15, 17-35-048-30, 17-35-048-35, 17-35-048-45, 17-35-049-15, 17-35-049-20, 17-35-049-25, 17-35-049-35, 17-35-000-31, 17-35-000-12, 17-35-000-18, 17-35-000-20, 17-35-000-48, 17-35-000-13, 17-35-000-00, 17-35-020-06, 17-35-020-08, 17-35-020-10, 17-35-020-10, 17-35-021-08, 17-35-021-10, 17-35-024-01, 17-35-024-02, 17-35-024-03, 17-35-024-04, 17-35-012-15, 17-35-012-25, 17-35-012-35, 17-35-050-21, 17-35-050-22, 17-35-051-01, 17-35-051-15, 17-35-051-20, 17-35-051-25, 17-35-051-35, 17-35-014-23, 52-206-900-000, 52-206-900-100, 52-206-900-000, 52-206-900-100, 52-206-912-150, 52-206-912-151, 52-206-913-150, 52-206-913-151, 52-206-913-200, 52-206-913-201, 52-206-913-250, 52-206-913-251, 52-206-913-300, 52-206-913-301, 52-206-914-150, 52-206-914-151, 52-206-914-200, 52-206-914-201, 52-206-914-250, 52-206-914-251, 52-206-914-300, 52-206-914-301, 52-206-915-150, 52-206-915-151, 52-206-915-200, 52-206-915-201, 52-206-915-250, 52-206-915-251, 52-206-915-300, 52-206-915-301, 52-206-922-150, 52-206-922-151, 52-206-923-150, 52-206-923-151, 52-206-923-200, 52-206-923-201, 52-206-923-250, 52-206-923-251, 52-206-923-300, 52-206-923-301, 52-206-924-150, 52-206-924-151, 52-206-924-200, 52-206-924-201, 52-206-924-250, 52-206-924-251, 52-206-924-300, 52-206-924-301, 52-206-925-150, 52-206-925-151, 52-206-925-200, 52-206-925-201, 52-206-925-250, 52-206-925-251, 52-206-925-300, 52-206-925-301, 52-206-900-000, 52-206-900-100, 52-206-932-150, 52-206-932-151, 52-206-933-150, 52-206-933-151, 52-206-933-200, 52-206-933-201, 52-206-933-250, 52-206-933-251, 52-206-933-300,

52-206-933-301, 52-206-934-150, 52-206-934-151, 52-206-934-200, 52-206-934-201, 52-206-934-250, 52-206-934-251, 52-206-934-300, 52-206-934-301, 52-206-935-150, 52-206-935-151, 52-206-935-200, 52-206-923-201, 52-206-935-250, 52-206-935-251, 52-206-935-300, 52-206-923-301, 52-206-952-150, 52-206-952-151, 52-206-953-150, 52-206-953-151, 52-206-953-200, 52-206-953-201, 52-206-953-250, 52-206-953-251, 52-206-953-300, 52-206-953-301, 52-206-954-150, 52-206-954-151, 52-206-954-200, 52-206-954-201, 52-206-954-250, 52-206-954-251, 52-206-954-300, 52-206-954-301, 52-206-955-150, 52-206-955-151, 52-206-955-200, 52-206-955-201, 52-206-955-250, 52-206-955-251, 52-206-955-300, 52-206-955-301, 52-206-942-150, 52-206-942-151, 52-206-943-150, 52-206-943-151, 52-206-943-200, 52-206-943-201, 52-206-943-250, 52-206-943-251, 52-206-943-300, 52-206-943-301, 52-206-944-150, 52-206-944-151, 52-206-944-200, 52-206-944-201, 52-206-944-250, 52-206-944-251, 52-206-944-300, 52-206-944-301, 52-206-945-150, 52-206-945-151, 52-206-945-200, 52-206-945-201, 52-206-945-250, 52-206-945-251, 52-206-945-300, 52-206-945-301, 52-206-962-150, 52-206-962-151, 52-206-963-150, 52-206-963-151, 52-206-963-200, 52-206-963-201, 52-206-963-250, 52-206-963-251, 52-206-963-300, 52-206-963-301, 52-206-964-150, 52-206-964-151, 52-206-964-200, 52-206-964-201, 52-206-964-250, 52-206-964-251, 52-206-964-300, 52-206-964-301, 52-206-965-150, 52-206-965-151, 52-206-965-200, 52-206-965-201, 52-206-965-250, 52-206-965-251, 52-206-965-300, 52-206-965-301, 52-206-910-100, 52-206-910-000, 52-206-910-100, 52-206-812-150, 52-206-812-151, 52-206-813-150, 52-206-813-151, 52-206-813-200, 52-206-813-201, 52-206-813-250, 52-206-813-251, 52-206-813-300, 52-206-813-301, 52-206-814-150, 52-206-814-151, 52-206-814-200, 52-206-814-201, 52-206-814-250, 52-206-814-251, 52-206-814-300, 52-206-814-301, 52-206-815-150, 52-206-815-151, 52-206-815-200, 52-206-815-201, 52-206-815-250, 52-206-815-251, 52-206-815-300, 52-206-815-301, 52-206-832-150, 52-206-832-151, 52-206-833-150, 52-206-833-151, 52-206-833-200, 52-206-833-201, 52-206-833-250, 52-206-833-251, 52-206-833-300, 52-206-833-301, 52-206-834-150, 52-206-834-151, 52-206-834-200, 52-206-834-201, 52-206-834-250, 52-206-834-251, 52-206-834-300, 52-206-834-301, 52-206-835-150, 52-206-835-151, 52-206-835-200, 52-206-835-201, 52-206-835-250, 52-206-835-251, 52-206-835-300, 52-206-835-301, 52-206-842-150, 52-206-842-151, 52-206-843-150, 52-206-843-151, 52-206-843-200, 52-206-843-201, 52-206-843-250, 52-206-843-251, 52-206-843-300, 52-206-843-301, 52-206-844-150, 52-206-844-151, 52-206-844-200, 52-206-844-201, 52-206-844-250, 52-206-844-251, 52-206-844-300, 52-206-844-301, 52-206-845-150, 52-206-845-151, 52-206-845-200, 52-206-845-201, 52-206-845-250, 52-206-845-251, 52-206-845-300, 52-206-845-301, 52-206-920-000, 52-206-920-100, 52-206-920-000, 52-206-920-100, 52-206-982-200, 52-206-983-150, 52-206-983-151, 52-206-983-200, 52-206-983-201, 52-206-983-250, 52-206-983-251, 52-206-984-150, 52-206-984-151, 52-206-984-200, 52-206-984-201, 52-206-984-250, 52-206-984-251, 52-206-985-150, 52-206-985-151, 52-206-985-200, 52-206-985-201, 52-206-985-250, 52-206-985-251, 52-206-985-300, 52-206-985-301, 52-206-986-200, 52-206-986-201, 52-206-986-250, 52-206-986-251, 52-206-986-300, 52-206-986-301, 52-206-983-153, 52-206-983-203, 52-206-983-253, 52-206-984-153, 52-206-984-203, 52-206-984-253, 52-206-985-153, 52-206-985-203, 52-206-985-253, 52-206-985-303, 52-206-986-203, 52-206-986-253, 52-206-986-303, 52-301-404-030, 52-301-404-035, 52-301-404-040, A56-521-004, A56-523-110, A56-523-112, A56-522-200, A56-521-200, A56-525-006, A56-525-007, A56-525-008, A56-525-010, A56-525-012, A56-521-012, 52-56-743-270, 52-302-395-205, 52-302-253-185, 17-35-052-15, 17-35-052-20, 17-35-052-25, 17-35-052-30, 17-35-052-40, 17-36-140-03, 17-36-140-02, 17-36-140-04, 17-36-140-05, 17-36-140-06, 17-36-200-06, 17-36-040-10, 17-36-040-12, 17-36-040-20, 17-36-180-01, 17-36-180-08, 17-36-180-10, 17-36-180-12, 17-36-180-15, 17-36-180-17, 17-36-180-20, 17-36-041-14, 17-36-041-19, 17-36-042-14, 17-36-043-25, 17-36-043-30, 17-36-043-40.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 4 (четыре) листа.
Директор _____ Голунов Д.В.

